




**PELVI.LOC®**

## Pelvi – Contour - sittesystem PL-CSS - S - M - L

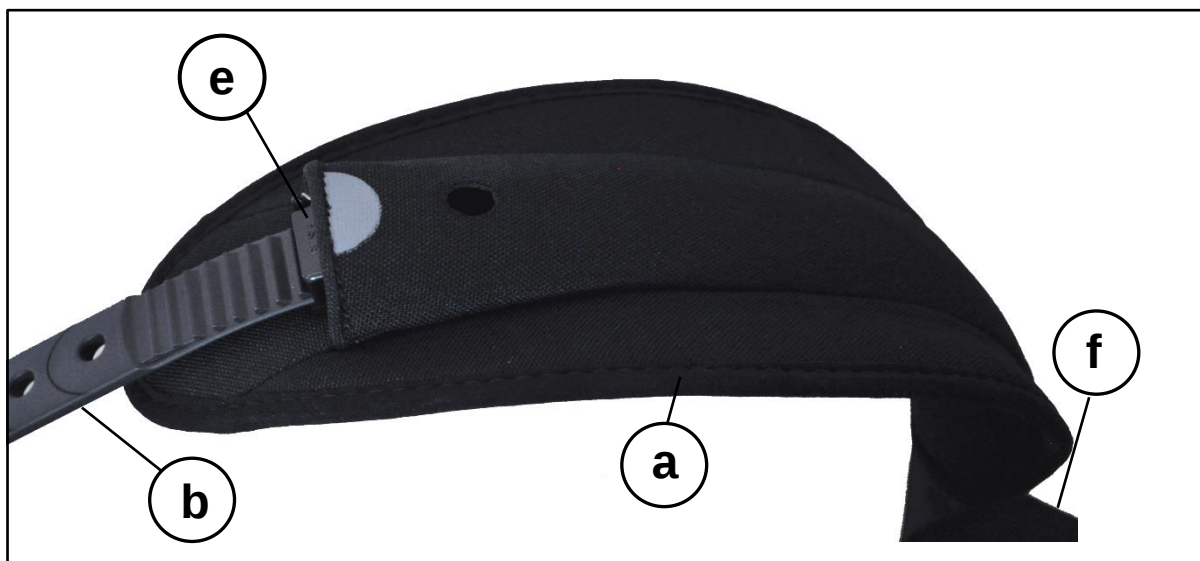

For sikker bruk av dette produktet, vennligst les og følg denne monterings- og bruksanvisningen før første bruk



### Bruksområde

Dette **PELVI.LOC®** Pelvi – Contour – Sittesystemet PL-CSS tjener til bedre posisjonering og tilbaketrekning av bekken for personer med nedsatt bevegelighet på et sete, og forhindrer at man sklir fremover i f.eks en rullestol, aktivitetsrullestol, et sitteskall, en behandlingsstol, i en rehab buggy, i et sportsutstyr.

### Beregnet pasientgruppe:

- Barn, ungdom og voksne
- Kjønn: kvinner og menn

### Mottakskontroll

Pakk ut produktet helt og kontroller at forsendelsen er fullstendig og uten transportskader. Hvis du opplever at forsendelsen har en uventet feil, så:

1. Klag straks til transportøren
2. Få registrert skaden / feilen
3. Informer oss eller forhandleren din umiddelbart

### Leveringsomfang

- 1) 1 x **PELVI.LOC®** PL-CSS -S, -M, -L forhåndsmontert
- 2) 1 x Informasjon for online nedlasting av monterings- og bruksanvisningen

### Kombinasjon av medisinsk utstyr

Egnet som hjelpemiddel ved bruk av et bekkenbelte

## Montering



Monteringen må utføres av en person med spesialkunnskap

1. Plasser polsteret (a) henholdsvis på bekkenområdet/hoftebøyen/skrittet.
2. Så festes tannbeltet (b) til seterøret på rullestolen (følg monteringsanvisningen.)
  - Beltestroppen (f) festes til sitteflaten på rullestolen
3. Still inn avstanden til polsteret med tannbeltet (b). 3 D- selen strammes ved bruk av trykkspennene (e).
4. Så strammes tannbåndet (b) på begge sider så mye at det fremdeles er nok plass til å legge en håndflate mellom låret og polsteret.
5. Ved behov kan endene av tannbeltet avrundes. Puss endene av det kuttete tannbeltet om nødvendig. – Fare for personskade.
6. Kontroller at festet sitter godt og er låst på begge sider av tannbeltet.



## Bruksanvisning



### Sikkerhetsanvisninger

Til tross for den stabile konstruksjonen, er komponenter som låsebelter, tannbelter og polster utsatt for en viss mengde slitasje. Derfor anbefales det å gjennomføre en grundig inspeksjon av **PELVI.LOC®** hver 3. måned. Forsikre deg også om at nagle- og skrueforbindelsene er sikre!

- Du må kontrollere at produktet er i brukbar stand og har riktig passform før bruk - fare for ulykke!
- Ikke lapp eller lim ødelagte deler som låsestropper/sikkerhetsbelter (f) tannbelter (b) eller polstre (a), for så å bruke dem igjen – fare for ulykke.
- Ikke sitt på polsteret – Fare for trykkpunkter spesielt på grunn av sperrene (e).
- Ikke løft rullestolen over **PELVI.LOC®**. Fare for ulykke.
- Forsikre deg om at hendene ikke kommer mellom det tannbeltet og rammen eller seterøret - fare for klemskader!

### Begrensninger i bruk / uønskede bivirkninger

- Ikke bruk **PELVI.LOC®** hvis det er bloduttredelser, sår eller andre skader som ikke er grodd i området til polsteret – fare for personskader.
- Ikke bruk **PELVI.LOC®** i tilfelle beintap, beinskjørhet eller alvorlige sirkulasjonsforstyrrelser - fare for personskade.
- Etter rengjøring må det påses at **PELVI.LOC®** virker som den skal.
- En skadet **PELVI.LOC®** bør skiftes ut umiddelbart – fare for ulykke.

**Advarsel:**

- **PELVI.LOC®** er ikke en del av sikkerhetssystemet for rullestolen og/eller brukeren ved transport av personer med nedsatt funksjonsevne i et kjøretøy.
- Når det gjelder produktansvar, kan verken produsenten eller distributøren holdes ansvarlig for skader eller risiko i tilknytning til barn uten tilsyn i forbindelse med produktet.

**Bruk**

1. For å bruke **PELVI.LOC®** legges polsteret (a) på bekkenområdet/hofteleddene.



**Advarsel:** Forsikre deg om at det ikke er gjenstander under polsteret! På den måten unngår du smertefulle trykksteder.

2. Før så tannbeltet (b) gjennom den respektive sperren. For å gjøre dette, bruk den tilhørende skrallespennen (e).
  3. Så strammes tannbåndet (b) så mye at det fremdeles er nok plass til å legge en håndflate mellom låret og polsteret.
  4. Forsikre deg om at spennene (e) griper inn i tennene på tannbeltet.
- Gjennomfør en strekkprøve.

Hvis posisjoneringssystemet løsner uønsket mens du bruker **PELVI.LOC®**, kan dette avhjelpes ved å stramme spennen på nytt.

**For å åpne **PELVI.LOC®**** trykk på spennen (e) og trekk ut tannbeltet.

- Pass på at polstrene ikke kommer inn mellom eikene på drivhjulet.

**Rengjøring og desinfisering**

- Kan vaskes i maskin ved 40 grader.
- Kjemotermisk desinfisering mulig ved å tilsette ELTRA 40 til vaskesyklusen
- Ingen sentrifugering
- Egner seg ikke i tørketrommelen

**Vedlikehold**

**PELVI.LOC®** må regelmessig sjekkes for skader og funksjonalitet.

**Reparasjon**

Defekt **PELVI.LOC®** må skiftes ut omgående.

## Avfallsbehandling


- Emballasjen til enheten kan gjenvinnes.
- Metalldelene kan kastes i metallavfall, og er gjenvinnbare.
- Plastmaterialene er gjenvinnbare.
- Avfallshåndteringen må skje i henhold til respektive forskrifter på stedet.
- Spør lokalt / kommunen om lokale avfallsselskaper.

## Tekniske data

|                                  | S        | M       | L         |
|----------------------------------|----------|---------|-----------|
| Setebredde (cm)                  | 26 - 35  | 36 - 39 | 40 - 46   |
| Polstringsstørrelse (cm)         | 19 x 7,5 | 29 x 11 | 36 x 13,5 |
| Vekt (g)                         | 260      | 300     | 400       |
| Forutbestemt bruddpunkt (ca. kg) | 60       | 80      | 80        |

|                               |                   |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Størrelse tannbånd XXXS - XXS |                   | uten lateks<br><br> |
| Størrelse tannbånd XS - S     | 2,4 x 0,2 x 40 cm |                                                                                                                                                                                               |
| Størrelse tannbånd M - L - XL | 2,4 x 0,2 x 40 cm |                                                                                                                                                                                               |
| Skrallespenne str. XXXS       |                   |                                                                                                                                                                                               |
| Skrallespenne str. XXS        |                   |                                                                                                                                                                                               |
| Skrallespenne str. XS - S     | B-24-STAR-BL      |                                                                                                                                                                                               |
| Skrallespenne str. M - L - XL | B-24-STAR-BL      |                                                                                                                                                                                               |

## Betingelser for lagring og transport
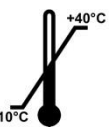
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Temperaturområde ved langfristig lagring -10 °C til +40 °C.</p> <p>Midlertidige temperaturtopper, f.eks. i forbindelse med transport, på -20 °C til +60 °C tolereres godt av materialet og påvirker ikke sikkerheten og ytelsen til produktet.</p> |
|  | Beskyttes mot fuktighet under lagring og transport                                                                                                                                                                                                    |

## Garanti

Vi gir en garanti for dette produktet i samsvar med lovkrav. Dette dekker material- og bearbeidingsfeil. Utelukket fra denne er slitasjedeler og deler/komponentgrupper som er utsatt for normal slitasje, samt skader som er et resultat av overdreven belastning, «ikke-forskriftsmessig bruk», voldsom skade eller utillatt endring/reparasjon. I garantitilfelle henvender du deg til fagforhandler, hvor du har kjøpt dette produktet. På grunn av produktansvar får reparasjon-, vedlikeholds- og istandsettingsarbeid kun utføres av autorisert fagforhandler ved bruk av originale reservedeler



### Produsent:

A2J GmbH

Am Fuchsberg 13

D-87452 Altusried

Tlf: +49 (08373) 987269

Faks: +49 (08373) 987276

e-post: [info@a2j-intl.com](mailto:info@a2j-intl.com)

Internett: [www.a2j-intl.com](http://www.a2j-intl.com)



Dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene i EU-forordning 2017/745 om medisinsk utstyr – Medical Device Regulation (MDR)

Utgave 01.01.2025

Med forbehold om tekniske endringer