




## **PELVI.LOC® PL-3DWP -XS, -S, -M, -L**



Für die sichere Anwendung dieses Produktes lesen und beachten Sie bitte vor dem Erstgebrauch diese Montage- und Gebrauchsanweisung

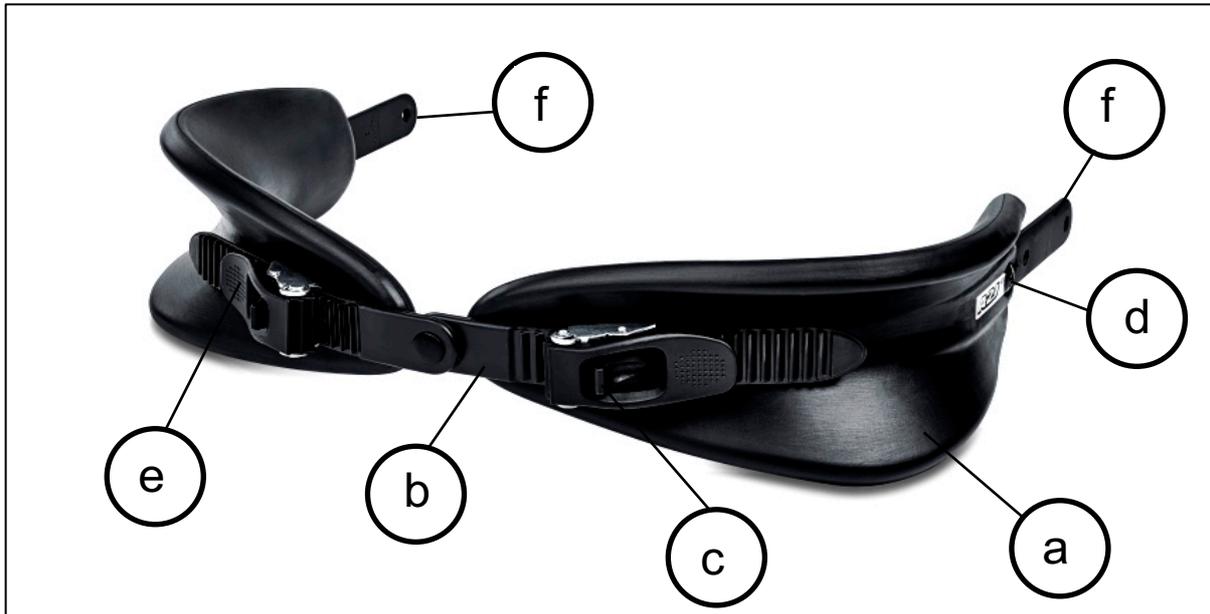

### **Anwendungsbereich**

Dieser **PELVI.LOC®** PL-3DWP Waterproof dient zur Positionierung und Beckenretraktion für Personen mit eingeschränkter Mobilität auf einer Sitzfläche z.B. Duschrollstuhl, Badeliege, Rollstuhl, Sitzschale, Therapiestuhl, Reha Buggy, Sportgerät

### **Vorgesehene Patientengruppe:**

- Kinder, Jugendliche und Erwachsene
- Geschlecht : weiblich und männlich

### **Empfangskontrolle**

Packen Sie das Produkt komplett aus und prüfen Sie die Sendung auf Vollständigkeit und Transportschäden. Sollten Sie feststellen, dass die Sendung wider Erwarten einen Fehler aufweist, so:

1. Reklamieren Sie unverzüglich beim Frachtführer
2. Lassen Sie den Schaden / Fehler protokollieren
3. Informieren Sie uns oder Ihren Fachhändler unverzüglich

### **Lieferumfang**

- 1) 1 x **PELVI.LOC®** PL-3DWP -XS, -S, -M, -L vormontiert
- 2) 1 x Informationen zum online Download der Montage- und Gebrauchsanweisung

## Kombination von Medizinprodukten

Geeignet für Hilfsmittel die für den Einsatz eines Beckenretraktionsgurt vorgesehen sind

### Montage



Die Montage sollte durch eine Person mit fachlichen Kenntnissen erfolgen

1. Die Polster (a) jeweils im Beckenbereich / Hüftbeugefalte anlegen. – Das Zahnband (b) liegt dabei oben.
  - Das Logo auf dem Polster ist danach auf der linken Seite lesbar
2. Den Abstand der Polster über das Zahnband (b) durch betätigen der Ratschenschnallen (e) einstellen.
  - Das Gelenk des Zahnbandes sollte sich dann mittig zwischen den Polstern befinden.
  - Das Zahnband max. so weit herausziehen, dass noch zwei Zähne hinter jedem Schnapper (c) frei sind.
3. Anschließend die Lochriemen (f ) am Rahmenrohr des Rollstuhls befestigen
4. Das Zahnband (b) auf beiden Seiten gleich und so weit spannen, dass noch Platz für eine flache Hand zwischen Oberschenkel und Polster ist.
5. Bei Bedarf können die Enden des Zahnbandes halbrund abgelängt werden. Die Enden des abgelängten Zahnbandes ggf. entgraten. –Verletzungsgefahr!
6. Den festen Sitz sowie die Arretierung auf beiden Seiten des Zahnbandes prüfen!



### Gebrauchsanweisung



### Sicherheitshinweise

Trotz der stabilen Bauweisen unterliegen Bauteile wie Lochgurte, Zahnbänder und Polster einem gewissen Verschleiß. Daher wird empfohlen, den **PELVI.LOC®** PL-3DWP alle 3 Monate gründlich zu kontrollieren. Hierbei ist auch auf den festen Sitz von Nieten- und Schraubverbindungen zu achten!

- Überzeugen Sie sich vor der Benutzung von dem gebrauchstauglichen Zustand sowie dem korrekten Sitz des Produktes – Unfallgefahr!
- Beschädigte Bauteile wie Lochriemen (f), Zahnband (b) oder Polster (a) nicht flicken bzw. kleben und wieder einsetzen – Unfallgefahr!
- Setzen Sie sich nicht auf die Polster – Gefahr von Druckstellen speziell durch die Ratschen (c)!
- Heben Sie den Rollstuhl nicht über den **PELVI.LOC®** PL-3DWP an - Unfallgefahr!
- Achten Sie darauf, dass die Hände nicht zwischen Lochriemen und Rahmen- oder Sitz Rohr geraten - Quetschgefahr!

## Anwendungsbeschränkungen / unerwünschte Nebenwirkungen

- Verwenden Sie den **PELVI.LOC®** PL-3DWP nicht, wenn sich in dem Bereich der Polster Druckstellen, Wunden oder andere nicht verheilte Verletzungen befinden – Verletzungsgefahr!
- Verwenden Sie den **PELVI.LOC®** PL-3DWP nicht bei Knochenschwund, Glasknochen oder starken Durchblutungsstörungen – Verletzungsgefahr!
- Nach dem Reinigen die korrekte Funktion des **PELVI.LOC®** PL-3DWP überprüfen!
- Ein beschädigter **PELVI.LOC®** PL-3DWP sollte unverzüglich erneuert werden – Unfallgefahr!



### Achtung :

- Der **PELVI.LOC®** PL-3DWP ist nicht Teil des Rückhaltesystems für den Rollstuhl und/oder Insassen beim Transport in einem Behindertentransportfahrzeug.
- Weder Produzent noch Vertrieb können im Sinne der Produkthaftung für Schäden oder Risiken haftbar gemacht werden, die durch unbeaufsichtigte Kinder im Zusammenhang mit dem Produkt verursacht werden!

## Anwendung

1. Zur Anwendung des **PELVI.LOC®** PL-3DWP werden die Polster (a) auf die Oberschenkel gelegt.



**Achtung:** Achten Sie darauf, dass sich keine Gegenstände unter dem Polster befinden! So vermeiden Sie schmerzhafte Druckstellen.

2. Dann das Zahnband (b) durch die jeweilige Ratsche führen. Dazu die entsprechende Ratschenschnalle (e) betätigen.
3. Anschließend das Zahnband (b) soweit spannen, dass noch Platz für eine flache Hand zwischen Oberschenkel und Polster ist.
4. Stellen Sie sicher, dass die Schnapper (c) in die Zähne des Zahnbands greifen!
  - Zugprobe durchführen!

Kommt es während der Anwendung des **PELVI.LOC®** PL-3DWP zu einer ungewollten Lockerung des Positionierungssystems, so kann diese durch ein erneutes Spannen behoben werden.

**Zum Öffnen des **PELVI.LOC®** PL-3DWP** den Schnapper (c) betätigen und das Zahnband herausziehen.

- Darauf achten, dass die Polster nicht zwischen die Speichen des Antriebsrades geraten!

## Reinigung und Desinfektion

- Wischdesinfektion mit ISOPROPANOL 70%
- Keine Lösungsmittel wie Aceton oder Waschbenzin verwenden!

## Wartung

Der **PELVI.LOC®** PL-3DWP ist regelmäßig auf Beschädigung und Funktion zu überprüfen.

## Reparaturen

Defekten **PELVI.LOC®** unverzüglich austauschen.

