


PELVI.LOC PL-KG-GO - S, - M, - L

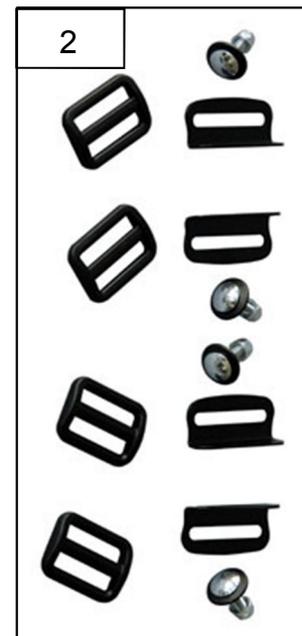

Für den sicheren Gebrauch dieses Produktes lesen und beachten Sie vor dem Erstgebrauch diese Montage-Gebrauchsanleitung

1 Verwendungszweck

Dieser Pelvi.Loc dient Personen mit eingeschränkter Mobilität speziell zur Positionierung der Beine auf dem Fußbrett und verhindert ein nach vorne rutschen.

2 Empfangskontrolle

Packen Sie das Produkt komplett aus und prüfen Sie die Sendung auf Vollständigkeit und Transportschäden. Sollten Sie feststellen, dass die Sendung wider Erwarten einen Fehler aufweist, so:

1. Reklamieren Sie unverzüglich beim Frachtführer
2. Lassen Sie den Schaden / Fehler protokollieren
3. Informieren Sie uns oder Ihren Fachhändler unverzüglich

3 Lieferumfang

- 1) 1 x PELVI.LOC Knöchelgamasche vormontiert (paar)
- 2) 1 x Anbau-Set
- 3) 1 x Montage und Gebrauchsanleitung/ Hinweis

4 Montage Knöchelgamasche mit Ratschenschnalle

- Die Montage sollte durch eine Person mit fachlichen Kenntnissen erfolgen
 -
1. Die beiden Gurte der Knöchelgamasche mittels Anbau-Set am Fußbrett befestigen.
 2. Die Polster (a) jeweils im Knöchelbereich anlegen. – Das Zahnband (b) liegt dabei vorne.
 - Das Logo auf dem Polster ist danach von seitlich lesbar!
 3. Den Abstand der Polster über das Zahnband (b) durch betätigen der Ratschenschnallen (e) einstellen.
 - Das Zahnband sollte sich dann vorne mittig zwischen den Polstern befinden.
 4. Bei Bedarf können die Enden des Zahnbandes halbrund abgelängt werden. Die Enden des abgelängten Zahnbandes ggf. entgraten. –Verletzungsgefahr!
 5. Den festen Sitz sowie die Arretierung auf beiden Seiten des Zahnbandes prüfen!

Gebrauchsanweisung

5 Sicherheitshinweise

Trotz der stabilen Bauweisen unterliegen Bauteile wie Lochgurte, Gurtbänder, Zahnband und Polster einem gewissen Verschleiß. Daher wird empfohlen, den PELVI.LOC alle 6 Monate gründlich zu kontrollieren. Hierbei ist auch auf den festen Sitz von Nieten- und Schraubverbindungen zu achten!

- Überzeugen Sie sich vor der Benutzung von dem gebrauchsfähigen Zustand sowie dem korrekten Sitz des Produktes. –Unfallgefahr!
- Beschädigte Bauteile wie Gurtband/Lochriemen, Zahnband (b) oder Polster (a) nicht flicken bzw. kleben und wieder einsetzen. –Unfallgefahr!
- Setzen Sie sich nicht auf die Polster –Gefahr von Druckstellen speziell durch die Ratschen (e)!
- Heben Sie den Rollstuhl nicht über den PELVI.LOC an. Unfallgefahr!
- Achten Sie darauf, dass die Hände nicht zwischen Loch Gurt und Vorderräder geraten, Quetschgefahr!
- Verwenden Sie den PELVI.LOC nicht wenn sich in dem Bereich der Polster Druckstellen, Wunden oder andere nicht verheilte Verletzungen befinden. –Verletzungsgefahr!
- Verwenden Sie den PELVI.LOC nicht bei Knochenschwund, Glasknochen oder starken Durchblutungsstörungen. – Verletzungsgefahr!
- Nach dem Reinigen die korrekte Funktion des PELVI.LOC sicherstellen!
- Ein beschädigter PELVI.LOC sollte unverzüglich erneuert werden. –Unfallgefahr!
-

6 Achtung:

Der PELVI.LOC ist nicht Teil des Rückhaltesystems für den Rollstuhl und/oder Insassen beim Transport in einem Behindertentransportfahrzeug.

- Weder Produzent noch Vertrieb können im Sinne der Produkthaftung für Schäden oder Risiken haftbar gemacht werden, die durch unbeaufsichtigte Kinder im Zusammenhang mit dem Produkt verursacht werden!

7 Handhabung

1. Zum Gebrauch des PELVI.LOC werden die Polster (a) auf um die Knöchel gelegt.
Achtung:
Achten Sie darauf, dass sich keine Gegenstände unter dem Polster befinden! So vermeiden Sie schmerzhafte Druckstellen.
2. Dann das Zahnband (b) durch die jeweilige Ratsche führen. Dazu die entsprechende Ratschenschnalle (e) betätigen.
3. Anschließend das Zahnband (b) soweit spannen, dass noch Platz für eine flache Hand zwischen Knöchel und Polster ist.
4. Stellen Sie sicher, dass die Schnapper (e) in die Zähne des Zahnbands greifen!
 - Zug probe durchführen!
 -

8 Zum Öffnen des PELVI.LOC den Schnapper © betätigen und das Zahnband herausziehen.

- Darauf achten, dass die Polster nicht zwischen die Speichen des Antriebrades geraten!

9 Reinigung und Desinfektion

- Geeignet für die Waschmaschine bis 40 Grad.
- Chemothermische Desinfektion möglich durch Zugabe von ELTRA 40 zum Waschgang
- Nicht schleudern
- Nicht geeignet für den Trockner

10 Wartung

Der PELVI.LOC ist regelmäßig auf Beschädigung und Funktion zu überprüfen.

11 Reparaturen

Defekten PELVI.LOC unverzüglich austauschen.

12 Entsorgung

- Die Geräteverpackung kann der Wertstoffwiederverwendung zugeführt werden.
- Die Metallteile können der Altmetallverwertung zugeführt werden.
- Kunststoffteile können der Kunststoffverwertung zugeführt werden.
- Die Entsorgung muss gemäß den jeweiligen nationalen gesetzlichen Bestimmungen erfolgen.
- Fragen Sie bitte bei der Stadt-/Gemeindeverwaltung nach örtlichen Entsorgungsunternehmen.

13 Technische Daten

Umfang	S	17-23 cm
Zahnband	S	R-19-VI-BL-210

Umfang	M	20-26 cm
Zahnband	M	R-19-VI-BL-275

Umfang	L	24-30 cm
Zahnband	L	R-19-VI-BL-300

14 Gewährleistung

Für dieses Produkt übernehmen wir die Gewährleistung, entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen und erstreckt sich auf Material- und Verarbeitungsfehler. Hiervon ausgeschlossen sind Verschleißteile und Teile/Baugruppen, die einer bestimmungsgemäßen Abnutzung unterliegen sowie Schäden, die sich als Folge übermäßiger Beanspruchung, unrichtiger Behandlung, gewaltsamer Beschädigung oder unzulässiger Änderung/Instandsetzung ergeben. Im Gewährleistungsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben. Aus Gründen der Produkthaftung dürfen Reparatur-, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten nur durch autorisierte Fachhändler, unter Verwendung von Original-Ersatzteilen durchgeführt werden.

15 Hersteller:

A2J GmbH
Am Fuchsberg 13
D-87452 Altusried
Fon: +49 (08373) 987269
Fax: +49 (08373) 987276

eMail: info@a2j-intl.com
Internet: www.a2j-intl.com



Dieses Produkt ist konform mit
den Grundlegenden
Anforderungen
der EG-Richtlinie 93/42/EWG
für Medizinprodukte