



PELVI.LOC® PL - OPS - Posizionamento regolabile del busto



Per un impiego sicuro di questo prodotto, leggere e osservare le presenti istruzioni per il montaggio e l'uso prima del primo utilizzo



Campo di applicazione - Finalità

L'OPS regolabile **PELVI.LOC®** è utile per le persone a mobilità ridotta, in particolare per il posizionamento del busto e del bacino sulla sedia a rotelle e/o seggiolino per bambini da auto, e impedisce lo scivolamento in avanti del bacino.

Gruppo di pazienti target:

- Bambini, ragazzi e adulti
- Ambo i sessi

Controllo alla consegna

Disimballare completamente il prodotto e verificare che la spedizione sia completa e non presenti danni da trasporto. Se, contrariamente alle aspettative, la spedizione è danneggiata o errata, procedere come segue:

1. Effettuare immediatamente un reclamo al corriere
2. Richiedere la registrazione del danno/errore
3. Informarne immediatamente la nostra azienda o il proprio rivenditore specializzato

Contenuto della spedizione

- 1) 1 x **PELVI.LOC**[®] PL - OPS regolabile preassemblato
- 2) 1 x informazioni su come scaricare le istruzioni per il montaggio e l'utilizzo

Combinazione di prodotti medicali

Idoneo per dispositivi destinati a essere utilizzati con una cintura di retrazione pelvica con posizionamento del busto.

Montaggio



Il montaggio deve essere effettuato da una persona dotata delle necessarie competenze tecniche.

1. Far passare la cinghia dello schienale (colore grigio) attraverso la fessura del sedile e dello schienale, chiuderla utilizzando la fibbia dietro il poggiatesta e tendere la cinghia.



Istruzioni per l'uso



Avvertenze di sicurezza

Nonostante la loro struttura stabile, componenti come cinghie, chiusura in velcro e tracolla sono soggetti a un certo grado di usura. Pertanto, si consiglia di eseguire un'ispezione approfondita del **PELVI.LOC**[®] OPS regolabile ogni 3 mesi. In questa occasione, verificare anche che i collegamenti rivettati siano saldamente in posizione!

- Prima dell'uso, assicurarsi che il prodotto sia in condizioni utilizzabili e che sia della misura corretta - pericolo di incidenti!
- Non riparare o incollare componenti danneggiati come fibbie/cinghie, chiusura in velcro o imbottiture e riutilizzarli - pericolo di incidenti!
- Non sedersi sulle imbottiture - sussiste il pericolo di creare punti di pressione, soprattutto a causa della presenza delle fibbie (d)!
- Non sollevare la sedia a rotelle afferrandola per il **PELVI.LOC®** OPS regolabile-- pericolo di incidenti!

Limitazioni per l'utilizzo / effetti collaterali indesiderati

- Non utilizzare il **PELVI.LOC®** OPS regolabile se nella zona delle imbottiture sono presenti ulcere, ferite o altre lesioni non guarite – pericolo di lesioni!
- Non utilizzare **PELVI.LOC®** OPS regolabile in caso di osteoporosi, osteogenesi imperfetta o gravi problemi circolatori - pericolo di lesioni!
- Dopo la pulizia, verificare il corretto funzionamento del **PELVI.LOC®** OPS regolabile!
- Se è danneggiato, sostituire immediatamente il **PELVI.LOC®** OPS regolabile - pericolo di incidenti!



Attenzione:

- Il **PELVI.LOC®** OPS regolabile non è un componente del sistema di ritenuta della sedia a rotelle e/o degli utenti della “sedia a rotelle” trasportati in un veicolo per il trasporto di persone con disabilità.
- Il produttore e il distributore non possono essere ritenuti responsabili - in termini di responsabilità del prodotto - riguardo ai danni o ai rischi derivanti dall'uso del prodotto da parte di bambini non sorvegliati!

Uso

1. Indossare la cintura addominale (a) nel cavallo fino circa all'altezza dell'ombelico. - Fissare saldamente gli spallacci (b) alla cintura addominale.



Attenzione: assicurarsi che non siano presenti oggetti sotto delle imbottiture! In questo modo si eviteranno punti di pressione dolorosi.

1. Fissare saldamente la cintura addominale (c) con una leggera trazione.
 2. Chiudere la fibbia (d) (ove presente), assicurandosi che ci sia ancora spazio per inserire una mano piatta tra l'addome e l'imbottitura.
 3. Assicurarsi che la fibbia (d) si innesti correttamente!
- Effettuare una prova di trazione!

Qualora durante l'uso del **PELVI.LOC®** OPS regolabile si verifichi un allentamento involontario del sistema, ripetere la procedura di posizionamento.

Per aprire il PELVI.LOC® OPS regolabile, agire sulla fibbia (d) se presente e aprire la cintura addominale.

- Assicurarsi che le imbottiture degli spallacci non si incastrino tra i raggi della ruota motrice!

Pulizia e disinfezione

- Lavabile in lavatrice fino a 40 gradi.
- È possibile eseguire una disinfezione chemioterica aggiungendo del detersivo ELTRA40 durante il processo di lavaggio
- Non centrifugare
- Non adatto all'asciugatrice

Manutenzione

Verificare regolarmente l'integrità e il corretto funzionamento del **PELVI.LOC®** OPS regolabile.


Riparazioni

Sostituire immediatamente il **PELVI.LOC®** OPS regolabile difettoso/danneggiato.

Smaltimento

- L'imballaggio del dispositivo può essere riciclato.
- Le parti metalliche possono essere destinate al riciclaggio dei rottami metallici.
- Le parti in plastica possono essere destinate al riciclaggio della plastica.
- Lo smaltimento deve essere effettuato secondo le disposizioni di legge nazionali.
- Rivolgersi all'amministrazione comunale per ricevere informazioni sulle aziende di smaltimento locali.



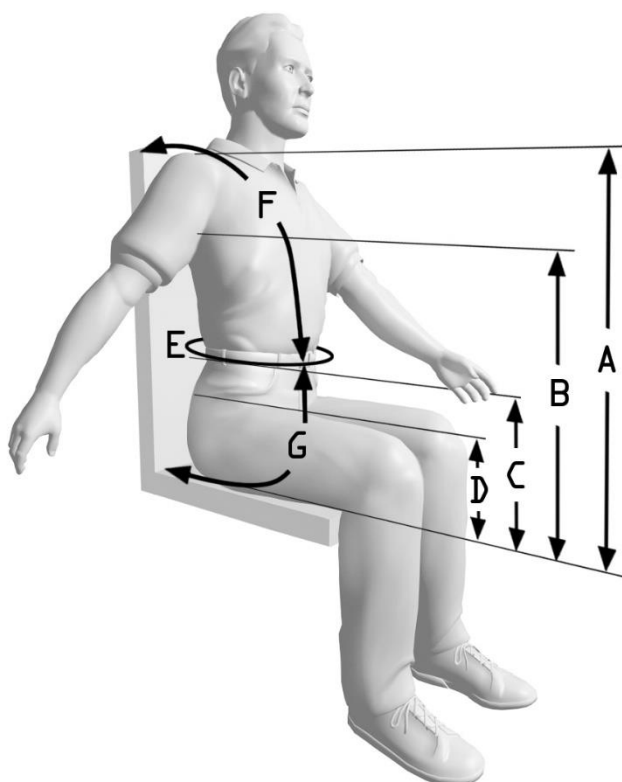

Dimensioni

A	Sedile - spalla	cm
B	Sedile - altezza ascella	cm
C	Sedile - vita	cm
D	Sedile - altezza coscia	cm
E	Vita - circonferenza	cm
F	Spalla - vita	cm
G	Dimensione del sedile (schienale - vita)	cm

Prendere le misure al di sopra degli indumenti senza alcuna aggiunta

Altezza schienale	cm	
Larghezza schienale	cm	
Distanza tra i tubi del poggiatesta	cm	
Possibilità di implementazione	Sì	No
Sedile - schienale		
Tipo di sedia a rotelle		

Tipi di chiusura richiesti

Chiusura a pressione apribile con 2 dita Art.no.: KSS-50	☐
Chiusura pressione apribile con 3 dita Art.no.: KSS-S-50	☐
Chiusura pressione apribile con 3 dita rivolta verso l'interno Art.no.: KSS-S-50 180°	☐
SKS-30-SF Serratura a innesto con funzione di sicurezza (apertura con perno)	☐

Prodotto privo di latex




Attenzione: Solo un modulo di misurazione accuratamente compilato può garantire un valido posizionamento del busto!



Attenzione: In caso di montaggio del *PELVI.LOC®* OPS regolabile in una vettura disponibile in commercio, bloccare sempre la persona utilizzando anche la cintura di sicurezza a 3 punti del veicolo!

Opbevarings- og transportforhold

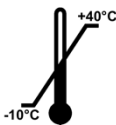	L'intervallo di temperatura per lo stoccaggio a lungo termine è compreso tra -10°C e +40°C. I picchi di temperatura a breve termine, ad esempio durante il trasporto, da -20°C a +60°C, sono ben tollerati dal materiale e non hanno alcun effetto sulla sicurezza e sulle prestazioni del prodotto.
	Proteggere dall'umidità durante lo stoccaggio e il trasporto

Garanzia

Per il presente prodotto forniamo una garanzia in conformità alle disposizioni giuridiche. Questa copre difetti del materiale e della lavorazione. Sono escluse dalla garanzia le parti soggette ad usura e le parti/i gruppi soggette/i a normale consumo, così come i danni causati da una sovrassollecitazione, da “uso non conforme”, danneggiamento volontario o modifiche/riparazioni non conformi. In caso di richieste di risarcimento rivolgersi al proprio rivenditore specializzato da cui è stato acquistato il prodotto. Ai fini della garanzia, i lavori di riparazione, manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere svolta dai rivenditori specializzati autorizzati, mediante l'uso di pezzi di ricambio originali



Produttore:

A2J GmbH
Am Fuchsberg 13
D-87452 Altusried
Fon: +49 (08373) 987269
Fax: +49 (08373) 987276
eMail: info@a2j-intl.com
Internet: www.a2j-intl.com

Versione 01.01.2025



Questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali del Regolamento UE 2017/745 sui dispositivi medici - Regolamento sui dispositivi medici (MDR).

Il produttore si riserva il diritto di apporre modifiche tecniche