




## **PELVI.LOC® PL-3DA - XS, -S, -M, -L**



Lue tämän tuotteen kokoonpano- ja käyttöohjeet ennen ensimmäistä käyttöä varmistaaksesi käytön turvallisuudesta.

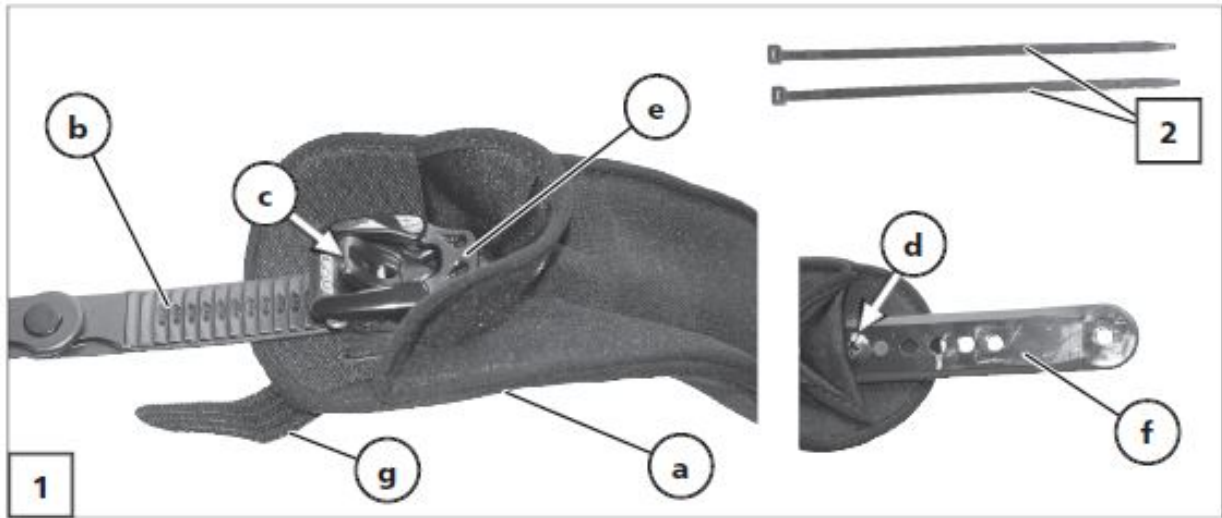

### **Soveltamisala**

**PELVI.LOC®** PL-3DA palvelee liikuntarajoitteisia ihmisiä etenkin heidän lantionsa sijoittamiseksi pyörätuoleihin ja aktiivisiin pyörätuoleihin ja estääkseen heitä liukumasta eteenpäin.

### **Potilasryhmä, jolle tuote on tarkoitettu:**

- Lapset, nuoret ja aikuiset
- Sukupuoli: naiset ja miehet

### **Vastaanottotarkastus**

Poista tuote pakkauksesta kokonaan ja tarkista, että lähetys ei ole puutteellinen ja että siinä ei ole kuljetusvaurioita. Jos huomaat, että lähetyksessä on odottamattomia puutteita, niin:

1. Tee heti valitus kuljettajalle
2. Kirjaa vahinko/virhe ylös
3. Ilmoita meille tai kauppiaille heti

### **Toimituksen sisältö**

- 1) 1 x **PELVI.LOC®** PL-3DA - XS, -S, -M, -L esiasennettu
- 2) 2 x nippuside 7,8 mm
- 3) 1 x tietoa kokoonpano- ja käyttöohjeiden lataamisesta verkosta

## Asennus



Asennus täytyy suorittaa asiantuntevan henkilön toimesta

1. Aseta pehmusteet (a) lantion alueelle/lantion ihon taittokohdassa. - Hammashihna (b) on päällä.
  - Pehmusteen logo näkyy sitten etupuolella!
2. Säädä pehmusteiden etäisyys hammashihnan (b) avulla kiristimellä (e).
  - Hammashihnan nivelen tulisi olla keskellä pehmusteiden välissä.
  - Vedä hammashihnaa ulos vain sen verran, että kunkin soljen (c) takana on vielä kaksi hammasta.
  - Tarranauha (g) voidaan irrottaa ja pehmuste avata säätöä varten (huomioitava vain vyöllä, jossa on peitetty kiristin)
3. Kiinnitä sitten rei'itetyt hihnat/turvavyöt (f) pyörätuolin kehysputkeen
4. Kiristä hammashihna (b) tasaisesti molemmilta puolilta ja niin pitkälle, että reiden ja pehmusteen välillä on vielä tilaa kämmenelle.
5. Hammashihnan päät voidaan tarvittaessa leikata puoliympyrän muotoon. Tasoita hammashihnan päät tarvittaessa. - Loukkaantumiswaara!
6. Tarkista, että hammashihna on kiinnitetty ja lukittu tiukasti!



## Käyttöohjeet



## Turvallisuusohjeet

Vakaasta rakenteesta huolimatta komponentit, kuten rei'itetyt hihnat, turvavyöt, hammashihnat ja pehmuste kuluvat jonkin verran. Siksi **PELVI.LOC**<sup>®</sup> on suositeltavaa tarkistaa perusteellisesti kolmen kuukauden välein. Varmista, että nitit ja ruuviliitännät ovat kiinni kunnolla!

- Varmistu ennen käyttöä siitä, että tuote on käyttökelpoinen ja että istuvuus on hyvä - onnettomuusvaara!
- Älä korjaa tai liimaa vaurioituneita osia, kuten rei'itettyjä hihnoja/vyöhihnoja (f), hammashihnaa (b) tai liivin (f) pehmusteita (a) ja aseta niitä takaisin paikalleen - onnettomuusvaara!
- Älä istu pehmusteiden päälle - kiristimien (c) takia voi syntyä painepisteitä!
- Älä nosta pyörätuolia **PELVI.LOC**<sup>®</sup>:n yläpuolelle - onnettomuusvaara!
- Varmista, etteivät kädet pääse rei'itetyn vyön ja rungon tai istuinputken väliin - murtumisriski!

## Käyttörajoitukset / ei-toivotut sivuvaikutukset

- Älä käytä **PELVI.LOC:ia**<sup>®</sup> jos pehmusteen alueella on painepisteitä, haavoja tai muita ei-parantuneita vammoja - loukkaantumiswaara!
- Älä käytä **PELVI.LOC:ia**<sup>®</sup> luukadon, synnyynnäisen sidekudossairauden tai vakavien verenkiertohäiriöiden yhteydessä - loukkaantumisriski!
- Varmista puhdistuksen jälkeen, että **PELVI.LOC**<sup>®</sup> toimii oikein!
- Vaurioitunut **PELVI.LOC**<sup>®</sup> tulisi vaihtaa välittömästi - onnettomuusriski!



### Huomio:

- **PELVI.LOC**<sup>®</sup> ei ole osa pyörätuolin ja/tai matkustajien passiivista turvajärjestelmää, kun sitä kuljetetaan vammaisille tarkoitetussa kuljetusvälineessä.
- Valmistajaa tai jakelijaa ei voida laittaa tuotevastuun merkityksessä vastuuseen vahingoista tai riskeistä, jotka aiheutuvat lasten jättämisestä vaille valvontaa tuotteen läheisyydessä!

### Käyttö

1. **PELVI.LOC**<sup>®</sup>:n käyttöä varten pehmusteet (a) asetetaan lantion alueelle/lantion ihon taittokohdassa



**Huomio:** Varmista, että pehmusteen alla ei ole esineitä! Tällä tavoin vältetään tuskallisilta painepisteiltä.

2. Ohjaa sitten hammashihna (b) vastaavan kiristimen läpi. Käytä tätä varten vastaavaa kiristintä (e).
  3. Kiristä sen jälkeen hammashihna (b) tasaisesti molemmilta puolilta ja niin pitkälle, että reiden ja pehmusteen välillä on vielä tilaa kämmenelle.
  4. Varmista, että kiristimien soljet (c) lukittuvat kiinni hammashihnaan!
- Suorita vetokoe!

Jos kohdistusjärjestelmä löystyy ei-toivotusti **PELVI.LOC:in**<sup>®</sup> käytön aikana, tämä voidaan korjata kiristämällä se uudelleen.

Käytä **PELVI.LOC**<sup>®</sup>:in avaamiseen solki (c) ja vedä hammashihna ulos.

- Varmista, että pehmusteet eivät pääse vetopyörän pintojen väliin!

### Puhdistus ja desinfiointi

- Sopii pesukoneeseen 40 asteen lämpötilaan saakka.
- Kemoterminen desinfiointi on mahdollista kun pesusykliin lisätään ELTRA 40:tä
- Älä linkoa
- Ei sovellu kuivausrumpuun

### Huolto

**PELVI.LOC**<sup>®</sup> on tarkastettava säännöllisesti vaurioiden varalta ja moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.

### Korjaukset

Vaihda viallinen **PELVI.LOC**<sup>®</sup> välittömästi.

## Hävittäminen

- Laitepakkaukset voidaan kierrättää.
- Metalliosat voidaan kierrättää.
- Muoviosat voidaan kierrättää muovinkierrätyksessä.
- Hävittäminen on suoritettava kunkin valtion kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
- Kysy kunnalta/kaupungilta, missä on lähin jätteidenkäsittely-yritys.



## Tekniset tiedot

	<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>
<b>Istuimen leveys (cm)</b>	16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46
<b>Pehmusteen koko (cm)</b>	17,5 x 9	20 x 11	23 x 13	25,5 x 14
<b>Paino (g)</b>	220	220	280	280
<b>Oletusmurtopiste (noin kg kohdalla)</b>	60	60	80	80

<b>Hammashihna koko XS - S</b>	1,9 x 0,2 x 17,0 cm
<b>Hammashihnan koko M - L</b>	2,4 x 0,2 x 17,0 cm

Tuote on  
lateksiton



## Takuu

Myönämme tälle tuotteelle takuun lakisääteisten määräysten mukaisesti. Tämä koskee materiaali- ja käsittelyvirheitä. Tähän eivät sisälly kuluvat osat tai osat/moduulit, jotka ovat normaalin kulumisen alaisia eivätkä liiallisesta käytöstä, "epäasianmukaisesta käytöstä", liiallisesta voiman käytöstä aiheutuneista vaurioista tai luvattomista muutoksista/korjauksista aiheutuvat vauriot. Takuuvaatimustapauksissa ota yhteyttä erikoisliikkeeseen, jolta ostit tämän tuotteen. Tuotevastuun vuoksi korjaus-, huolto- ja kunnossapitotöitä saavat suorittaa vain valtuutetut erikoisliikkeet, joiden täytyy käyttää alkuperäisiä varaosia



### Valmistaja:

A2J GmbH  
Am Fuchsberg 13  
D-87452 Altusried  
Puhelin: +49 (08373) 987269  
Faksi: +49 (08373) 987276  
Sähköposti: [info@a2j-intl.com](mailto:info@a2j-intl.com)  
Internet: [www.a2j-intl.com](http://www.a2j-intl.com)



Tämä tuote täyttää lääkinnällisiä laitteita koskevan EY:n direktiivin 93/42/ETY:n perusvaatimukset