



## **PELVI.LOC® PL-UGR - XXS, - XS, - S, - M, - L, - XL**



Lue tämän tuotteen kokoonpano- ja käyttöohjeet ennen ensimmäistä käyttökertaa varmistuaksesi käytön turvallisuudesta.



### **Soveltamisala**

**PELVI.LOC®** -säärivyö - Reversed - PL-UGR palvelee liikuntarajoitteisia ihmisiä etenkin heidän lantionsa ja reisiensä sijoittamiseksi pyörätuoleihin ja aktiivisiin pyörätuoleihin ja heidän eteenpäin liukumisensa estämiseksi.

### **Potilasryhmä, jolle tuote on tarkoitettu:**

- Lapset, nuoret ja aikuiset
- Sukupuoli: naiset ja miehet

### **Vastaanottotarkastus**

Poista tuote pakkauksesta kokonaan ja tarkista, että lähetys ei ole puutteellinen ja että siinä ei ole kuljetusvaurioita. Jos huomaat, että lähetyksessä on odottamattomia puutteita, niin:

1. Tee heti valitus kuljettajalle
2. Kirjaa vahinko/virhe ylös
3. Ilmoita meille tai kauppiaille heti

## Toimituksen sisältö

- 1) 1 x **PELVI.LOC**<sup>®</sup> PL-UGR -XXS, -XS, -S, -M, -L, -XL esiasennettu
- 2) 1 x tietoa kokoonpano- ja käyttöohjeiden lataamisesta verkosta

## Lääketieteellisten laitteiden yhdistelmä

Sopii apuvälineille, jotka on tarkoitettu lantion vetovyön käyttämiseen

## Asennus



Asennus täytyy suorittaa asiantuntevan henkilön toimesta

1. Laita kukin pehmuste (a) säären alueelle (sääriluun tai pohjeluun pään alapuolella). - Hammashihna (b) on ulkopuolella.
  - **PELVI.LOC**<sup>®</sup> -logo pehmusteessa näkyy siten etupuolella!
2. Aseta pehmusteiden välinen etäisyys rei'itetyllä hihnalla (f).
3. Kiinnitä hammashihna (b) pyörätuolin kehysputkeen
4. Kiristä hammashihna (b) tasaisesti molemmilta puolilta
5. Hammashihnan päät voidaan tarvittaessa leikata puoliympyrän muotoon. Tasoita hammashihnan päät tarvittaessa. - Loukkaantumiswaara!
6. Tarkista, että hammashihna on kiinnitetty ja lukittu tiukasti molemmilta puolilta!



## Käyttöohjeet



## Turvallisuusohjeet

Vakaasta rakenteesta huolimatta komponentit, kuten rei'itetyt hihnat, turvavyöt, hammashihnat ja pehmuste kuluvat jonkin verran. Siksi **PELVI.LOC**<sup>®</sup> on suositeltavaa tarkistaa perusteellisesti kolmen kuukauden välein. Varmista, että niitit ja ruuviliitännät ovat kiinni kunnolla!

- Varmistu ennen käyttöä siitä, että tuote on käyttökelpoinen ja että istuvuus on hyvä - onnettomusvaara!
- Älä korjaa tai liimaa vaurioituneita osia, kuten rei'itettyjä hihnoja/turvavyötä (f), hammashihnaa (b) tai liivin (f) pehmusteita (a) ja aseta niitä takaisin paikalleen - onnettomusvaara!
- Älä istu pehmusteiden päälle – tämä voi saada aikaan painepisteitä!
- Älä nosta pyörätuolia **PELVI.LOC:in**<sup>®</sup> yläpuolelle - onnettomusvaara!
- Varmista, etteivät kädet pääse rei'itetyn vyön ja rungon tai istuinputken väliin - murtumisriski!

## Käyttörajoitukset / ei-toivotut sivuvaikutukset

- Älä käytä **PELVI.LOC:ia**<sup>®</sup> jos pehmusteen alueella on painepisteitä, haavoja tai muita ei-parantuneita vammoja - loukkaantumiswaara!
- Älä käytä **PELVI.LOC:ia**<sup>®</sup> luukadon, synnyynnäisen sidekudossairauden tai vakavien verenkiertohäiriöiden yhteydessä - loukkaantumisriski!
- Varmista puhdistuksen jälkeen, että **PELVI.LOC**<sup>®</sup> toimii oikein!
- Vaurioitunut **PELVI.LOC**<sup>®</sup> tulisi vaihtaa välittömästi - onnettomusriski!



### Huomio:

- **PELVI.LOC**<sup>®</sup> ei ole osa pyörätuolin ja/tai matkustajien passiivista turvajärjestelmää, kun sitä kuljetetaan vammaisille tarkoitettussa kuljetusvälineessä.
- Valmistajaa tai jakelijaa ei voida laittaa tuotevastuun merkityksessä vastuuseen vahingoista tai riskeistä, jotka aiheutuvat lasten jättämisestä vaille valvontaa tuotteen läheisyydessä!

### Käyttö

1. **PELVI.LOC:ia**<sup>®</sup> käytettäessä pehmusteet (a) asetetaan reisien alueelle.



**Huomio:** Varmista, että pehmusteen alla ei ole esineitä! Tällä tavoin vältetään tuskallisilta painepisteiltä.

2. Ohjaa sitten hammastettu hihna (b) vastaavan soljen läpi. Käytä tätä varten vastaavaa solkea.
  3. Kiristä hammashihna (b) sen jälkeen niin pitkälle, että reiden ja pehmusteen välissä on vielä tilaa kämmenelle.
  4. Varmista, että kiristimien soljet lukittuvat kiinni hammashihnaan!
- Suorita vetokoe!

Käytä **PELVI.LOC:in**<sup>®</sup> avaamiseen solkea ja vedä hammashihna ulos.

- Varmista, että pehmusteet eivät pääse vetopyörän pintojen väliin!

### Puhdistus ja desinfiointi

- Sopii pesukoneeseen 40 asteen lämpötilaan saakka.
- Kemoterminen desinfiointi on mahdollista kun pesusykliin lisätään ELTRA 40:tä
- Älä linkoa
- Ei sovellu kuivausrumpuun

### Huolto

**PELVI.LOC**<sup>®</sup> on tarkastettava säännöllisesti vaurioiden varalta ja moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.

### Korjaukset

Vaihda viallinen **PELVI.LOC**<sup>®</sup> välittömästi.

### Hävittäminen

- Laitepakkaukset voidaan kierrättää.
- Metalliosat voidaan kierrättää.
- Muoviosat voidaan kierrättää muovinkierrätyksessä.
- Hävittäminen on suoritettava kunkin valtion kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
- Kysy kunnalta/kaupungilta, missä on lähin jätteidenkäsittely-yritys.



## Tekniset tiedot

	XXS	XS	S	M	L	XL
<b>Polven leveys (cm)</b>	12 - 20	16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46	44 - 52
<b>Pehmusteen koko (cm)</b>	11,5 x 7,5	20 x 7	20 x 7	25,5 x 8	25,5 x 8,5	28,5 x 9
<b>Paino (g)</b>	200	220	220	280	280	280
<b>Oletusmurtopiste (noin kg kohdalla)</b>	60	60	60	80	80	80

<b>Hammashihna koko XXS- XS - S</b>	1,9 x 0,2 x 19,5 cm
<b>Hammashihnan koko M - L - XL</b>	2,4 x 0,2 x 22,5 cm

Tuote on lateksiton



## Tärkeä vihje: Polven leveys, ei istuimen leveys!

### Takuu

Myönnämme tälle tuotteelle takuun lakisääteisten määräysten mukaisesti. Tämä koskee materiaali- ja käsittelyvirheitä. Tähän eivät sisälly kuluvat osat tai osat/moduulit, jotka ovat normaalin kulumisen alaisia eivätkä liiallisesta käytöstä, "epäasianmukaisesta käytöstä" tai liiallisesta voiman käytöstä aiheutuneet vauriot tai luvattomista muutoksista/korjauksista aiheutuneet vauriot. Takuuvaatimustapauksissa ota yhteyttä erikoisliikkeeseen, jolta ostit tämän tuotteen. Tuotevastuun vuoksi korjaus-, huolto- ja kunnossapitotöitä saavat suorittaa vain valtuutetut erikoisliikkeet, joiden täytyy käyttää alkuperäisiä varaosia



### Valmistaja:

A2J GmbH  
Am Fuchsberg 13  
D-87452 Altusried  
Puhelin: +49 (08373) 987269  
Faksi: +49 (08373) 987276  
Sähköposti: [info@a2j-intl.com](mailto:info@a2j-intl.com)  
Internet: [www.a2j-intl.com](http://www.a2j-intl.com)



Tämä tuote täyttää lääkinnällisiä laitteita koskevan EY:n direktiivin 93/42/ETY perusvaatimukset

Tilanne 01.05.2019

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään