




PELVI.LOC® PL-2DA - S - M - L

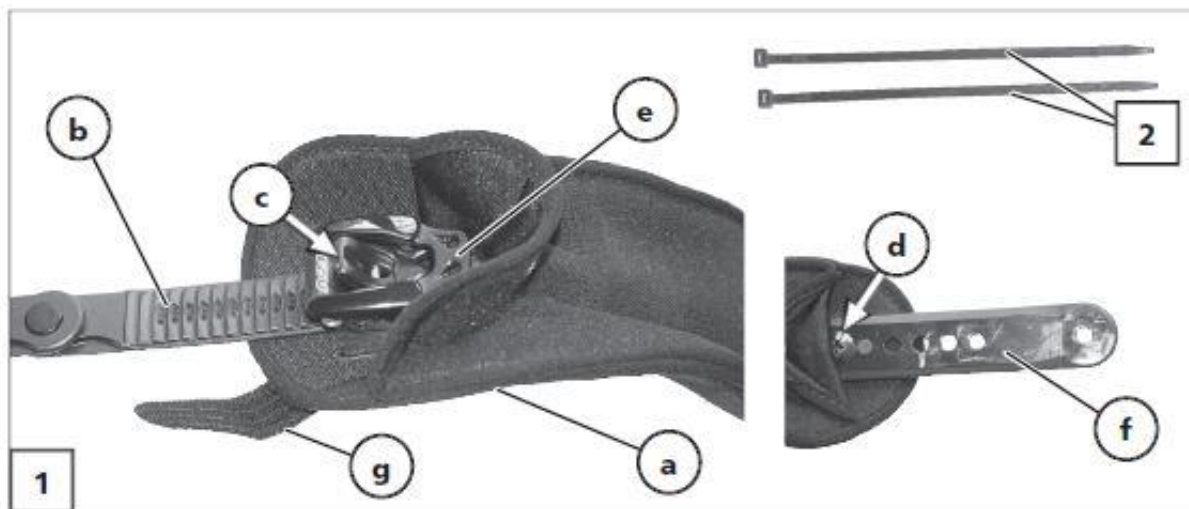

Lue tämän tuotteen kokoonpano- ja käyttöohjeet ennen ensimmäistä käyttöä varmistuaksesi käytön turvallisuudesta.



Soveltamisala

PELVI.LOC® PL-2DA palvelee liikuntarajoitteisia ihmisiä etenkin heidän reisiensä sijoittamiseksi pyörätuoleihin ja aktiivisiin pyörätuoleihin, estäen heitä liukumasta eteenpäin.

Potilasryhmä, jolle tuote on tarkoitettu:

- Nuoret ja aikuiset
- Sukupuoli: naiset ja miehet

Vastaanottotarkastus

Poista tuote kokonaan pakkauksesta ja tarkista lähetyksen täydellisyys ja kuljetusvauriot. Jos huomaat, että lähetyksessä on odottamattomia puutteita, niin:

1. Tee heti valitus kuljettajalle
2. Kirjaa vahinko/virhe ylös
3. Ilmoita meille tai kauppiaille heti

Toimituksen sisältö

- 1) 1 x **PELVI.LOC®** PL-2DA -S, -M, -L esiasennettu
- 2) 2 x nippuside 7,8 mm
- 3) 1 x tietoa kokoonpano- ja käyttöohjeiden lataamisesta verkosta

Lääketieteellisten laitteiden yhdistelmä

Sopii apuvälineille, jotka on tarkoitettu lantion vetovyön käyttämiseen

Asennus



Asennus täytyy suorittaa asiantuntevan henkilön toimesta

1. Aseta pehmusteet (a) reiden alueelle. - Hammashihna (b) on päällä.
 - Pehmusteen logo näkyy sitten etupuolella!
2. Säädä pehmusteiden etäisyys hammashihnan (b) avulla kiristimellä (e).
 - Hammashihnan nivelen tulisi olla keskellä pehmusteiden välissä.
 - Vedä hammashihnaa ulos vain sen verran, että kunkin soljen (c) takana on vielä kaksi hammasta.
 - Tarranauha voidaan irrottaa ja pehmuste avata säätöä varten (huomioitava vain vyöllä, jossa on peitetty kiristin)
3. Kiinnitä sitten rei'itetyt hihnat (f) pyörätuolin kehysputkeen
4. Kiristä hammashihna (b) tasaisesti molemmilta puolilta ja niin pitkälle, että reiden ja pehmusteen välillä on vielä tilaa kämmenelle.
5. Hammashihnan päät voidaan tarvittaessa leikata puoliympyrän muotoon. Tasoita hammashihnan päät tarvittaessa. - Loukkaantumiswaara!
6. Tarkista, että hammashihna on kiinnitetty ja lukittu tiukasti!



Käyttöohjeet



Turvallisuusohjeet

Vakaasta rakenteesta huolimatta komponentit, kuten rei'itetyt hihnat, hammashihna ja pehmuste kuluvat jonkin verran. Siksi **PELVI.LOC®** on suositeltavaa tarkistaa perusteellisesti kolmen kuukauden välein. Varmista, että nitit ja ruuviliitännät ovat kiinni kunnolla!

- Varmistu ennen käyttöä siitä, että tuote on käyttökelpoinen ja että istuvuus on hyvä - onnettomuusriski!
- Älä korjaa tai liimaa vaurioituneita osia, kuten rei'itettyjä hihnoja (f), hammashihnaa (b) tai liivin (f) pehmusteita (a) ja aseta niitä takaisin paikalleen - onnettomuusriski!
- Älä istu pehmusteiden päälle - kiristimien (c) takia voi syntyä painepisteitä!
- Älä nosta pyörätuolia **PELVI.LOC:n®** yläpuolelle - onnettomuusriski!
- Varmista, etteivät kädet pääse rei'itetyn vyön ja rungon tai istuinputken väliin - murtumisriski!

Käyttörajoitukset / ei-toivotut sivuvaikutukset

- Älä käytä **PELVI.LOC:ia®** jos pehmusteen alueella on painepisteitä, haavoja tai muita ei-parantuneita vammoja - loukkaantumiswaara!
- Älä käytä **PELVI.LOC:ia®** luukadon, synnytyksen sidekudossairauden tai vakavien verenkiertohäiriöiden yhteydessä - loukkaantumiswaara!
- Varmista puhdistuksen jälkeen, että **PELVI.LOC®** toimii oikein!
- Vaurioitunut **PELVI.LOC®** tulee vaihtaa välittömästi - onnettomuusriski!



Huomio:

- **PELVI.LOC®** ei ole osa pyörätuolin ja/tai matkustajien passiivista turvajärjestelmää, kun sitä kuljetetaan vammaisille tarkoitetussa kuljetusvälineessä.
- Valmistajaa tai jakelijaa ei voida laittaa tuotevastuun merkityksessä vastuuseen vahingoista tai riskeistä, jotka aiheutuvat lasten jättämisestä vaille valvontaa tuotteen läheisyydessä!

Käyttö

1. **PELVI.LOC:n®** käytettäessä pehmusteet (a) asetetaan reiteen



Huomio: Varmista, että pehmusteen alla ei ole esineitä! Tällä tavoin vältetään tuskallisilta painepisteiltä.

2. **Tärkeää:** älä laita lantion tai selkärangan kohdalla!
 3. Ohjaa sitten hammastettu hihna (b) vastaavan soljen läpi. Käytä tätä varten vastaavaa solkea (e).
 4. Kiristä sen jälkeen hammashihna (b) tasaisesti molemmilta puolilta ja niin pitkälle, että reiden ja pehmusteen välillä on vielä tilaa kämmenelle.
 5. Varmista, että kiristimien soljet (c) lukittuvat kiinni hammashihnaan!
- Suorita vetokoe!

Jos kohdistusjärjestelmä löystyy ei-toivotusti **PELVI.LOC:in®** käytön aikana, tämä voidaan korjata kiristämällä se uudelleen.

Käytä **PELVI.LOC:n®** avaamiseen solki (c) ja vedä hammashihna ulos.

- Varmista, että pehmusteet eivät pääse vetopyörän pintojen väliin!

Puhdistus ja desinfiointi

- Sopii pesukoneeseen 40 asteen lämpötilaan saakka.
- Kemoterminen desinfiointi on mahdollista kun pesusykliin lisätään ELTRA 40:tä
- Älä linkoa
- Ei sovellu kuivausrumpuun

Huolto

PELVI.LOC® on tarkastettava säännöllisesti vaurioiden varalta ja kunnollisen toiminnan varmistamiseksi.

Korjaukset

Vaihda viallinen **PELVI.LOC®** välittömästi.

Hävittäminen


- Laitepakkaukset voidaan kierrättää.
- Metalliosat voidaan kierrättää.
- Muoviosat voidaan kierrättää muovikierrätyksessä.
- Hävittäminen on suoritettava kunkin valtion kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
- Kysy kunnalta/kaupungilta, missä on lähin jätteidenkäsittely-yritys.

Tekniset tiedot

	XXXS Bambino	XXS	XS	S	M	L	XL
Istuimen leveys (cm)				20 - 32	30 - 40	36 - 46	
Pehmusteen koko (cm)				19 x 11	23 x 12	28 x 14	
Paino (g)				220	280	280	
Oletusmurtopiste (noin kg kohdalla)				60	80	80	

Istuimen leveys (cm)		Tuote on lateksiton   LIEFERMANGROCECCE LIEFERMANGROCECCE LIEFERMANGROCECCE
Pehmusteen koko (cm)	2,4 x 0,2 x 17,0 cm	
Paino (g)	2,4 x 0,2 x 17,0 cm	
Oletusmurtopiste (noin kg kohdalla)		
Istuimen leveys (cm)		
Pehmusteen koko (cm)	B-24-FLAT-LO-BL	
Paino (g)	B-24-ERGO-BL	

Varastointi ja kuljetusolosuhteet

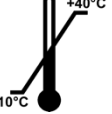	Lämpötila-alue pitkäaikaiseen varastointiin -10°C - +40°C. Materiaali sietää hyvin lyhytaikaiset lämpötilahuiput, esim. kuljetuksen aikana -20°C - +60°C, eivätkä ne vaikuta tuotteen turvallisuuteen ja suorituskykyyn.
	Suojaa kosteudelta varastoinnin ja kuljetuksen aikana

Takuu

Myönnämme tälle tuotteelle takuun lakisääteisten määräysten mukaisesti. Tämä takuu käsittää materiaali- ja valmistusvirheet. Tähän eivät sisälly kuluvat osat ja osat/kokoonpanot, jotka ovat normaalin kulumisen alaisia, eivätkä vauriot, jotka aiheutuvat liiallisesta rasituksesta, "epäasianmukaisesta käytöstä", liiallisesta voiman käytöstä tai luvattomista muutoksista/korjauksista. Takuuvaatimustapauksissa ota yhteyttä liikkeeseen, jolta ostit tämän tuotteen. Tuotevastuuseen liittyvistä syistä vain valtuutetut erikoisliikkeet saavat suorittaa tuotteelle korjaus-, huolto- ja kunnostustöitä käyttäen alkuperäisiä varaosia.



Valmistaja:

A2J GmbH

Am Fuchsberg 13

D-87452 Altusried

Puh.: +49 (08373) 987269

Faksi: +49 (08373) 987276

Sähköposti: info@a2j-intl.com

Internet: www.a2j-intl.com



Tämä tuote täyttää lääkinnällisiä laitteita koskevan EU-asetuksen 2017/745 (Medical Device Regulation, MDR) perusvaatimukset

Tilanne 01.01.2025

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään