



PELVI.LOC® PL-3DSRR - XS - S - M - L



Lue tämän tuotteen kokoonpano- ja käyttöohjeet ennen ensimmäistä käyttökertaa varmistuaksesi käytön turvallisuudesta.



Soveltamisala

PELVI.LOC® PL-3DSRR palvelee liikuntarajoitteisia ihmisiä etenkin heidän lantionsa sijoittamiseksi pyörätuoleihin ja aktiivisiin pyörätuoleihin, estäen heitä liukumasta eteenpäin.

Potilasryhmä, jolle tuote on tarkoitettu:

- Lapset, nuoret ja aikuiset
- Sukupuoli: naiset ja miehet

Vastaanottotarkastus

Poista tuote pakkauksesta kokonaan ja tarkista, että lähetys ei ole puutteellinen ja että siinä ei ole kuljetusvaurioita. Jos huomaat, että lähetyksessä on odottamattomia puutteita, niin:

1. Tee heti valitus kuljettajalle
2. Kirjaa vahinko/virhe ylös
3. Ilmoita meille tai kauppiaalle heti

Toimituksen sisältö

- 1) 1 x **PELVI.LOC®** PL-3DSRR - XS, -S, -M, -L ei esiasennettu
- 2) 1 x tietoa kokoonpano- ja käyttöohjeiden lataamisesta verkosta

Asennus



Asennus täytyy suorittaa asiantuntevan henkilön toimesta

1. Aseta pehmusteet (a) lantion alueella/lantion ihon taittokohdassa. - kiristin (e) kiinnitetään pyörätuolin kehysputkeen. (Huomaa asennusohjeet)
2. Hammashihna (b) työnnetään pyörätuoliin kiinnitettyyn solkiin tai kiristimeen (e).
 - Pehmusteen logo näkyy sitten etupuoolella!
3. Aseta pehmusteiden välinen etäisyys rei'itetyllä hihnalla (d). Lantion sisään vedettävä hihna kiristetään aktivoimalla kiristintä (e).
 - Rei'itetyn hihnan nivelen tulisi olla keskellä pehmusteiden välissä.
 - Vedä hammashihnaa ulos vain sen verran, että kunkin kiristimen (e) takana on vielä kaksi hammasta.
 - Tarranauha (g) voidaan irrottaa ja pehmuste avata säätöä varten (huomioitava vain vyöllä, jossa on peitetty kiristin)
4. Kiinnitä sitten hammashihna (b) pyörätuolin kehysputkeen
5. Kiristä hammashihna (b) tasaisesti molemmilta puolilta ja niin pitkälle, että reiden ja pehmusteen välissä on vielä tilaa kämmenelle.
6. Hammashihnan päät voidaan tarvittaessa leikata puolipyörän muotoon. Tasoita hammashihnan päät tarvittaessa. - Loukkaantumisvaara!
7. Tarkista, että hammashihna on kiinnitetty ja lukittu tiukasti!



Käyttöohjeet



Turvallisuusohjeet

Vakaasta rakenteesta huolimatta komponentit, kuten rei'itetyt hihnat, turvavyöt, hammashihnat ja pehmuste kuluvat jonkin verran. Siksi **PELVI.LOC®** on suositeltavaa tarkistaa perusteellisesti kolmen kuukauden välein. Varmista, että nitit ja ruuviliitännät ovat kiinni kunnolla!

- Varmistu ennen käyttöä siitä, että tuote on käyttökelpoinen ja että istuvuus on hyvä - onnettomuusvaara!
- Älä korjaa tai liimaa vaurioituneita osia, kuten rei'itettyjä hihnoja/vyöhihnoja (d), hammashihnaa (b) tai liivin (f) pehmusteita (a) ja aseta niitä takaisin paikalleen - onnettomuusvaara!
- Älä istu pehmusteiden päälle - erityisesti kiristimien (e) takia voi syntyä painepisteitä!
- Älä nosta pyörätuolia **PELVI.LOC:in®** yläpuolelle - onnettomuusvaara!
- Varmista, etteivät kädet pääse rei'itetyn vyön ja rungon tai istuinputken väliin - murtumisriski!

Käyttörajoitukset / ei-toivotut sivuvaikutukset

- Älä käytä **PELVI.LOC:ia®** jos pehmusteen alueella on painepisteitä, haavoja tai muita ei-parantuneita vammoja - loukkaantumisvaara!
- Älä käytä **PELVI.LOC:ia®** luukadon, synnyännäisen sidekudossairauden tai vakavien verenkiertohäiriöiden yhteydessä - loukkaantumisriski!
- Varmista puhdistuksen jälkeen, että **PELVI.LOC®** toimii oikein!
- Vaurioitunut **PELVI.LOC®** tulisi vaihtaa välittömästi - onnettomuusriski!



Huomio:

- **PELVI.LOC[®]** ei ole osa pyörätuolin ja/tai matkustajien passiivista turvajärjestelmää, kun sitä kuljetetaan vammaisille tarkoitetussa kuljetusvälineessä.
- Valmistajaa tai jakelijaa ei voida laittaa tuotevastuun merkityksessä vastuuseen vahingoista tai riskeistä, jotka aiheutuvat lasten jättämisestä vaille valvontaa tuotteen läheisyydessä!

Käyttö

1. **PELVI.LOC:ia[®]** käytettäessä pehmusteet (a) asetetaan lantion ihon taittokohdassa.



Huomio: Varmista, että pehmusteen alla ei ole esineitä! Tällä tavoin vältetään tuskallisilta painepisteiltä.

2. **Tärkeää:** älä laita lantion tai selkärangan kohdalle!
 3. Ohjaa sitten hammashihna (b) vastaavan soljen läpi. Käytä tätä varten vastaavaa kiristintä (e).
 4. Kiristä sen jälkeen hammashihna (b) tasaisesti molemmilta puolilta ja niin pitkälle, että reiden ja pehmusteen välissä on vielä tilaa kämmenelle.
 5. Varmista, että kiristimen soljet (e) lukittuvat kiinni hammashihnaan!
- Suorita vetokoe!

Jos kohdistusjärjestelmä löystyy ei-toivotusti **PELVI.LOC:in[®]** käytön aikana, tämä voidaan korjata kiristämällä se uudelleen.

Käytä **PELVI.LOC:in[®]** avaamiseen kiristimen solki (e) ja vedä hammashihna ulos.

- Varmista, että pehmusteet eivät pääse vetopyörän pintojen väliin!

Puhdistus ja desinfiointi

- Sopii pesukoneeseen 40 asteen lämpötilaan saakka.
- Kemoterminen desinfiointi on mahdollista kun pesusykliin lisätään ELTRA 40:tä
- Älä linkoa
- Ei sovellu kuivausrumpuun

Huolto

PELVI.LOC[®] on tarkastettava säännöllisesti vaurioiden varalta ja moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.

Korjaukset

Vaihda viallinen **PELVI.LOC[®]** välittömästi.

Hävittäminen

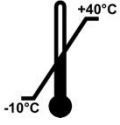
- Laitepakkaukset voidaan kierrättää.
- Metalliosat voidaan kierrättää.
- Muoviosat voidaan kierrättää muovinkierrätyksessä.
- Hävittäminen on suoritettava kunkin valtion kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
- Kysy kunnalta/kaupungilta, missä on lähin jätteidenkäsittely-yritys.

Tekniset tiedot

	XXXS	XXS	XS	S	M	L	XL
Istuimen leveys (cm)		12 - 20	16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46	44 - 52
Pehmusteen koko (cm)		11 x 7	20 x 7	20 x 7	25,5 x 8	25,5 x 8,5	28,5 x 9
Paino (g)		220	220	220	280	280	280
Oletusmurtopiste (noin kg kohdalla)		40	60	60	80	80	80

Istuimen leveys (cm)	1,9 x 0,2 x 40 cm	Tuote on lateksiton  
Pehmusteen koko (cm)	1,9 x 0,2 x 40 cm	
Paino (g)	2,4 x 0,2 x 40 cm	
Oletusmurtopiste (noin kg kohdalla)		
Istuimen leveys (cm)		
Pehmusteen koko (cm)	B-24-STAR-BL	
Paino (g)	B-24-STAR-BL	

Varastointi- ja kuljetusolosuhteet

	Pitkäkestoisessa varastoinnissa lämpötilan tulee olla -10 °C – +40 °C. Materiaali kestää erinomaisesti lyhytaikaisia lämpötilapiikkejä (esimerkiksi kuljetuksen aikana) alueella -20 °C – +60 °C, eivätkä ne vaikuta tuotteen turvallisuuteen ja suorituskykyyn.
	Suojattava kosteudelta varastoinnin ja kuljetuksen aikana



Tärkeä vihje: Polven leveys, ei istuimen leveys!

Takuu

Myönnämme tälle tuotteelle takuun lakisääteisten määräysten mukaisesti. Tämä takuu käsittää materiaali- ja valmistusvirheet. Tähän eivät sisälly kuluvat osat ja osat/kokoonpanot, jotka ovat normaalin kulumisen alaisia, eivätkä vauriot, jotka aiheutuvat liiallisesta rasituksesta, "epäasianmukaisesta käytöstä", liiallisesta voiman käytöstä tai luvattomista muutoksista/korjauksista. Takuuvaatimustapauksissa ota yhteyttä liikkeeseen, jolta ostit tämän tuotteen. Tuotevastuuseen liittyvistä syistä vain valtuutetut erikoisliikkeet saavat suorittaa tuotteelle korjaus-, huolto- ja kunnostustöitä käyttäen alkuperäisiä varaosia.



Valmistaja:

A2J GmbH

Am Fuchsberg 13

D-87452 Altusried

Puh.: +49 (08373) 987269

Faksi: +49 (08373) 987276

Sähköposti: info@a2j-intl.com

Internet: www.a2j-intl.com



Tämä tuote täyttää lääkinnällisiä laitteita koskevan EU-asetuksen 2017/745 (Medical Device Regulation, MDR) perusvaatimukset

Tilanne 01.01.2025

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään