




PELVI.LOC® PL-3DWP XXS - XS - S - M -L



Lue tämän tuotteen kokoonpano- ja käyttöohjeet ennen ensimmäistä käyttökertaa varmistuaksesi käytön turvallisuudesta.

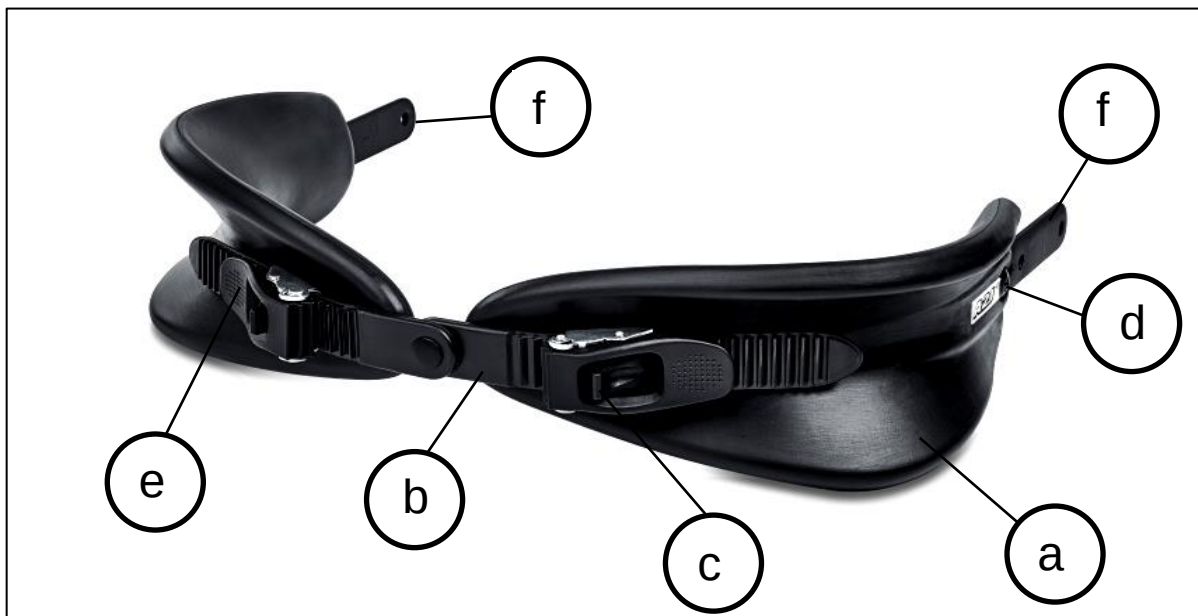

Soveltamisala

Tätä **PELVI.LOC®** PL-3DWP Waterproof tuotetta käytetään liikuntarajoitteisten ihmisten sijoittamiseen istuimelle ja lantion taaksepäin vetämiseen. Tällaisia istuimia ovat esim. suihkupyörätuoli, kylpyalusta, pyörätuoli, istuinkuori, terapiatuoli, kuntoutusvaunu tai urheiluvälineet.

Potilasryhmä, jolle tuote on tarkoitettu:

- Lapset, nuoret ja aikuiset
- Sukupuoli: naiset ja miehet

Vastaanottotarkastus

Poista tuote pakkauksesta kokonaan ja tarkista, että lähetys ei ole puutteellinen ja että siinä ei ole kuljetusvaurioita. Jos huomaat, että lähetyksessä on odottamattomia puutteita, niin:

1. Tee heti valitus kuljettajalle
2. Kirjaa vahinko/virhe ylös
3. Ilmoita meille tai kauppiaille heti

Toimituksen sisältö

- 1) 1 x **PELVI.LOC®** PL-3DWP -XXS, -XS, -S, -M, -L esiasennettu
- 2) 1 x tietoa kokoonpano- ja käyttöohjeiden lataamisesta verkosta

Lääketieteellisten laitteiden yhdistelmä

Sopii apuvälineille, jotka on tarkoitettu lantion vetovyön käyttämiseen

Asennus



Asennus täytyy suorittaa asiantuntevan henkilön toimesta

1. Aseta pehmusteet (a) lantion alueella/lantion ihon taittokohdassa. - Hammashihna (b) on päällä.
 - Pehmusteen logo näkyy sitten vasemmalla puolella!
2. Sääda pehmusteiden etäisyys hammashihnan (b) avulla kiristimillä (e).
 - Hammashihnan nivelen tulisi olla keskellä pehmusteiden välissä.
 - Vedä hammashihnaa ulos vain sen verran, että kunkin soljen (c) takana on vielä kaksi hammasta.
- 3 Kiinnitä sitten rei'itetyt hihnat (f) pyörätuolin kehysputkeen
- 4 Kiristä hammashihna (b) tasaisesti molemmilta puolilta niin, että reiden ja pehmusteen välillä on vielä tilaa kämmenelle.
- 5 Hammashihnan päät voidaan tarvittaessa leikata puoliympyrän muotoon. Tasoita Lyhennetyn hammashihnan päät tarvittaessa. - Loukkaantumisvaara!
- 6 Tarkista, että hammashihna on kiinnitetty ja lukittu tiukasti!



Käyttöohjeet



Turvallisuusohjeet

Vakaasta rakenteesta huolimatta komponentit, kuten rei'itetyt hihnat, hammashihna ja pehmuste kuluvat jonkin verran. Siksi **PELVI.LOC®** PL-3DWP on suositeltavaa tarkistaa perusteellisesti kolmen kuukauden välein. Varmista, että niitit ja ruuviliitännät ovat kiinni kunnolla!

- Varmistu ennen käyttöä siitä, että tuote on käyttökelpoinen ja että istuvuus on hyvä - onnettomuusvaara!
- Älä korjaa tai liimaa vaurioituneita osia, kuten rei'itettyjä hihnoja (f), hammashihnaa (b) tai liivin (f) pehmusteita (a) ja aseta niitä takaisin paikalleen - onnettomuusvaara!
- Älä istu pehmusteiden päälle - kiristimien (c) takia voi syntyä painepisteitä!
- Älä nosta pyörätuolia **PELVI.LOC®** PL-3DWP:n yläpuolelle - onnettomuusvaara!
- Varmista, etteivät kädet pääse rei'itetyn hihnan ja rungon tai istuinputken väliin - murtumisriski!

Käyttörajoitukset / ei-toivotut sivuvaikutukset

- Älä käytä **PELVI.LOC®** PL-3DWP:tä, jos pehmusteen alueella on painepisteitä, haavoja tai muita ei-parantuneita vammoja - loukkaantumisvaara!
- Älä käytä **PELVI.LOC®** PL-3DWP:tä luukadon, synnynnäisen sidekudossairauden tai vakavien verenkiertohäiriöiden yhteydessä - loukkaantumisriski!
- Varmista puhdistuksen jälkeen, että **PELVI.LOC®** PL-3DWP toimii oikein!
- Vaurioitunut **PELVI.LOC®** PL-3DWP tulisi vaihtaa välittömästi - onnettomuusriski!



Huomio:

- **PELVI.LOC®** PL-3DWP ei ole osa pyörätuolin ja/tai matkustajien passiivista turvajärjestelmää, kun sitä kuljetetaan vammaisille tarkoitetussa kuljetusvälineessä.
- Valmistajaa tai jakelijaa ei voida laittaa tuotevastuun merkityksessä vastuuseen vahingoista tai riskeistä, jotka aiheutuvat lasten jättämisestä vaille valvontaa tuotteen läheisyydessä!

Käyttö

1. **PELVI.LOC®** PL-3DWP:tä käytettäessä pehmusteet (a) asetetaan reiteen



Huomio: Varmista, että pehmusteen alla ei ole esineitä! Tällä tavoin vältetään tuskallisilta painepisteiltä.

2. Ohjaa sitten hammastettu hihna (b) vastaavan soljen läpi. Käytä tätä varten vastaavaa kiristintä (e).
3. Kiristä hammashihna (b) sen jälkeen tasaisesti molemmilta puolilta ja niin pitkälle, että reiden ja pehmusteen välissä on vielä tilaa kämmenelle.
4. Varmista, että kiristimien soljet (c) lukittuvat kiinni hammashihnaan!
 - Suorita vetokoe!

Jos kohdistusjärjestelmä löystyy ei-toivotusti **PELVI.LOC®** PL-3DWP:n käytön aikana, tämä voidaan korjata kiristämällä se uudelleen.

Käytä **PELVI.LOC®** PL-3DWP:n **avaamiseen** solki (c) ja vedä hammashihna ulos.

- Varmista, että pehmusteet eivät pääse vetopyörän pintojen väliin!

Puhdistus ja desinfiointi

- Desinfiointi 70 % ISOPROPANOLILLA pyyhkimällä
- Älä käytä liuottimia, kuten asetonia tai lakkabensiiniä!

Huolto

PELVI.LOC® PL-3DWP on tarkastettava säännöllisesti vaurioiden varalta ja moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.

Korjaukset

Vaihda viallinen **PELVI.LOC®** välittömästi.

Hävittäminen


- Laitepakkaukset voidaan kierrättää.
- Metalliosat voidaan kierrättää.
- Muoviosat voidaan kierrättää muovinkierrätyksessä.
- Hävittäminen on suoritettava kunkin valtion kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
- Kysy kunnalta/kaupungilta, missä on lähin jätteidenkäsittely-yritys.

Tekniset tiedot

	XXXS	XXS	XS	S	M	L	XL
Istuimen leveys (cm)		12 - 20	16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46	44 - 52
Pehmusteen koko (cm)		14 x 6	18 x 7	21 x 8	25,5 x 8	26,5 x 8,5	28,5 x 9
Paino (g)		220	220	220	280	280	280
Oletusmurtopiste (noin kg kohdalla)		40	60	60	80	80	80

Hammashihna koko XXXS - XXS	1,9 x 0,2 x 17,0 cm	Tuote on lateksiton  
Hammashihna koko XS - S	1,9 x 0,2 x 17,0 cm	
Hammashihnan koko M - L - XL	2,4 x 0,2 x 17,0 cm	
Kiristin koko XXXS		
Kiristin koko XXS	B-19-ERGO-BL	
Kiristin koko XS - S	B-19-ERGO-BL	
Kiristin koko M - L - XL	B-24-ERGO-BL	

Varastointi- ja kuljetusolosuhteet

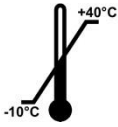	Pitkäkestoisessa varastoinnissa lämpötilan tulee olla -10 °C – +40 °C. Materiaali kestää erinomaisesti lyhytaikaisia lämpötilapiikkejä (esimerkiksi kuljetuksen aikana) alueella -20 °C – +60 °C, eivätkä ne vaikuta tuotteen turvallisuuteen ja suorituskykyyn.
	Suojattava kosteudelta varastoinnin ja kuljetuksen aikana

Takuu

Myönämme tälle tuotteelle takuun lakisääteisten määräysten mukaisesti. Tämä takuu käsittää materiaali- ja valmistusvirheet. Tähän eivät sisälly kuluvat osat ja osat/kokoonpanot, jotka ovat normaalin kulumisen alaisia, eivätkä vauriot, jotka aiheutuvat liiallisesta rasituksesta, "epäasianmukaisesta käytöstä", liiallisesta voiman käytöstä tai luvattomista muutoksista/korjauksista. Takuuvaatimustapauksissa ota yhteyttä liikkeeseen, jolta ostit tämän tuotteen. Tuotevastuuseen liittyvistä syistä vain valtuutetut erikoisliikkeet saavat suorittaa tuotteelle korjaus-, huolto- ja kunnostustöitä käyttäen alkuperäisiä varaosia.

**Valmistaja:**

A2J GmbH

Am Fuchsberg 13

D-87452 Altusried

Puh.: +49 (08373) 987269

Faksi: +49 (08373) 987276

Sähköposti: info@a2j-intl.com

Internet: www.a2j-intl.com

Tilanne 01.01.2025



Tämä tuote täyttää lääkinnällisiä laitteita koskevan EU-asetuksen 2017/745 (Medical Device Regulation, MDR) perusvaatimukset

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään