




PELVI.LOC® PL-ASY - S - M - L

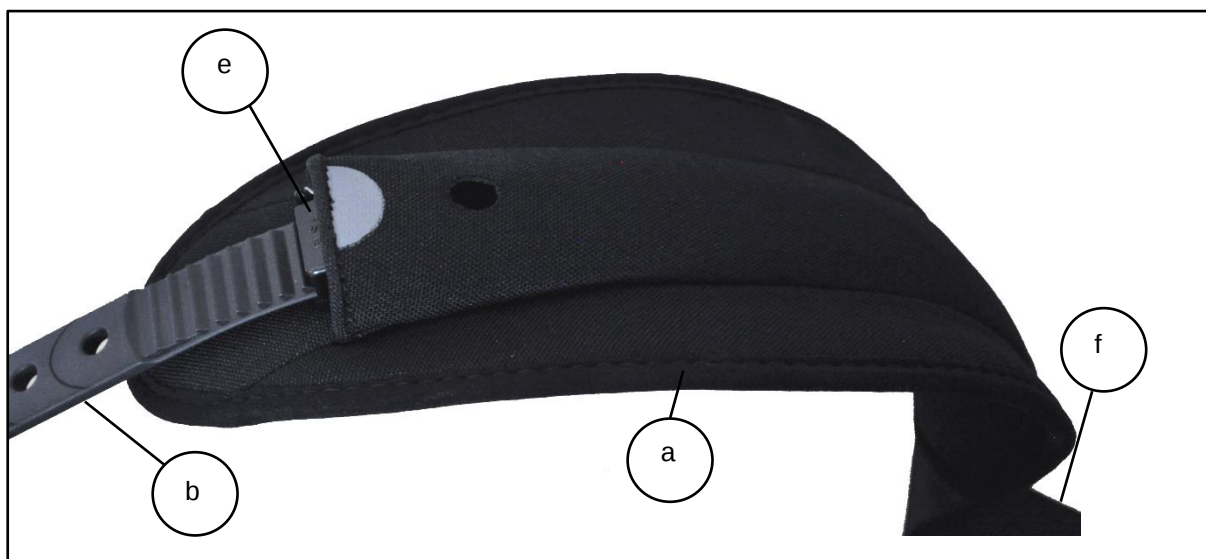

Lue tämän tuotteen kokoonpano- ja käyttöohjeet ennen ensimmäistä käyttökertaa varmistuaksesi käytön turvallisuudesta.



Soveltamisala

PELVI.LOC® PL-ASY palvelee liikuntarajoitteisia ihmisiä etenkin heidän epäsymmetrisen lantionsa sijoittamiseksi pyörätuoleihin ja aktiivisiin pyörätuoleihin ja heidän eteenpäin liukumisensa estämiseksi.

Potilasryhmä, jolle tuote on tarkoitettu:

- Lapset, nuoret ja aikuiset
- Sukupuoli: naiset ja miehet

Vastaanottotarkastus

Poista tuote pakkauksesta kokonaan ja tarkista, että lähetys ei ole puutteellinen ja että siinä ei ole kuljetusvaurioita. Jos huomaat, että lähetyksessä on odottamattomia puutteita, niin:

1. Tee heti valitus kuljettajalle
2. Kirjaa vahinko/virhe ylös
3. Ilmoita meille tai kauppiaille heti

Toimituksen sisältö

- 1) 1 x **PELVI.LOC®** PL-ASY -S, -M, -L esiasennettu
- 2) 2 x nippuside 7,8 mm
- 3) 2 x vyöhihnan silmukat
- 4) 2 x hammashihna 400 mm pitkä
- 5) 1 x tietoa kokoonpano- ja käyttöohjeiden lataamisesta verkosta

Lääketieteellisten laitteiden yhdistelmä

Sopii apuvälineille, jotka on tarkoitettu lantion vetovyön käyttämiseen

Asennus



Asennus täytyy suorittaa asiantuntevan henkilön toimesta

1. Aseta pehmusteet (a) lantion alueella/lantion ihon taittokohdassa.
2. Kiinnitä hammashihna (b) pyörätuolin istuinputkeen (noudata asennusohjeita!)
 - Vyönhihna (f) on kiinnitetty pyörätuolin istuimeen erikseen
3. Aseta pehmusteiden välinen etäisyys hammashihnalla (b). 3 D vyö kiristetään aktivoimalla soljet (e).
4. Kiristä hammashihna (b) tasaisesti molemmilta puolilta ja niin pitkälle, että reiden ja pehmusteen välissä on vielä tilaa kämmenelle.
5. Hammashihnan päät voidaan tarvittaessa leikata puoliympyrän muotoon. Tasoita hammashihnan päät tarvittaessa. - Loukkaantumisvaara!
6. Tarkista, että hammashihna on kiinnitetty ja lukittu tiukasti molemmilta puolilta!



Käyttöohjeet



Turvallisuusohjeet

Vakaasta rakenteesta huolimatta komponentit, kuten rei'itetyt hihnat, turvavyöt, hammashihnat ja pehmuste kuluvat jonkin verran. Siksi **PELVI.LOC®** on suositeltavaa tarkistaa perusteellisesti kolmen kuukauden välein. Varmista, että nitit ja ruuviliitännät ovat kiinni kunnolla!

- Varmistu ennen käyttöä siitä, että tuote on käyttökelpoinen ja että istuvuus on hyvä - onnettomuusvaara!
- Älä korjaa tai liimaa vaurioituneita osia, kuten rei'itettyjä hihnoja/vyöhihnoja (f), hammashihnaa (b) tai liivin (f) pehmusteita (a) ja aseta niitä takaisin paikalleen - onnettomuusvaara!
- Älä istu pehmusteiden päälle - erityisesti neppareiden (e) takia voi syntyä painepisteitä!
- Älä nosta pyörätuolia **PELVI.LOC:in®** yläpuolelle - onnettomuusvaara!
- Varmista, etteivät kädet pääse rei'itetyn vyön ja rungon tai istuinputken väliin - murtumisriski!

Käyttörajoitukset / ei-toivotut sivuvaikutukset

- Älä käytä **PELVI.LOC:ia®** jos pehmusteen alueella on painepisteitä, haavoja tai muita ei-parantuneita vammoja - loukkaantumisvaara!
- Älä käytä **PELVI.LOC:ia®** luukadon, synnytyksellisen sidekudossairauden tai vakavien verenkiertohäiriöiden yhteydessä - loukkaantumisriski!
- Varmista puhdistuksen jälkeen, että **PELVI.LOC®** toimii oikein!
- Vaurioitunut **PELVI.LOC®** tulisi vaihtaa välittömästi - onnettomuusriski!



Huomio:

- **PELVI.LOC®** ei ole osa pyörätuolin ja/tai matkustajien passiivista turvajärjestelmää, kun sitä kuljetetaan vammaisille tarkoitetussa kuljetusvälineessä.
- Valmistajaa tai jakelijaa ei voida laittaa tuotevastuun merkityksessä vastuuseen vahingoista tai riskeistä, jotka aiheutuvat lasten jättämisestä vaille valvontaa tuotteen läheisyydessä!

Käyttö

1. **PELVI.LOC:ia®** käytettäessä pehmusteet (a) asetetaan lantion alueella/lantion ihon taittokohdassa.



Huomio: Varmista, että pehmusteen alla ei ole esineitä! Tällä tavoin vältetään tuskallisilta painepisteiltä.

2. Ohjaa sitten hammashihna (b) vastaavan soljen läpi. Käytä tätä varten vastaavaa kiristintä (e).
 3. Kiristä sen jälkeen hammashihna (b) niin pitkälle, että reiden ja pehmusteen välissä on vielä tilaa kämmenelle.
 4. Varmista, että nepparit (e) lukittuvat kiinni hammashihnaan!
- Suorita vetokoe!

Jos kohdistusjärjestelmä löystyy ei-toivotusti **PELVI.LOC:in®** käytön aikana, tämä voidaan korjata kiristämällä se uudelleen.

Käytä **PELVI.LOC:in®** avaamiseen nepparia (e) ja vedä hammashihna ulos.

- Varmista, että pehmusteet eivät pääse vetopyörän pintojen väliin!

Puhdistus ja desinfiointi

- Sopii pesukoneeseen 40 asteen lämpötilaan saakka.
- Kemoterminen desinfiointi on mahdollista kun pesusykliin lisätään ELTRA 40:tä
- Älä linkoa
- Ei sovellu kuivausrumpuun

Huolto

PELVI.LOC® on tarkastettava säännöllisesti vaurioiden varalta ja moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.

Korjaukset

Vaihda viallinen **PELVI.LOC®** välittömästi.

Hävittäminen


- Laitepakkaukset voidaan kierrättää.
- Metalliosat voidaan kierrättää.
- Muoviosat voidaan kierrättää muovinkierrätyksessä.
- Hävittäminen on suoritettava kunkin valtion kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
- Kysy kunnalta/kaupungilta, missä on lähin jätteidenkäsittely-yritys.

Tekniset tiedot

	S	M	L
Istuimen leveys (cm)	26 - 35	36 - 39	40 - 46
Pehmusteen koko (cm)	19 x 7,5	29 x 11	36 x 13,5
Paino (g)	260	300	400
Oletusmurtopiste (noin kg kohdalla)	60	80	80

Hammashihna koko XXXS - XXS		Tuote on lateksiton  
Hammashihna koko XS - S	2,4 x 0,2 x 40 cm	
Hammashihnan koko M - L - XL	2,4 x 0,2 x 40 cm	
Kiristin koko XXXS		
Kiristin koko XXS		
Kiristin koko XS - S	B-24-STAR-BL	
Kiristin koko M - L - XL	B-24-STAR-BL	

Varastointi- ja kuljetusolosuhteet

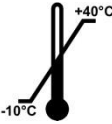	Pitkäkestoisessa varastoinnissa lämpötilan tulee olla -10 °C – +40 °C. Materiaali kestää erinomaisesti lyhytaikaisia lämpötilapiikkejä (esimerkiksi kuljetuksen aikana) alueella -20 °C – +60 °C, eivätkä ne vaikuta tuotteen turvallisuuteen ja suorituskykyyn.
	Suojattava kosteudelta varastoinnin ja kuljetuksen aikana

Takuu

Myönnämme tälle tuotteelle takuun lakisääteisten määräysten mukaisesti. Tämä takuu käsittää materiaali- ja valmistusvirheet. Tähän eivät sisälly kuluvat osat ja osat/kokoonpanot, jotka ovat normaalin kulumisen alaisia, eivätkä vauriot, jotka aiheutuvat liiallisesta rasituksesta, "epäasianmukaisesta käytöstä", liiallisesta voiman käytöstä tai luvattomista muutoksista/korjauksista. Takuuvaatimustapauksissa ota yhteyttä liikkeeseen, jolta ostit tämän tuotteen. Tuotevastuuseen liittyvistä syistä vain valtuutetut erikoisliikkeet saavat suorittaa tuotteelle korjaus-, huolto- ja kunnostustöitä käyttäen alkuperäisiä varaosia.



Valmistaja:

A2J GmbH

Am Fuchsberg 13

D-87452 Altusried

Puh.: +49 (08373) 987269

Faksi: +49 (08373) 987276

Sähköposti: info@a2j-intl.com

Internet: www.a2j-intl.com



Tämä tuote täyttää lääkinnällisiä laitteita koskevan EU-asetuksen 2017/745 (Medical Device Regulation, MDR) perusvaatimukset

Tilanne 01.01.2025

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään