




PELVI.LOC®

Genuframe

PL-GF - XXS - XS - S - M - L - XL

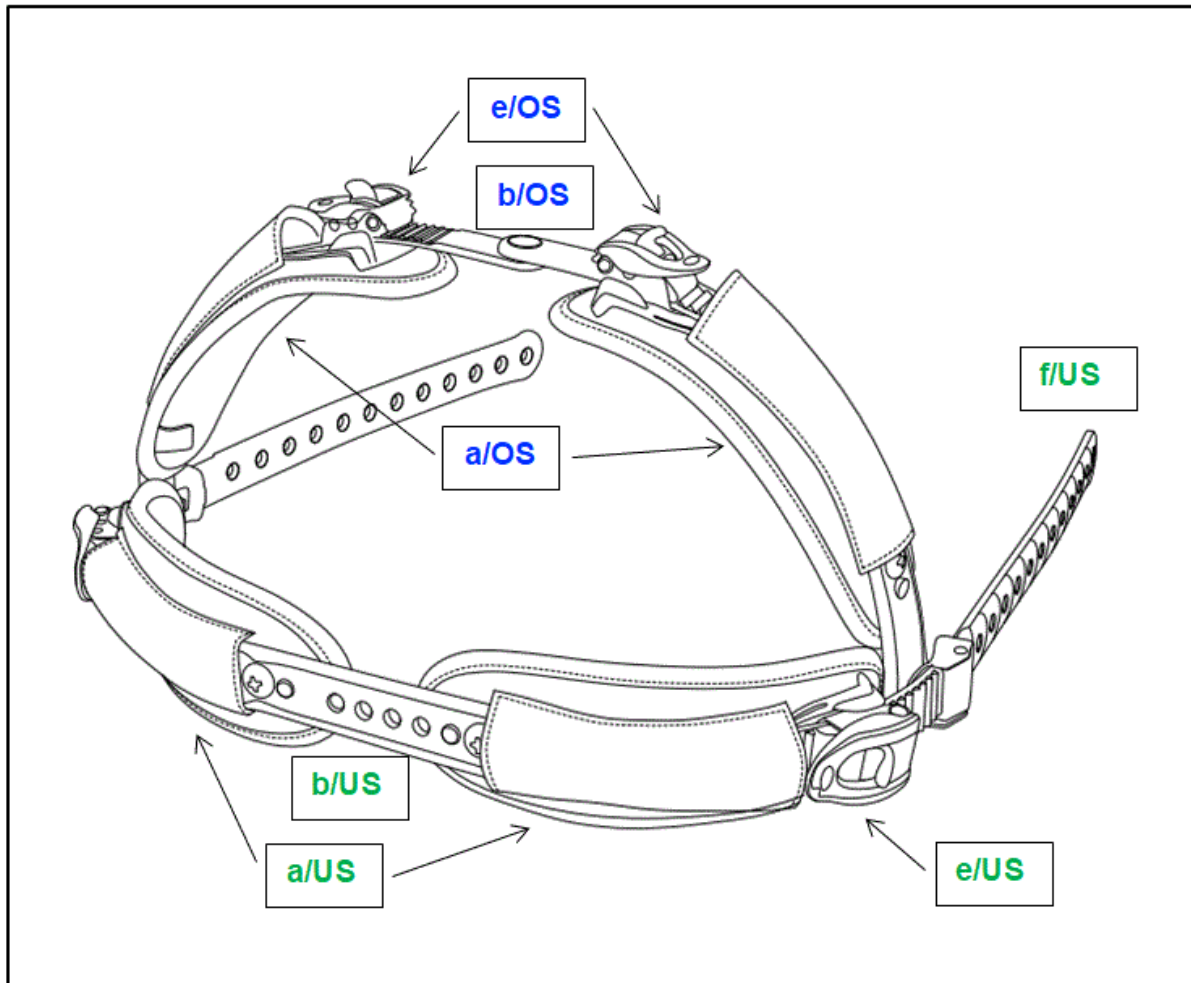

Lue tämän tuotteen kokoonpano- ja käyttöohjeet ennen ensimmäistä käyttökertaa varmistuaksesi käytön turvallisuudesta.



Soveltamisala

PELVI.LOC® Genuframe - PL-GF palvelee liikuntarajoitteisia ihmisiä etenkin heidän lantionsa ja reisiensä sijoittamiseksi pyörätuoleihin ja aktiivisiin pyörätuoleihin ja heidän eteenpäin liukumisensa estämiseksi.

Potilasryhmä, jolle tuote on tarkoitettu:

- Lapset, nuoret ja aikuiset
- Sukupuoli: naiset ja miehet

Vastaanottotarkastus

Poista tuote pakkauksesta kokonaan ja tarkista, että lähetys ei ole puutteellinen ja että siinä ei ole kuljetusvaurioita. Jos huomaat, että lähetyksessä on odottamattomia puutteita, niin:

1. Tee heti valitus kuljettajalle

2. Kirjaa vahinko/virhe ylös
3. Ilmoita meille tai kauppiaille heti

Toimituksen sisältö

- 1) 1 x **PELVI.LOC**[®] Genuframe reisivyö -XXS, -XS, -S, -M, -L, -XL esiasennettu
- 2) 1 x **PELVI.LOC**[®] Genuframe säärivyö -XXS, -XS, -S, -M, -L, -XL esiasennettu
- 3) 1 x tietoa kokoonpano- ja käyttöohjeiden lataamisesta verkosta

Lääketieteellisten laitteiden yhdistelmä

Sopii apuvälineille, jotka on tarkoitettu lantion vetovyön käyttämiseen

Säärivyön asennus



Asennus täytyy suorittaa asiantuntevan henkilön toimesta

PELVI.LOC[®] Genuframe-säärivyön asennus on verrattavissa PL-UG:n asennukseen

1. Laita kukin pehmuste (**a/US**) säären alueelle (sääriluun tai pohjeluun pään alapuolella).
Rei'itetty hihna/hammashihna (**f/US**) on tässä yhteydessä ulkopuolella.
 - **PELVI.LOC**[®] logo sääriluun pehmusteella näkyy siten etupuolella!
2. Aseta sääriluun pehmusteiden etäisyys rei'itetyllä hihnalla (**b/US**).
3. Kiinnitä rei'itetty hihna/hammashihna (**f/US**) pyörätuolin kehysputkeen
4. Kiristä rei'itetty hihna/hammashihna (**f/US**) tasaisesti molemmilta puolilta ja niin pitkälle, että reiden ja pehmusteen välissä on vielä tilaa kämmenelle
5. Hammashihnan päät voidaan tarvittaessa leikata puoliympyrän muotoon. Tasoita hammashihnan päät tarvittaessa. - Loukkaantumisvaara!
6. Tarkista, että rei'itetty hihna/hammashihna (**f/US**) on kiinnitetty ja lukittu tiukasti molemmilta puolilta!

Reisivyön asennus

PELVI.LOC[®] Genuframe-reisivyön asennus on verrattavissa PL-2DB:n asennukseen

7. Aseta pehmusteet (**a/OS**) reiden alueelle. – Hammashihna (**b/OS**) on päällä.
 - **PELVI.LOC**[®] logo reisiluun pehmusteella näkyy siten yläpuolella!
8. Säädä pehmusteiden etäisyys hammashihnan (**b/OS**) avulla käyttämällä reisivyön (**e/OS**) solkea.
 - Hammashihnan nivelen (**b/OS**) tulisi olla keskellä pehmusteiden välissä.
 - Vedä hammashihnaa ulos vain sen verran, että kunkin soljen (**e/OS**) takana on vielä kaksi hammasta.



Käyttöohjeet



Turvallisuusohjeet

Vakaasta rakenteesta huolimatta komponentit, kuten rei'itetyt hihnat, turvavyöt, hammashihnat ja pehmuste kuluvat jonkin verran. Siksi **PELVI.LOC®** on suositeltavaa tarkistaa perusteellisesti kolmen kuukauden välein. Varmista, että nitit ja ruuviliitännät ovat kiinni kunnolla!

- Varmistu ennen käyttöä siitä, että tuote on käyttökelpoinen ja että istuvuus on hyvä - onnettomuusvaara!
- Älä korjaa tai liimaa vaurioituneita osia, kuten rei'itettyjä hihnoja/vyöhihnoja (f), hammashihnaa (b) tai liivin (f) pehmusteita (a) ja aseta niitä takaisin paikalleen - onnettomuusvaara!
- Älä istu pehmusteiden päälle - erityisesti solkien (e) takia voi syntyä painepisteitä!
- Älä nosta pyörätuolia **PELVI.LOC:in®** yläpuolelle - onnettomuusvaara!
- Varmista, etteivät kädet pääse rei'itetyyn vyön ja rungon tai istuinputken väliin - murtumisriski!

Käyttörajoitukset / ei-toivotut sivuvaikutukset

- Älä käytä **PELVI.LOC:ia®** jos pehmusteen alueella on painepisteitä, haavoja tai muita ei-parantuneita vammoja - loukkaantumisvaara!
- Älä käytä **PELVI.LOC:ia®** luukadon, synnyynnäisen sidekudossairauden tai vakavien verenkiertohäiriöiden yhteydessä - loukkaantumisriski!
- Varmista puhdistuksen jälkeen, että **PELVI.LOC®** toimii oikein!
- Vaurioitunut **PELVI.LOC®** tulisi vaihtaa välittömästi - onnettomuusriski!



Huomio:

- **PELVI.LOC®** ei ole osa pyörätuolin ja/tai matkustajien passiivista turvajärjestelmää, kun sitä kuljetetaan vammaisille tarkoitetussa kuljetusvälineessä.
 - Valmistajaa tai jakelijaa ei voida laittaa tuotevastuun merkityksessä vastuuseen vahingoista tai riskeistä, jotka aiheutuvat lasten jättämisestä vaille valvontaa tuotteen läheisyydessä!
1. **PELVI.LOC:ia®** käytettäessä pehmusteet (a) asetetaan reisien alueelle.

Käyttö

1. **PELVI.LOC:ia®** käytettäessä pehmusteet (a) asetetaan reiteen ja sääreen.



Huomio: Varmista, että pehmusteen alla ei ole esineitä! Tällä tavoin vältetään tuskallisilta painepisteiltä.

2. Ohjaa sitten hammashihna (**f/US**) vastaavan soljen läpi. Käytä tätä varten vastaavaa solkea (**e/US**).
 3. Kiristä hammashihna (**f/US**) sen jälkeen niin pitkälle, että reiden ja pehmusteen välissä on vielä tilaa kämmenelle.
 4. Varmista, että kiristimien soljet (**e/US**) lukittuvat kiinni hammashihnaan!
- Suorita vetokoe!

Käytä **PELVI.LOC:in®** avaamiseen solkea (**e/US**) ja vedä hammashihna ulos.

- Varmista, että pehmusteet eivät pääse vetopyörän pintojen väliin!

Puhdistus ja desinfiointi

- Sopii pesukoneeseen 40 asteen lämpötilaan saakka.
- Kemoterminen desinfiointi on mahdollista kun pesusykliin lisätään ELTRA 40:tä
- Älä linkoa
- Ei sovellu kuivausrumpuun

Huolto

PELVI.LOC® on tarkastettava säännöllisesti vaurioiden varalta ja moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.

Korjaukset

Vaihda viallinen **PELVI.LOC®** välittömästi.

Hävittäminen

- Laitepakkaukset voidaan kierrättää.
- Metalliosat voidaan kierrättää.
- Muoviosat voidaan kierrättää muovinkierrätyksessä.
- Hävittäminen on suoritettava kunkin valtion kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
- Kysy kunnalta/kaupungilta, missä on lähin jätteidenkäsittely-yritys.

Tekniset tiedot

	XXXS	XXS	XS	S	M	L	XL
Istuimen leveys (cm)		12 - 20	16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46	44 - 52
Pehmusteen koko (cm)		11 x 7	20 x 7	20 x 7	25,5 x 8	25,5 x 8,5	28,5 x 9
Paino (g)		220	220	220	280	280	280
Oletusmurtopiste (noin kg kohdalla)		40	60	60	80	80	80

Hammashihna koko XXXS - XXS	1,9 x 0,2 x 40 cm	Tuote on lateksiton  
Hammashihna koko XS - S	1,9 x 0,2 x 40 cm	
Hammashihnan koko M - L - XL	2,4 x 0,2 x 40 cm	
Kiristin koko XXXS		
Kiristin koko XXS		
Kiristin koko XS - S	B-24-STAR-BL	
Kiristin koko M - L - XL	B-24-STAR-BL	



Tärkeä vihje: Polven leveys, ei istuimen leveys!

Varastointi- ja kuljetusolosuhteet

	Pitkäkestoisessa varastoinnissa lämpötilan tulee olla -10 °C – +40 °C. Materiaali kestää erinomaisesti lyhytaikaisia lämpötilapiikkejä (esimerkiksi kuljetuksen aikana) alueella -20 °C – +60 °C, eivätkä ne vaikuta tuotteen turvallisuuteen ja suorituskykyyn.
	Suojattava kosteudelta varastoinnin ja kuljetuksen aikana

Takuu

Myönnämme tälle tuotteelle takuun lakisääteisten määräysten mukaisesti. Tämä takuu käsittää materiaali- ja valmistusvirheet. Tähän eivät sisälly kuluvat osat ja osat/kokoonpanot, jotka ovat normaalin kulumisen alaisia, eivätkä vauriot, jotka aiheutuvat liiallisesta rasituksesta, "epäasianmukaisesta käytöstä", liiallisesta voiman käytöstä tai luvattomista muutoksista/korjauksista. Takuuvaatimustapauksissa ota yhteyttä liikkeeseen, jolta ostit tämän tuotteen. Tuotevastuuseen liittyvistä syistä vain valtuutetut erikoisliikkeet saavat suorittaa tuotteelle korjaus-, huolto- ja kunnostustöitä käyttäen alkuperäisiä varaosia.



Valmistaja:

A2J GmbH

Am Fuchsberg 13

D-87452 Altusried

Puh.: +49 (08373) 987269

Faksi: +49 (08373) 987276

Sähköposti: info@a2j-intl.com

Internet: www.a2j-intl.com



Tämä tuote täyttää lääkinnällisiä laitteita koskevan EU-asetuksen 2017/745 (Medical Device Regulation, MDR) perusvaatimukset

Tilanne 01.01.2025

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään