



PELVI.LOC® PL-KG-GO - S - M - L - XL



Tämän tuotteen turvallisen käytön varmistamiseksi lue tämä asennus- ja käyttöohje ja noudata sitä ennen ensimmäistä käyttöä.



Käyttötarkoitus

PELVI.LOC® PL-KG-GO on tarkoitettu liikuntarajoitteisille henkilöille erityisesti jalkojen asettamiseen pyörätuolin jalkalevyille ja estää eteenpäin liukumisen.

Potilasryhmä, jolle tuote on tarkoitettu:

- lapset, nuoret ja aikuiset
- sukupuolineutraali.

Vastaanottotarkastus

Poista tuote pakkauksesta kokonaan ja tarkista, että lähetys ei ole puutteellinen ja että siinä ei ole kuljetusvaurioita. Jos huomaat, että lähetyksessä on odottamattomia puutteita:

1. Reklamoï siitä välittömästi rahdinkuljettajalle.
2. Kirjaa vahinko/virhe ylös.
3. Ilmoita siitä välittömästi meille tai kauppiaalle.

Toimituksen sisältö

- 1) 1 x **PELVI.LOC®** PL-KG-GO -nilkkaremmi -S, -M, -L, XL esiasennettu (pari)
- 2) 1 x kiinnityssarja
- 3) 1 x tietoa asennus- ja käyttöohjeen lataamisesta verkosta

Lääkinnällisten laitteiden yhdistäminen

Sopii apuvälineille, jotka on tarkoitettu käytettäväksi nilkkaremmien kanssa

Räikkäsoljilla varustetun nilkkaremmen asennus



Asiantuntevan henkilön on suoritettava asennus.

1. Kiinnitä nilkkaremmen molemmat hihnat jalkalevyyn kiinnityssarjan avulla.
2. Aseta pehmusteet (a) kullekin nilkka-alueelle. – Hammashihna (b) osoittaa eteenpäin.
 - Pehmusteen logo on tällöin on sivulta luettavissa!
3. Säädä pehmusteiden etäisyys hammashihnan (b) avulla räikkäsoljilla (e).
 - Hammashihnan tulee olla tällöin edessä keskellä, pehmusteiden välissä.
4. Hammashihnan päät voidaan tarvittaessa lyhentää leikkaamalla ne puoliympyrän muotoon.
Tasolta hammashihnan leikatut päät tarvittaessa – loukkaantumisvaara!
5. Tarkista, että hammashihna on kiinnitetty ja lukittu tiukasti molemmilta puolilta!



Käyttöohje



Turvallisuusohjeet

Vakaasta rakenteestaan huolimatta osat, kuten hihnat, hammashihnat ja pehmusteet, kuluvat jonkin verran. Siksi **PELVI.LOC®** on suositeltavaa tarkistaa perusteellisesti kolmen kuukauden välein. Tällöin on tärkeää varmistaa, että niitti- ja ruuviliitokset ovat kiinni kunnolla!

- Varmista ennen tuotteen käyttöä, että se on käyttökelpoinen ja että istuvuus on hyvä – onnettomuusvaara!
- Älä korjaa tai liimaa ja käytä uudelleen vaurioituneita osia, kuten hihnaa, hammashihnaa (b) tai pehmusteita (a) – onnettomuusvaara!
- Älä nosta pyörätuolia **PELVI.LOCista®** – onnettomuusvaara!

Käyttörajoitukset / ei-toivotut sivuvaikutukset

- Älä käytä **PELVI.LOCia®**, jos pehmusteiden kohdalla olevalla ihoalueella on ruhjeita, haavoja tai muita ei-parantuneita vammoja – loukkaantumisvaara!
- Älä käytä **PELVI.LOCia®**, jos sinulla on osteoporoosi, luuston synnynnäinen hauraus tai vakavia verenkiertohäiriöitä – loukkaantumisvaara!
- Varmista puhdistuksen jälkeen, että **PELVI.LOC®** toimii oikein!
- Vaurioitunut **PELVI.LOC®** on vaihdettava välittömästi – onnettomuusvaara!



Huomio:

- **PELVI.LOC®** ei ole osa pyörätuolin ja/tai matkustajan turvajärjestelmää, kun sitä kuljetetaan liikuntarajoitteisten henkilöiden kuljettamiseen tarkoitetussa ajoneuvossa.
- Valmistajaa tai jakelijaa ei voida laittaa tuotevastuun osalta vastuuseen vahingoista tai riskeistä, jotka aiheutuvat lasten jättämisestä vaille valvontaa tuotteen läheisyydessä!

Käyttö

1. **PELVI.LOCia**® käytettäessä pehmusteet (a) asetetaan nilkkojen ympärille.



Huomio: Varmista tällöin, että pehmusteen alla ei ole esineitä! Näin vältetään kivuliaat ruhjeet.

2. Ohjaa sen jälkeen hammashihna (b) vastaavan räikän läpi. Käytä tätä varten vastaavaa räikkäsolkea (e).
 3. Kiristä sen jälkeen hammashihna (b) niin pitkälle, että nilkan ja pehmusteen välissä on vielä tilaa kämmenelle.
 4. Varmista, että salvat (e) tarttuvat kiinni hammashihnan hampaisiin!
- Suorita vetokoe!

Jos kohdistusjärjestelmä löystyy ei-toivotusti **PELVI.LOCin**® käytön aikana, tämä voidaan korjata kiristämällä se uudelleen.

Avaa PELVI.LOC® painamalla salpaa ja vetämällä hammashihna ulos.

- Varmista, että pehmusteet eivät pääse vetopyörän pintojen väliin!

Puhdistus ja desinfiointi

- Konepestävä 40 asteessa
- Kemoterminen desinfiointi on mahdollista lisäämällä pesusykliin ELTRA 40:tä.
- Ei linkousta
- Ei rumpukuivausta

Huolto

PELVI.LOC® on tarkastettava säännöllisesti vaurioiden varalta ja moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.

Korjaukset

Vaihda viallinen **PELVI.LOC**® välittömästi.

Hävittäminen

- Laitepakkaus on kierrätettävä.
- Metalliosat voidaan kierrättää metallinkeräykseen.
- Muoviosat voidaan kierrättää muovinkeräykseen.
- Hävittäminen on suoritettava kansallisten lakisääteisten määräysten mukaisesti.
- Kysy kaupunkisi tai kuntasi viranomaisilta lisätietoja paikallisista jätehuoltopalveluista.

Tekniset tiedot

	S	M	L	XL
Ympärysmitta (cm)	17–23	20–26	24–30	26–34
Hammashihna	R-19-VI-BL-210	R-19-VI-BL-275	R-19-VI-BL-300	R-19-VI-BL-300

Tuote on
lateksiton



Varastointi- ja kuljetusolosuhteet

	Pitkäkestoisessa varastoinnissa lämpötilan tulee olla -10 °C – +40 °C. Materiaali kestää erinomaisesti lyhytaikaisia lämpötilapiikkejä (esimerkiksi kuljetuksen aikana) alueella -20 °C – +60 °C, eivätkä ne vaikuta tuotteen turvallisuuteen ja suorituskyykyyn.
	Suojattava kosteudelta varastoinnin ja kuljetuksen aikana

Takuu

Myönnämme tälle tuotteelle takuun lakisääteisten määräysten mukaisesti. Tämä takuu käsittää materiaali- ja valmistusvirheet. Tähän eivät sisälly kuluvat osat ja osat/kokoonpanot, jotka ovat normaalin kulumisen alaisia, eivätkä vauriot, jotka aiheutuvat liiallisesta rasituksesta, "epäasianmukaisesta käytöstä", liiallisesta voiman käytöstä tai luvattomista muutoksista/korjauksista. Takuuvaatimustapauksissa ota yhteyttä liikkeeseen, jolta ostit tämän tuotteen. Tuotevastuuseen liittyvistä syistä vain valtuutetut erikoisliikkeet saavat suorittaa tuotteelle korjaus-, huolto- ja kunnostustöitä käyttäen alkuperäisiä varaosia.



Valmistaja:

A2J GmbH
Am Fuchsberg 13
D-87452 Altusried
Puh.: +49 (08373) 987269
Faksi: +49 (08373) 987276
Sähköposti: info@a2j-intl.com
Internet: www.a2j-intl.com



Tämä tuote täyttää lääkinnällisiä laitteita koskevan EU-asetuksen 2017/745 (Medical Device Regulation, MDR) perusvaatimukset