




PELVI.LOC

TL-3DSR -XS-S-M-L / TL-W -S-M-L-XL

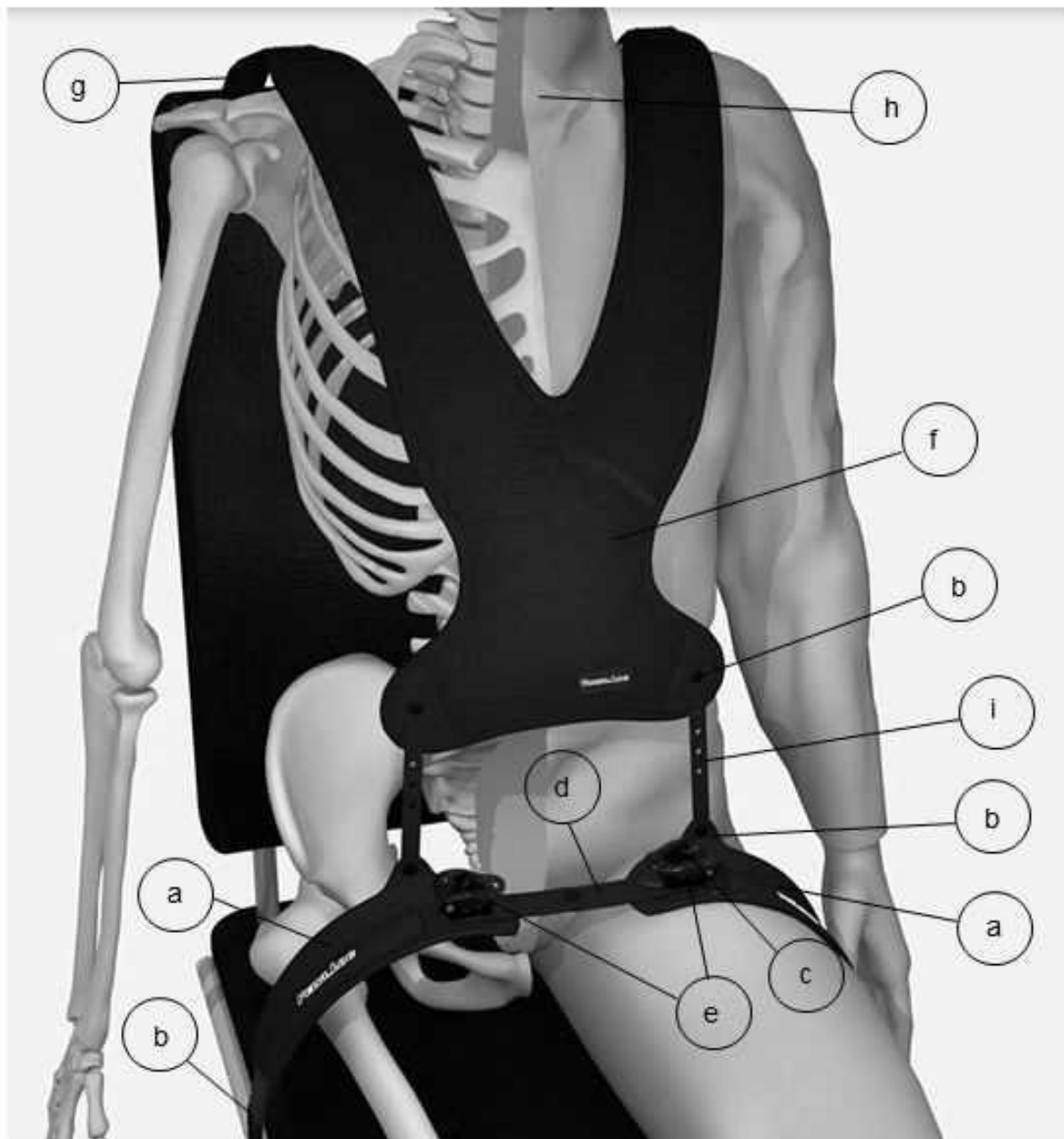

Lue tämän tuotteen kokoonpano- ja käyttöohjeet ennen ensimmäistä käyttökertaa varmistuaksesi käytön turvallisuudesta.

Soveltamisala

Tätä Torso.Loc TL-3DSR -laitetta käytetään yhdessä TL-W:n kanssa liikuntarajoitteisten henkilöiden sijoittamisen helpottamiseen ja heidän lantioidensa vetämiseen taaksepäin liikuntarajoitteisten henkilöiden istuimilla. Tällaisia istuimia ovat esim. suihkupyörätuoli, kylpyalusta, pyörätuoli, istuinkuori, terapiatuoli, kuntoutusvaunu tai urheiluvälineet.

Potilasryhmä, jolle tuote on tarkoitettu:

- Lapset, nuoret ja aikuiset
- Sukupuoli: naiset ja miehet

Vastaanottotarkastus

Poista tuote pakkauksesta kokonaan ja tarkista, että lähetys ei ole puutteellinen ja että siinä ei ole kuljetusvaurioita. Jos huomaat, että lähetyksessä on odottamattomia puutteita, niin:

1. Tee heti valitus kuljettajalle
2. Kirjaa vahinko/virhe ylös
3. Ilmoita meille tai kauppiaille heti

Toimituksen sisältö

- 1) 1 x TL-3DSR ei esiasennettu
- 2) 1 x TL-W ei esiasennettu
- 3) 1 x tietoa kokoonpano- ja käyttöohjeiden lataamisesta verkosta / Vihje

Lääketeieteellisten laitteiden yhdistelmä

Soveltuu apuvälineille, jotka on tarkoitettu käytettäväksi lantion vetovyön kanssa yhdessä ylävartalon sijoitusliivin kanssa.



Käyttötarkoitus

Tätä Torso.Loc TL-3DSR -tuotetta kanssa käyttävät liikuntarajoitteiset ihmiset yhdessä Torso.Loc TL-W:n kanssa erityisesti lantion ja reiden sekä ylävartalon sijoittamiseen - estäen lantion liukumisen ja ylävartalon kallistumisen eteenpäin.



Asennus

- Asennus täytyy suorittaa asiantuntevan henkilön toimesta
- 1. Aseta pehmusteet (a) reiden alueelle. - Hammashihna (b) kiinnitetään pyörätuoliin.
 - Pehmusteen logo näkyy sitten etupuolella!
- 2. Aseta pehmusteiden välinen etäisyys rei'itetyllä hihnalla (d).
 - Lantion vetohihna kiristetään aktiivisella soljet (e).
 - Rei'itetyn hihnan nivelen tulisi olla keskellä pehmusteiden välissä.
 - Vedä hammashihnaa ulos vain sen verran, että kunkin kiristimen (e) takana on vielä kaksi hammasta.
- 1. Kiinnitä sitten hammashihna (b) pyörätuolin kehysputkeen (Asennus - huomaa ohjeet)
- 2. Kiristä hammashihna (b) tasaisesti molemmilta puolilta ja niin pitkälle, että reiden ja pehmusteen välissä on vielä tilaa kämmenelle.
- 3. Hammashihnan päät voidaan tarvittaessa leikata puoliympyrän muotoon. Tasoita hammashihnan päät tarvittaessa. - Loukkaantumisvaara!
- 4. Tarkista, että hammashihna on kiinnitetty ja lukittu tiukasti!
- 5. Pue liivi (f) ylävartaloon. - Vyönauha (g) kiinnitetään pyörätuoliin molemmilta puolilta (ruuvaus tai 25 mm taitettava solki)
 - Pehmusteen logo näkyy sitten etupuolella!
- 6. Säädä neopreeniliivin etäisyys kaulaan (h) vyönauhan (g) avulla niin, ettei kiristumisvaaraa ole.
- 7. Ruuvaa kaksi rei'itettyä hihnaa (i) TL-3DSR:n ja TL-W:n kanssa. Lyhennä rei'itetyn hihnan pituutta tarvittaessa
 - Neopreenivyö kiristetään säätämällä rei'itetyt hihnat (i).
 - Neopreeniliivin tulee mukautua kehon muotoon keskellä.
- 8. Kiristä hieman ja aseta neopreenivyö vyöhihnan (g) kautta.
- 9. Kiristä olkavyöt (g) tasaisesti molemmilta puolilta ja niin pitkälle, että kaulan ja pehmusteen välissä on vielä tilaa kämmenelle (ihon punoituksen riski).
- 10. Hammashihnan (g) päät voidaan tarvittaessa leikata pois.



Käyttöohjeet



Turvallisuusohjeet

Vakaasta rakenteesta huolimatta komponentit, kuten rei'itetyt hihnat, turvavyöt, hammashihna ja pehmuste kuluvat jonkin verran. Siksi Torso.Loc on suositeltavaa tarkistaa perusteellisesti kolmen kuukauden välein. Varmista, että nitit ja ruuviliitännät ovat kiinni kunnolla!

- Varmistu ennen käyttöä siitä, että tuote on käyttökelpoinen ja että istuvuus on hyvä. - onnettomuusvaara!
- Älä korjaa tai liimaa vaurioituneita osia, kuten vyöhihnoja/rei'itettyjä hihnoja (i), hammashihnaa (b) tai liivin (f) pehmusteita (a) ja aseta niitä takaisin paikalleen - onnettomuusvaara!
- Älä istu pehmusteiden päälle! Voi syntyä painepisteitä, erityisesti soljen (e) takia!
- Älä nosta pyörätuolia Torso.Loc:in yläpuolelle. Onnettomuusvaara!
- Varmista, etteivät kädet pääse rei'itetyn vyön ja rungon tai istuinputken väliin. Murtumisriski!

Käyttörajoitukset / ei-toivotut sivuvaikutukset

- Älä käytä Torso.Loc:ia, jos pehmusteen alueella on painepisteitä,
- Haavoja tai muita ei-parantuneita vammoja. - Loukkaantumisvaara!
- Älä käytä Torso.Loc:ia luukadon, synnynnäisen sidekudossairauden tai vakavien verenkiertohäiriöiden yhteydessä. - Loukkaantumisvaara!
- Varmista puhdistuksen jälkeen, että Torso.Loc toimii oikein!
 - Vaurioitunut Torso.Loc on vaihdettava välittömästi. - Onnettomuusvaara!



Huomio:

Torso.Loc ei ole osa pyörätuolin ja/tai matkustajien passiivista turvajärjestelmää, kun sitä kuljetetaan vammaisille tarkoitetussa kuljetusvälineessä.

- Valmistajaa tai jakelijaa ei voida laittaa tuotevastuun merkityksessä vastuuseen vahingoista tai riskeistä, jotka aiheutuvat lasten jättämisestä vaille valvontaa tuotteen läheisyydessä!

Käyttö

1. Torso.Loc:in käyttöä varten pehmusteet (a) asetetaan reiteen.



Huomio:

- Varmista, että pehmusteen alla ei ole esineitä! Tällä tavoin vältetään tuskallisilta painepisteiltä.
2. Ohjaa sitten hammastettu hihna (b) vastaavan soljen läpi. Käytä tätä varten vastaavaa vyönsolkea (e).
3. Kiristä hammashihna (b) sen jälkeen niin pitkälle, että reiden ja pehmusteen välissä on vielä tilaa kämmenelle.
4. Varmista, että kiristimien soljet (c) lukittuvat kiinni hammashihnaan!
 - Suorita vetokoe!

Käytä **Torso.Loc:in avaamiseen** solki (c) ja vedä hammashihna ulos.

- Varmista, että pehmusteet eivät pääse vetopyörän pintojen väliin!

Puhdistus ja desinfiointi

- Sopii pesukoneeseen 40 asteen lämpötilaan saakka.
- Kemoterminen desinfiointi on mahdollista kun pesusykliin lisätään ELTRA 40:tä
- Älä linkoa
- Ei sovellu kuivausrumpuun

Huolto

Torso.Loc on tarkastettava säännöllisesti vaurioiden varalta ja moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.

Korjaukset

Vaihda viallinen Torso.Loc heti.

Hävittäminen

- Laitepakkaukset voidaan kierrättää.
- Metalliosat voidaan kierrättää.
- Muoviosat voidaan kierrättää muovinkierrätyksessä.
- Hävittäminen on suoritettava kunkin valtion kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
- Kysy kunnalta/kaupungilta, missä on lähin jätteidenkäsittely-yritys.

Tekniset tiedot TL-3DSR

Istuimen leveys:	XS	16 - 24 cm
Pehmusteen koko:	XS	18 x 7 cm
Paino	XS	Noin 220 g
Oletusmurtumapiste:	XS	noin 60 kg:n kohdalla


Istuimen leveys:	S	20 - 32 cm
Pehmusteen koko:	S	21 x 8 cm
Paino	S	Noin 220 g
Oletusmurtumapiste:	S	noin 60 kg:n kohdalla

Istuimen leveys:	M	30 - 40 cm
Pehmusteen koko:	M	25,5 x 8 cm
Paino	M	Noin 280 g
Oletusmurtumapiste:	M	noin 80 kg:n kohdalla

Istuimen leveys:	L	36 - 46 cm
Pehmuesteen koko:	L	26,5 x 8,5 cm
Paino	L	Noin 280 g
Oletusmurtumapiste:	L	noin 80 kg:n kohdalla

Tekniset tiedot TL-W

Tuotenro.	A	B	C	D	E	F
TL-W-S	31	22	12	16	4	12
TL-W-M	38	29	16	19	5	13
TL-W-L	47	37	19	22	6	14
TL-W-XL	55	45	24	26	6,5	17

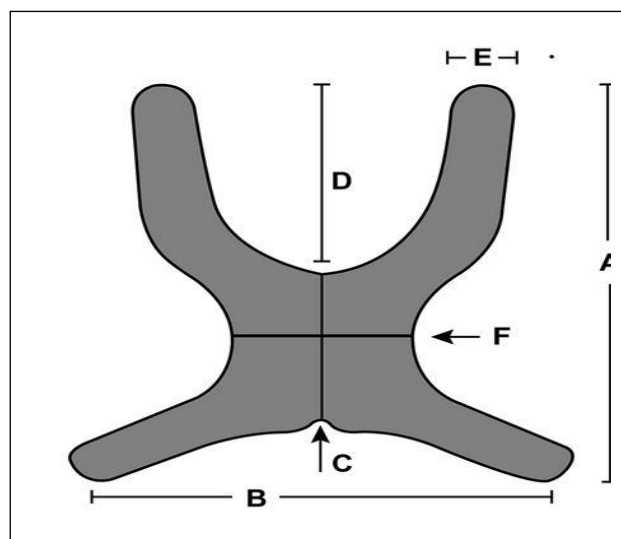


Hammashihna, koko: XS-S	1,9 x 0,2 x 40 cm
Hammashihna, koko: M-L	2,4 x 0,2 x 40 cm

Tuote on lateksiton



Varastointi- ja kuljetusolosuhteet

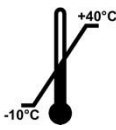	Pitkäkestoisessa varastoinnissa lämpötilan tulee olla -10 °C – +40 °C. Materiaali kestää erinomaisesti lyhytaikaisia lämpötilapiikkejä (esimerkiksi kuljetuksen aikana) alueella -20 °C – +60 °C, eivätkä ne vaikuta tuotteen turvallisuuteen ja suorituskykyyn.
	Suojattava kosteudelta varastoinnin ja kuljetuksen aikana

Takuu

Myönnämme tälle tuotteelle takuun lakisääteisten määräysten mukaisesti. Tämä takuu käsittää materiaali- ja valmistusvirheet. Tähän eivät sisälly kuluvat osat ja osat/kokoonpanot, jotka ovat normaalin kulumisen alaisia, eivätkä vauriot, jotka aiheutuvat liiallisesta rasituksesta, "epäasianmukaisesta käytöstä", liiallisesta voiman käytöstä tai luvattomista muutoksista/korjauksista. Takuuvaatimustapauksissa ota yhteyttä liikkeeseen, jolta ostit tämän tuotteen. Tuotevastuuseen liittyvistä syistä vain valtuutetut erikoisliikkeet saavat suorittaa tuotteelle korjaus-, huolto- ja kunnostustöitä käyttäen alkuperäisiä varaosia.



Valmistaja:

A2J GmbH

Am Fuchsberg 13

D-87452 Altusried

Puh.: +49 (08373) 987269

Faksi: +49 (08373) 987276

Sähköposti: info@a2j-intl.com

Internet: www.a2j-intl.com



Tämä tuote täyttää lääkinnällisiä laitteita koskevan EU-asetuksen 2017/745 (Medical Device Regulation, MDR) perusvaatimukset

Tilanne 01.01.2025

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään