



PELVI.LOC® PL-KG-GO -S -M -L -XL



Pro bezpečné používání tohoto produktu si před prvním použitím přečtěte tento návod k montáži a použití a postupujte podle něj



Oblast použití

PELVI.LOC® PL-KG-GO používají osoby s omezenou pohyblivostí, zejména pro polohování nohou na stupačkách invalidního vozíku, kde zabraňuje jejich sklouznutí dopředu.

Skupina pacientů, pro kterou je produkt určen:

- děti, mládež a dospělí
- osoby bez ohledu na pohlaví

Kontrola při převzetí

Výrobek kompletně vybalte a zkontrolujte, zda je zásilka kompletní a zda nebyla při přepravě poškozena. Pokud navzdory očekávání zjistíte, že zásilka vykazuje vadu:

1. Okamžitě ji reklamujte u přepravce
2. Nechte poškození / vadu zaznamenat do protokolu
3. Okamžitě informujte nás nebo vašeho specializovaného prodejce

Rozsah dodávky

- 1) 1 x bandáž kotníku **PELVI.LOC®** PL-KG-GO -S, -M, -L, XL předmontovaná (pár)
- 2) 1 x upevňovací sada
- 3) 1 x informace k online stažení návodu k montáži a použití

Kombinace zdravotnických produktů

Vhodné pro pomůcky, které jsou určeny pro použití bandáží kotníku

Montáž bandáže kotníku se sponami ráčny



Montáž by měla provádět osoba s odbornými znalostmi

1. Připevněte oba pásy bandáže kotníku pomocí upevňovací sady ke stupačce.
2. Umístěte polstrování (a) v oblasti obou kotníků. - Ozubený pás (b) je při tom vpředu.
 - Logo na polstrování lze přečíst z boku!
3. Pomocí ozubeného pásu (b) nastavte vzdálenost mezi polstrováním stisknutím spon ráčny (e).
 - Ozubený pás by pak měl být uprostřed vpředu mezi polstrováním.
4. V případě potřeby lze konce ozubeného pásu zkrátit na půlkruhovou délku. Z konců zkráceného ozubeného pásu odstraňte případné otřepy. - Nebezpečí poranění!
5. Zkontrolujte pevné usazení a zajišťovací mechanismus na obou stranách ozubeného pásu!



Návod k použití



Bezpečnostní pokyny

Navzdory stabilní konstrukci podléhají součásti, jako jsou popruhy, ozubené pásy a polstrování, určitému opotřebení. Proto se doporučuje, abyste produkt **PELVI.LOC®** každé 3 měsíce důkladně zkontrolovali. Dbejte také na to, aby nýtové a šroubové spoje byly těsné!

- Před použitím výrobku se ujistěte, že je v provozuschopném stavu a že správně sedí – hrozí nebezpečí úrazu!
- Poškozené části, jako jsou spony, ozubené pásy (b) nebo polstrování (a) neopravujte, nelepte a znovu nepoužívejte – hrozí nebezpečí úrazu!
- Nezvedejte invalidní vozík za **PELVI.LOC®** – hrozí nebezpečí úrazu!

Omezení používání / nežádoucí vedlejší účinky

- Nepoužívejte **PELVI.LOC®**, pokud se v oblasti polstrování nacházejí otlačeniny, rány nebo jiná nezhojená zranění – hrozí nebezpečí poranění!
- Nepoužívejte **PELVI.LOC®**, pokud máte řídnutí kostí, vrozenou lámavost kostí nebo závažné poruchy prokrvení – hrozí nebezpečí poranění!
- Po vyčištění se ujistěte, že **PELVI.LOC®** správně funguje!
- Poškozený **PELVI.LOC®** je třeba okamžitě vyměnit – hrozí nebezpečí úrazu!



Pozor:

- **PELVI.LOC®** není součástí zádržného systému pro invalidní vozík a/nebo cestující během přepravy ve vozidle pro přepravu osob se zdravotním postižením.
- Výrobce ani distributor nemohou nést odpovědnost z hlediska odpovědnosti za vady výrobku za škody nebo rizika, která jsou způsobena v souvislosti s výrobkem dětmi, které nejsou pod dohledem!

Použití

1. Při použití produktu **PELVI.LOC®** se přiloží polstrování (a) na kotník



Pozor: Dbejte na to, aby se pod polstrováním nenacházely žádné předměty! Zabráňte tak vzniku bolestivých otlačenin.

2. Poté ved'te ozubený pás (b) skrz příslušnou ráčnu. K tomu stiskněte příslušnou sponu ráčny (e).
 3. Poté utáhněte ozubený pás (b), dokud mezi kotníkem a polstrováním nezbude dostatek místa pro plochou ruku.
 4. Dbejte na to, aby západky (e) zapadly do zubů ozubeného pásu!
- Proved'te zkoušku tahem!

Pokud se systém polohování během používání **PELVI.LOC®** nechtěně uvolní, lze to napravit opětovným utažením.

Pro otevření výrobku **PELVI.LOC®** stiskněte západku a vytáhněte ozubený pás.

- Dbejte na to, aby se polstrování nedostalo mezi paprsky hnacího kola!

Čištění a dezinfekce

- Vhodné pro praní v pračce do 40 stupňů.
- Možnost chemicko-termické dezinfekce přidáním ELTRA 40 do pracího cyklu.
- Neodstřed'ujte.
- Není vhodné do sušičky.

Údržba

PELVI.LOC® je třeba pravidelně kontrolovat z hlediska poškození a funkčnosti.

Opravy

Vadný **PELVI.LOC®** okamžitě vyměňte.

Likvidace

- Obal výrobku lze recyklovat.
- Kovové části lze recyklovat jako kovový šrot.
- Plastové díly lze recyklovat jako plast.
- Likvidace musí být prováděna v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy.
- Správa vaší obce/vašeho města vám sdělí informace ohledně místních společností provádějících likvidaci odpadu.

Technické údaje

	S	M	L	XL
Obvod (cm)	17–23	20–26	24–30	26–34
Ozubený pás	R-19-VI-BL-210	R-19-VI-BL-275	R-19-VI-BL-300	R-19-VI-BL-300

bez latexu



Skladovací a přepravní podmínky

	Teplotní rozsah pro dlouhodobé skladování od -10 °C do +40 °C. Krátkodobé teplotní výkyvy, např. během přepravy, od -20 °C do +60 °C materiál dobře snáší a nemají vliv na bezpečnost a funkčnost výrobku.
	Chraňte před vlhkostí během skladování a přepravy

Skladovací a přepravní podmínky

	Teplotní rozsah pro dlouhodobé skladování od -10 °C do +40 °C. Krátkodobé teplotní výkyvy, např. během přepravy, od -20 °C do +60 °C materiál dobře snáší a nemají vliv na bezpečnost a funkčnost výrobku.
	Chraňte před vlhkostí během skladování a přepravy

Záruční plnění

Za tento výrobek přebíráme záruku v souladu se zákonnými ustanoveními. Vztahuje se na vady materiálu a chyby zpracování. Nevztahuje se na opotřebitelné díly a díly/sestavy, které podléhají běžnému opotřebení, jakož i na poškození vzniklá nadměrným namáháním, „používáním v rozporu s určením“, poškozením způsobeným násilím nebo neschválenou úpravou/opravou. V případě záručního plnění se obraťte na specializovaného prodejce, u kterého jste tento výrobek zakoupili. Z důvodu odpovědnosti za výrobek mohou opravy, údržbu a servisní práce provádět pouze autorizovaní specializovaní prodejci s použitím originálních náhradních dílů

**Výrobce:**

A2J GmbH

Am Fuchsberg 13

D-87452 Altusried

Tel.: +49 (08373) 987269

Fax: +49 (08373) 987276

E-mail: info@a2j-intl.com

Internet: www.a2j-intl.com

Stav 01.01.2025



Tento výrobek je v souladu se základními
požadavky nařízení EU 2017/745 o
zdravotnických prostředcích - Medical Device
Regulation (MDR)

Technické změny vyhrazeny