




## **PELVI.LOC® PL-2DA S - M -L**

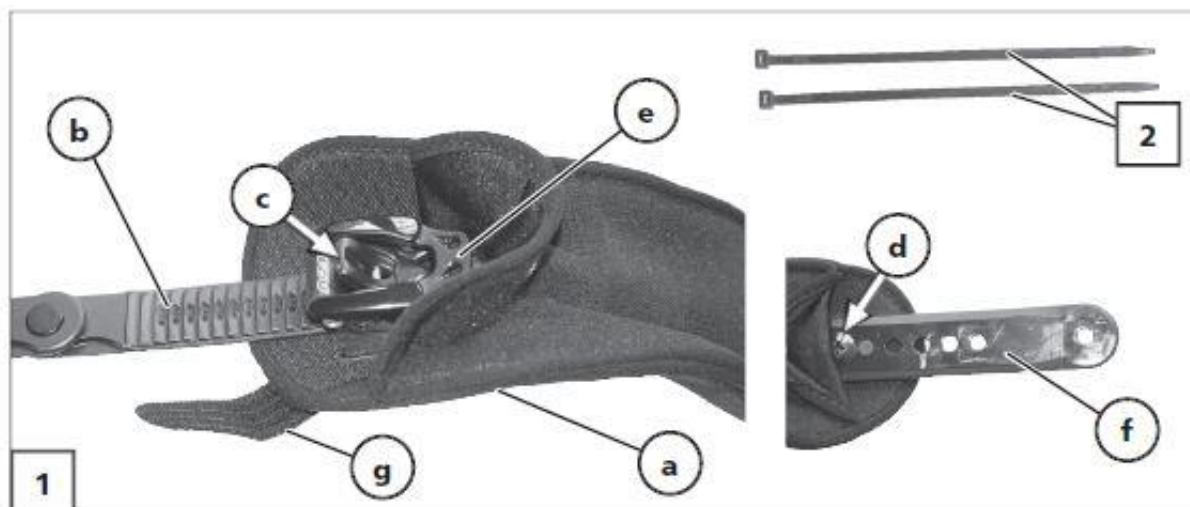

For sikker bruk av dette produktet, vennligst les og følg denne monterings- og bruksanvisningen før første bruk



### **Bruksområde**

**PELVI.LOC®** PL-2DA er til bruk av personer med nedsatt bevegelse, spesielt for lårplassering i rullestoler og aktivitetsrullestoler og forhindrer at brukeren glir fremover.

### **Beregnet pasientgruppe:**

- Ungdom og voksne
- Kjønn: kvinner og menn

### **Mottakskontroll**

Pakk ut produktet helt og kontroller at forsendelsen er fullstendig og uten transportskader. Hvis du opplever at forsendelsen har en uventet feil, så:

1. Klag straks til transportøren
2. Få registrert skaden / feilen
3. Informer oss eller forhandleren din umiddelbart

### **Leveringsomfang**

- 1) 1 x **PELVI.LOC®** PL-2DA -S, -M, -L forhåndsmontert
- 2) 2 x Kabelfeste 7,8 mm
- 3) 1 x Informasjon for online nedlasting av monterings- og bruksanvisningen

### **Kombinasjon av medisinsk utstyr**

Egnet som hjelpemiddel ved bruk av et bekkenbelte

## Montering



Monteringen må utføres av en person med spesialkunnskap

1. Plasser alltid polsteret (a) på låret, med tannbeltet (b) vendt oppover.
  - Logoen på polsteret kan dermed leses forfra.
2. Still inn avstanden til polsteret via tannbeltet (b) ved å bruke skrallespennene (e).
  - Hengslet på det perforerte beltet skal så legges midt mellom polstrene.
  - Trekk ut tannbeltet maksimalt så langt at to tenner bak hver av skrallespennene (c) er frie.
  - For å regulere, kan borrelåsen frigjøres og polstringen åpnes ved regulering (følges bare ved belter med dekkede sperrespennere)
3. Så festes hullstroppen (f) til rammerøret på rullestolen
4. Så strammes tannbåndet (b) på begge sider så mye at det fremdeles er nok plass til å legge en håndflate mellom låret og polsteret.
5. Om nødvendig kan endene av tannbeltet avrundes. Puss endene av det kuttete tannbeltet om nødvendig. – Fare for personskade.
6. Kontroller at festet sitter godt og er låst på begge sider av tannbeltet.



## Bruksanvisning



## Sikkerhetsanvisninger

På tross av den stabile konstruksjonen, er komponenter som låsebelter, tannbelter og polster utsatt for en viss mengde slitasje. Derfor anbefales det å gjennomføre en grundig inspeksjon av **PELVI.LOC®** hver 3. måned. Forsikre deg også om at nagle- og skrueforbindelsene er sikre!

- Du må kontrollere at produktet er i brukbar stand og har riktig passform før bruk - fare for ulykke.
- Ikke lapp eller lim ødelagte deler som låsestropper (f) tannbelter (b) eller polstre (a) – fare for ulykke.
- Ikke sitt på polsteret – Fare for trykkpunkter spesielt på grunn av sperrene (c).
- Ikke løft rullestolen over **PELVI.LOC®**. Fare for ulykke.
- Forsikre deg om at hendene ikke kommer mellom tannbeltet og rammen eller seterøret - fare for klemskader!

## Begrensninger i bruk / uønskede bivirkninger

- Ikke bruk **PELVI.LOC®** hvis det er bloduttredelser, sår eller andre skader som ikke er grodd i området til polsteret – fare for personskader.
- Ikke bruk **PELVI.LOC®** i tilfelle beintap, beinskjørhet eller alvorlige sirkulasjonsforstyrrelser - fare for personskade.
- Etter rengjøring må det påses at **PELVI.LOC®** virker som den skal.
- En skadet **PELVI.LOC®** bør skiftes ut umiddelbart – fare for ulykke.

**Advarsel:**

- **PELVI.LOC®** er ikke en del av sikkerhetssystemet for rullestolen og/eller brukeren ved transport av personer med nedsatt funksjonsevne i et kjøretøy.
- Når det gjelder produktansvar, kan verken produsenten eller distributøren holdes ansvarlig for skader eller risiko i tilknytning til barn uten tilsyn i forbindelse med produktet.

**Bruk**

1. For å bruke **PELVI.LOC®** legges polsteret (a) på låret



**Advarsel:** Forsikre deg om at det ikke er gjenstander under polsteret! På den måten unngår du smertefulle trykksteder.

2. **Viktig:** må ikke plasseres over bekkenet eller ryggraden!
  3. Før så tannbeltet (b) gjennom den respektive sperren. For å gjøre dette, bruk den tilhørende skrallespennen (e).
  4. Så strammes tannbåndet (b) så mye at det fremdeles er nok plass til å legge en håndflate mellom låret og polsteret.
  5. Forsikre deg om at spennene (c) griper inn i tennene på tannbeltet.
- Gjennomfør en strekkprøve.

Hvis posisjoneringssystemet løsner uønsket mens du bruker **PELVI.LOC®**, kan dette avhjelpes ved å stramme spennen på nytt.

**For å åpne **PELVI.LOC®**** trykk på spennen (c) og trekk ut tannbeltet.

- Pass på at polstrene ikke kommer inn mellom eikene på drivhjulet.

**Rengjøring og desinfisering**

- Kan vaskes i maskin ved 40 grader.
- Kjemotermisk desinfisering mulig ved å tilsette ELTRA 40 til vaskesyklusen
- Ingen sentrifugering
- Egner seg ikke i tørketrommelen

**Vedlikehold**

**PELVI.LOC®** må regelmessig sjekkes for skader og funksjonalitet.

**Reparasjon**

En defekt **PELVI.LOC®** må skiftes ut omgående.

## Avfallsbehandling

- Emballasjen til enheten kan gjenvinnes.
- Metalldelene kan kastes i metallavfall, og er gjenvinnbare.
- Plastmaterialene er gjenvinnbare.
- Avfallshåndteringen må skje i henhold til respektive forskrifter på stedet.
- Spør lokalt / kommunen om lokale avfallsselskaper.

## Tekniske data

|                                                 | XXXS | XXS | XS | S       | M       | L       | XL |
|-------------------------------------------------|------|-----|----|---------|---------|---------|----|
| <b>Setebredde (cm)</b>                          |      |     |    | 20 - 32 | 30 - 40 | 36 - 46 |    |
| <b>Polstringsstørrelse (cm)</b>                 |      |     |    | 19 x 11 | 23 x 12 | 28 x 14 |    |
| <b>Vekt (g)</b>                                 |      |     |    | 220     | 280     | 280     |    |
| <b>Forutbestemt<br/>bruddpunkt (ca.<br/>kg)</b> |      |     |    | 60      | 80      | 80      |    |

|                                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Størrelse tannbånd XXXS - XXS</b> |                     | uten lateks<br><br><br><br><br><br>LIZENSERT<br>PARTNER<br><small>REG. NR. 00000000000000000000</small> |
| <b>Størrelse tannbånd XS - S</b>     | 2,4 x 0,2 x 17,0 cm |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Størrelse tannbånd M - L - XL</b> | 2,4 x 0,2 x 17,0 cm |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Skrallespenne str. XXXS</b>       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Skrallespenne str. XXS</b>        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Skrallespenne str. XS - S</b>     | B-24-FLAT-LO-BL     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Skrallespenne str. M - L - XL</b> | B-24-ERGO-BL        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Betingelser for lagring og transport

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Temperaturområde ved langfrist lagring -10 °C til +40 °C.</p> <p>Midlertidige temperaturtopper, f.eks. i forbindelse med transport, på -20 °C til +60 °C tolereres godt av materialet og påvirker ikke sikkerheten og ytelsen til produktet.</p> |
|  | Beskyttes mot fuktighet under lagring og transport                                                                                                                                                                                                  |

## Garanti

Vi gir en garanti for dette produktet i samsvar med lovkrav. Dette dekker material- og bearbeidingsfeil. Utelukket fra denne er slitasjedeler og deler/komponentgrupper som er utsatt for normal slitasje, samt skader som er et resultat av overdreven belastning, «ikke-forskriftsmessig bruk», voldsom skade eller utillatt endring/reparasjon. I garantitilfelle henvender du deg til fagforhandler, hvor du har kjøpt dette produktet. På grunn av produktansvar får reparasjon-, vedlikeholds- og istandsettingsarbeid kun utføres av autorisert fagforhandler ved bruk av originale reservedeler



### Produsent:

A2J GmbH

Am Fuchsberg 13

D-87452 Altusried

Tlf: +49 (08373) 987269

Faks: +49 (08373) 987276

e-post: [info@a2j-intl.com](mailto:info@a2j-intl.com)

Internett: [www.a2j-intl.com](http://www.a2j-intl.com)



Dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene i EU-forordning 2017/745 om medisinsk utstyr – Medical Device Regulation (MDR)

Utgave 01.01.2025

Med forbehold om tekniske endringer