




PELVI.LOC® PL-3DWP - XS, - S, -M, -L

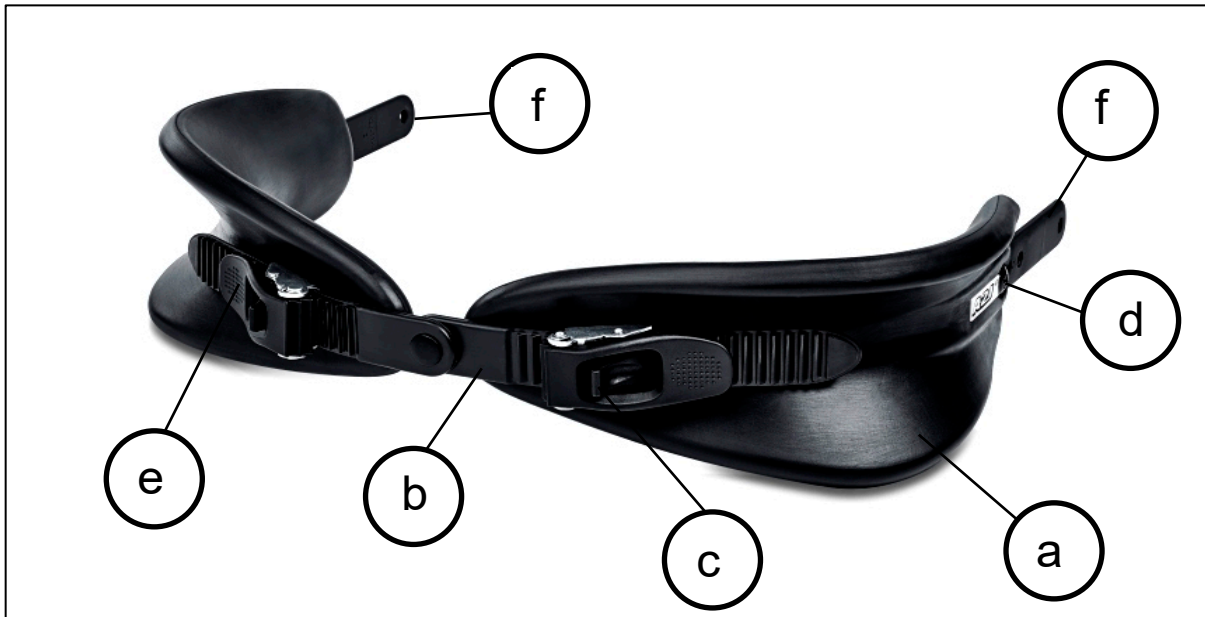

Lea y siga estas instrucciones de montaje y uso antes del primer uso para una aplicación segura de este producto.



Ámbito de aplicación

Este **PELVI.LOC® PL-3DWP Waterproof** sirve para el posicionamiento y la retracción pélvica de personas con movilidad reducida en una superficie de asiento, como una silla de ruedas de ducha, una camilla de baño, una silla de ruedas, un asiento, una silla terapéutica, un carrito de rehabilitación o un aparato deportivo

Grupo de pacientes previsto:

- Niños, adolescentes y adultos
- Sexo: femenino y masculino

Control de recepción

Desembale este producto por completo y compruebe que el envío esté íntegro y no presente daños de transporte. Si detecta que el envío, en contra de lo esperado, presenta un fallo, proceda de la siguiente manera:

1. Presente una reclamación al transportista de inmediato.
2. Encárguese de que se registre el daño / fallo.
3. Infórmenos a nosotros o a su vendedor especializado de inmediato.

Volumen de suministro

- 1) 1 x **PELVI.LOC® PL-3DWP -XS, -S, -M, -L** premontado
- 2) 1 x información para descargar las instrucciones de montaje y uso en línea

Combinación de productos médicos

Apto para medios auxiliares previstos para el uso de una correa de retracción pélvica

Montaje



El montaje debe ser realizado por una persona con conocimientos técnicos.

1. Los acolchados (a) deben estar junto a la zona de la pelvis / los pliegues de las caderas. – La banda dentada (b) estará encima.
 - Después, el logo del acolchado podrá leerse desde el lado izquierdo.
2. Ajuste la distancia de los acolchados a través de la banda dentada (b) accionando las hebillas de trinquete (e).
 - La articulación de la banda dentada deberá situarse entonces en el centro entre los acolchados.
 - Se debe tirar de la banda dentada como máximo hasta que queden libres dos dientes detrás de cada pestillo (c).
3. A continuación, fije la correa perforada (f) al tubo del bastidor de la silla de ruedas.
4. Tense la banda dentada (b) por ambos lados de forma homogénea y hasta que solo quede espacio para una mano plana entre el muslo y el acolchado.
5. En caso necesario, pueden acortarse los extremos de la banda dentada de forma semicircular. En caso necesario,
 - desbarbe los extremos de la banda dentada acortada. – ¡Peligro de lesiones!
6. ¡Revise el asiento fijo y la retención a ambos lados de la banda dentada!



Instrucciones de uso



Indicaciones de seguridad

A pesar de las construcciones estables, componentes como las correas perforadas, las bandas dentadas y los acolchados están sujetos a un cierto desgaste. Por ello, se recomienda controlar a fondo el **PELVI.LOC®** PL-3DWP cada 3 meses. ¡Aquí se debe prestar atención también al asiento fijo de las uniones de remaches y atornilladas!

- Convéznase de que el estado del producto permite su uso y de que está asentado correctamente – ¡Peligro de lesiones!
- No remiende, pegue ni vuelva a utilizar componentes dañados, como correas perforadas (f), la banda dentada (b) o los acolchados (a) – ¡Peligro de accidente!
- No se siente sobre los acolchados – ¡Peligro de puntos de presión, especialmente por los trinquetes (c)!
- No eleve la silla de ruedas por encima del **PELVI.LOC®** PL-3DWP - ¡Peligro de accidente!
- Preste atención a no poner las manos entre la correa perforada y el tubo del bastidor o del asiento - ¡Peligro de aplastamiento!

Limitaciones del uso / efectos secundarios no deseados

- No utilice el **PELVI.LOC**[®] PL-3DWP si hay puntos de presión, heridas u otras lesiones no curadas en la zona de los acolchados – ¡Peligro de lesiones!
- No utilice el **PELVI.LOC**[®] PL-3DWP en caso de osteoporosis, huesos de cristal o trastornos graves de la circulación – ¡Peligro de lesiones!
- ¡Asegure el correcto funcionamiento del **PELVI.LOC**[®] PL-3DWP después de limpiarlo!
- Un **PELVI.LOC**[®] PL-3DWP dañado debe cambiarse a la mayor brevedad posible – ¡Peligro de accidente!



Atención:

- El **PELVI.LOC**[®] PL-3DWP no forma parte del sistema de retención para la silla de ruedas o los pasajeros en el transporte en un sistema de transporte de minusválidos.
- En el sentido de la responsabilidad por productos ni el productor ni el distribuidor pueden asumir responsabilidad por los daños o riesgos que se produzcan en relación con el producto por dejar a niños sin supervisión.

Modo de empleo

1. Para utilizar el **PELVI.LOC**[®] PL-3DWP se colocan los acolchados (a) pegados a los muslos.



Atención: ¡Preste atención a que no haya ningún objeto bajo el acolchado! De este modo evitará dolorosos puntos de presión.

2. Después, pase la banda dentada (b) por el trinquete correspondiente. Para ello, accione la hebilla de trinquete (e) correspondiente.
3. A continuación, tense la banda dentada (b) hasta que quede solo hueco para una mano abierta entre el muslo y el acolchado.
4. ¡Asegúrese de que los pestillos (c) agarren los dientes de la banda dentada!
 - ¡Haga una prueba de tracción!

Si el sistema de posicionamiento **PELVI.LOC**[®] PL-3DWP se suelta de forma no deseada al usarse, puede solucionarlo volviéndolo a tensar.

Para abrir el **PELVI.LOC[®] PL-3DWP**, accione el pestillo (c) y saque la banda dentada.

- ¡Preste atención a que los acolchados no queden atrapados entre los radios de la rueda de accionamiento!

Limpieza y desinfección

- Desinfectar frotándolo con ISOPROPANOL 70%
- ¡No utilice disolventes como la acetona o la bencina!

Mantenimiento

Deben comprobarse periódicamente los daños y el funcionamiento del **PELVI.LOC**[®] PL-3DWP.

Reparaciones

Cambie los **PELVI.LOC**[®] defectuosos de inmediato.

Desechamiento

- El embalaje del dispositivo puede llevarse a un punto de reciclaje de materiales r
- Las piezas de metal pueden llevarse a un punto de reciclaje de metales usados.
- Las piezas de plástico pueden llevarse a un punto de reciclaje de plásticos.
- El desechar debe efectuarse en conformidad con las correspondientes disposiciones legales nacionales.
- Pregunte por empresas de desechar locales a su administración municipal.



Datos técnicos

	XS	S	M	L
Ancho del asiento (cm)	16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46
Tamaño del acolchado (cm)	18 x 11	20 x 12	23 x 13,5	27,0 x 13,5
Peso (g)	200	220	260	320
Punto de rotura (a aprox. kg)	60	60	80	80

Banda dentada tam. XS - S	1,9 x 0,2 x 17,0 cm
Banda dentada tam. M - L	2,4 x 0,2 x 17,0 cm
Material	EVA cerrado poroso

Producto
libre de látex



Garantía

Asumimos responsabilidad por este producto en conformidad con las disposiciones legales. Esta se extiende a fallos en los materiales y en el procesamiento. De aquí quedan excluidas las piezas de desgaste y las piezas/módulos sujetos a un desgaste conforme a lo previsto, así como los daños derivados de esfuerzos excesivos, «usos no conformes a lo previsto», daños por aplicar demasiada fuerza o modificaciones/repares no permitidas. Si se produce un caso de garantía, diríjase a su vendedor especializado al que haya comprado este producto.

Por motivos de responsabilidad por productos, los trabajos de reparación, revisión y mantenimiento solo pueden ser llevados a cabo por vendedores especializados autorizados, utilizando recambios originales.



Fabricante:

A2J GmbH
Am Fuchsberg 13
D-87452 Altusried
Tel.: +49 (08373) 987269
Fax: +49 (08373) 987276
Correo electrónico: info@a2j-intl.com
Internet: www.a2j-intl.com



Este producto se halla conforme con los requisitos básicos de la Directiva CE 93/42/CEE sobre productos médicos.