



PELVI.LOC® PL-RR - XS - S - M - L - XL



För att säkerställa säker användning av denna produkt, läs och följ denna monterings- och bruksanvisning innan du använder den för första gången



Användningsområde

PELVI.LOC® PL-RR vristrem används för personer med begränsad mobilitet, speciellt för fotpositionering på fotskålar och fotstöd och förhindrar att de glider framåt.

Avsedd patientgrupp:

- Barn, ungdomar och vuxna
- Könneutral

Mottagningskontroll

Packa upp produkten helt och kontrollera att försändelsen är komplett och inte har transportskador. Om du mot förmodan upptäcker att försändelsen innehåller ett fel:

1. Reklamera omedelbart hos transportören
2. Registrera skadan/felet
3. Informera oss eller din fackhandlare omedelbart

Leveransomfattning

- 1) 1 x **PELVI.LOC®** PL-RR vristband -XS, -S, -M, -L, -XL förmonterad (par)
- 2) 1 x påbyggnads-set för fotplattor
- 3) 1 x information om online-nedladdning av monterings- och bruksanvisningen

Kombination av medicintekniska produkter

Lämplig för hjälpmedel avsedda för användning av vristbandet

Montering



Monteringen ska utföras av en person med specialistkunskaper

1. Placera dynorna (a) i fotens vristområde. – Kuggremmen (b) fästs på fotbrädan med hjälp av påbyggnads-setet.
2. Justera avståndet mellan dynorna med hjälp av påbyggnads-setet (d).
3. Vristbandet dras åt genom att man trycker på spärrhakespännena (e).
4. Vristbandet lossas genom att man trycker på knappen (f).
5. Spänn kuggremmen (b) så att foten trycks mot fotbrädan
6. Vid behov kan ändarna på kuggremmen kapas till halvrunda längder. Grada vid behov ändarna på den kapade kuggremmen. – Skaderisk!
7. Kontrollera att kuggremmen sitter ordentligt och är låst på båda sidor!

8. Kontrollera att kuggremmen sitter ordentligt och är låst på båda sidor!



Bruksanvisning



Säkerhetsanvisningar

Trots den stabila konstruktionen utsätts komponenter som påbyggnads-set, kuggremmar och dynor för ett visst mått av slitage. Det rekommenderas därför att **PELVI.LOC**[®] kontrolleras noggrant var tredje månad. Det är också viktigt att se till att nit- och skruvförband sitter fast ordentligt!

- Se innan användning till att produkten är i ett användbart skick och sitter korrekt - olycksrisk!
- Fäst respektive limma inte skadade komponenter som band, kuggrem (b) eller dyna (a) och sätt tillbaka dem - olycksrisk!
- Lyft inte rullstolen över **PELVI.LOC**[®] - Olycksfallsrisk!

Användningsrestriktioner / oönskade biverkningar

- Använd inte **PELVI.LOC**[®] om det finns tryckpunkter, sår eller andra oläkta skador i området kring dynan - skaderisk!
- Använd inte **PELVI.LOC**[®] vid benskörhet, osteogenesis imperfecta eller svåra cirkulationsproblem - skaderisk!
- Säkerställ efter rengöring att **PELVI.LOC**[®] fungerar korrekt!
- En skadad **PELVI.LOC**[®] måste absolut förnyas – Olycksrisk!



Observera:

- **PELVI.LOC**[®] är inte en del av fasthållningssystemet för rullstolen och/eller passagerare vid transport i ett handikappttransportfordon.
- Varken producenten eller distributören kan hållas ansvariga vad gäller produktansvar för skador eller risker som orsakats av oövervakade barn i samband med produkten!

Användning

1. För att använda **PELVI.LOC**[®] läggs dynorna (a) på vristen



Observera: Se till att inga föremål befinner sig under dynan! På så sätt undviker du smärtsamma tryckpunkter.

2. För sedan kuggremmen (b) genom respektive spärrhake. För att göra detta, tryck på motsvarande spärrhakespänne (e).
3. Spänn sedan kuggremmen (b) så långt att foten trycks mot fotbrädan (lätt kontakt)

Om positioneringssystemet oavsiktligt lossnar när **PELVI.LOC**[®] används, kan detta åtgärdas genom att man drar åt igen.

För att öppna **PELVI.LOC[®]** tryck på snäppet (c) och dra ut kuggremmen.

- Se till att dynorna inte hamnar mellan ekrarna på drivhjulet!

Rengöring och desinfektion

- Lämplig för tvättmaskin upp till 40 grader.
- Kemotermisk desinfektion möjlig genom tillägg av ELTRA 40 i tvättcykeln
- Centrifugera ej
- Inte lämplig för torktumlaren

Underhåll

PELVI.LOC[®] måste kontrolleras regelbundet avseende skador och funktion.

Reparationer

Byt omedelbart ut defekt **PELVI.LOC**[®].

Avfallshantering

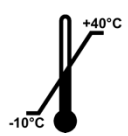
- Enhetens förpackning kan återvinnas.
- Metalldelarna kan läggas i metallåtervinningen.
- Plastdelarna kan läggas i plaståtervinningen.
- Avfallshantering måste utföras i enlighet med respektive nationella lagstadgade bestämmelser.
- Fråga din kommun om lokala avfallshanteringsföretag.

Tekniska data

PL-RR	XS	S	M	L	XL
Dynstorlek (cm)	17,5 x 5	17,5 x 5	25,5 x 8	25,5 x 8	24 x 7
Totallängd (cm) minimal	19	20	24	24	29
Totallängd (cm) maximal	27	27	31	36	51
Kuggrem	R-14-GO-110	R-24-BL-170	R-24-BL-195	R-24-BL-225	R-24-BL-225
Spänne	B-14-GO-BL	B-24-LU-JU	B-24-LU-JU	B-24-LU-JU	B-24-LU-JU

PL-RR-GO	S	M	Produkten är latexfri  
Dynstorlek (cm)	17,5 x 5	25,5 x 8	
Totallängd (cm) minimal	20	24	
Totallängd (cm) maximal	27	31	
Kuggrem	R-19-GO-BL-350	R-19-GO-BL-350	
Spänne	B-19-GO-BL	B-19-GO-BL	

Förvarings- och transportvillkor

	Temperaturintervall vid långtidsförvaring från -10 °C till +40 °C. Kortvariga temperaturopppar, t.ex. under transport, från -20 °C till +60 °C tolereras väl av materialet och påverkar inte produktens säkerhet och prestanda.
	Skydda mot fukt under förvaring och transport

Garanti

Vi lämnar en garanti för denna produkt i enlighet med lagstadgade regler. Denna omfattar material- och tillverkningsfel. Undantagna är slitdelar och delar/komponenter som utsätts för normalt slitage samt skador som uppstår till följd av överbelastning, "ej avsedd användning", våldsamma skador eller otillåtna ändringar/reparationer. Vid garantianspråk, kontakta den återförsäljare som sålde produkten. Reparationer får endast utföras med originalreservdelar och av personal med lämplig utbildning och/eller erfarenhet.



Tillverkare:

A2J GmbH

Am Fuchsberg 13

D-87452 Altusried

Tfn: +49 (08373) 987269

Fax: +49 (8373) 987276

eMail: info@a2j-intl.com

Internet: www.a2j-intl.com

Version 01.01.2025



Denna produkt är kompatibel med de grundläggande kraven i EU-förordning 2017/745 om medicinsk utrustning - Förordningen om medicintekniska produkter (MDR)

Med reservation för tekniska ändringar