




PELVI.Loc

TL-3DSR -XS-S-M-L / TL-W -S-M-L-XL

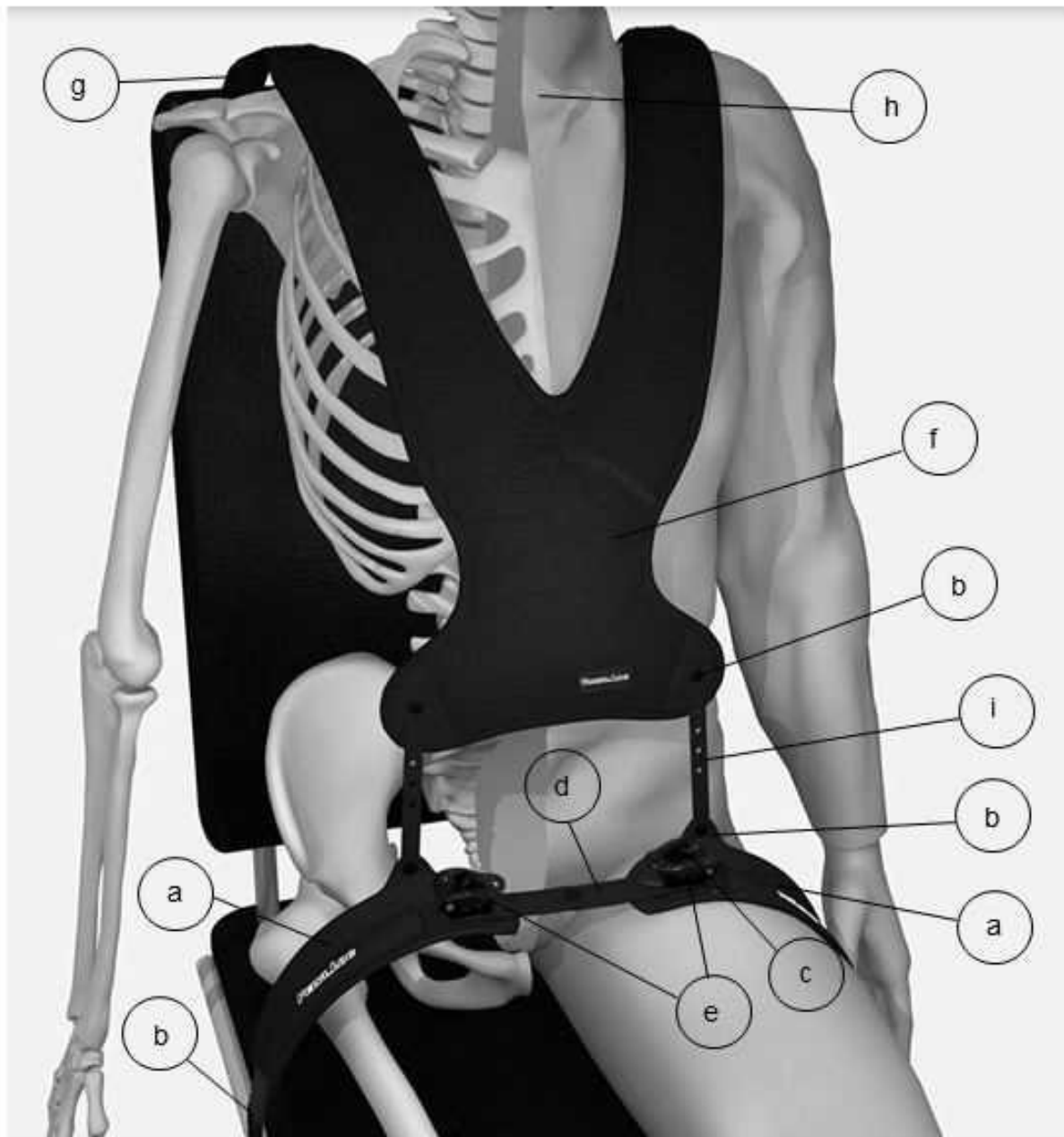

För att säkerställa säker användning av denna produkt, läs och följ denna monterings- och bruksanvisning innan du använder den för första gången

Användningsområde

Denna Torso.Loc TL-3DSR i samband med TL-W används för bättre positionering och bäckenindragning för personer med begränsad mobilitet på en sits t.ex. rullstol, sätesdel, terapistol, reha buggy

Avsedd patientgrupp:

- Barn, ungdomar och vuxna
- Kön: män och kvinnor

Mottagningskontroll

Packa upp produkten helt och kontrollera att försändelsen är komplett och inte har transportskador. Om du mot förmodan upptäcker att försändelsen innehåller ett fel:

1. Reklamera omedelbart hos transportören
2. Registrera skadan/felet
3. Informera oss eller din fackhandlare omedelbart

Leveransomfattning

- 1) 1 x TL-3DSR ej förmonterad
- 2) 1 x TL-W ej förmonterad
- 3) 1 x information om online-nedladdning av monterings- och bruksanvisningen /anvisning

Kombination av medicintekniska produkter

Lämplig för hjälpmedel avsedda för användning av bäckenindragningsbälte i kombination med en överkroppspositioneringsväst.



Avsedd användning

Denna Torso.Loc TL-3DSR i kombination med Torso.Loc TL-W är speciellt designad för personer med begränsad mobilitet för bäcken-lårpositionering och överkroppspositionering, vilket förhindrar att bäckenet glider framåt och överkroppen från att tippa framåt.



Montering

- Monteringen ska utföras av en person med specialistkunskaper
- 1. Placera dynorna (a) i lårområdet. – Kuggremmen (b) fästs på rullstolen.
 - Logotypen på dynan kan då läsas framifrån!
- 2. Ställ in avståndet mellan dynorna med hålremmen (d).
Bäckenindragningsbältet dras åt genom att trycka på spärrhakespännena (e).
 - Leden på hålremmen ska då befinna sig mittemellan dynorna.
 - Dra ut kuggremmen maximalt så att två tänder fortfarande är fria bakom varje spärrhakespänne (e).
- 1. Fäst sedan kuggremmen (b) på rullstolens ramrör
(Montering - Följ anvisningarna)
- 2. Spänn kuggremmen (b) lika på båda sidor och så långt att det fortfarande finns plats för en hand mellan lår och dyna.
- 3. Vid behov kan ändarna på kuggremmen kapas till halvrunda längder. Grada vid behov ändarna på den kapade kuggremmen. – Skaderisk!
- 4. Kontrollera att kuggremmen sitter ordentligt och är låst på båda sidor!
- 5. Placera västen (f) på överkroppen. – Bältet (g) fästs på båda sidor på rullstolen (skruvat eller med ett 25 mm klickspänne)
 - Logotypen på dynan kan då läsas framifrån!
- 6. Justera avståndet mellan neoprenvästen och halsen (h) med hjälp av bältet (g) så att det inte finns någon risk för strypning.
- 7. Skruva ihop de två perforerade bältena (i) med TL-3DSR och TL-W. Skär vid behov av hålremmens utskjutning.
Genom att justera hålremmarna (i) dras neoprenvästen åt.
 - Neoprenvästen ska anpassa sig efter kroppens konturer.
- 8. Dra åt något och positionera neoprenvästen med hjälp av bältet (g).
- 9. Spänn axelbandet (g) lika på båda sidor och så långt att det fortfarande finns plats för en hand mellan hals och dyna (risk för rodnad på huden)
- 10. Vid behov kan ändarna på bältet (g) kapas



Bruksanvisning



Säkerhetsanvisningar

Trots de stabila konstruktionerna utsätts komponenter som hålbälten, bälten, kuggremmar och dynor för ett visst mått av slitage. Därför rekommenderas det att kontrollera Torso.Loc grundligt var 6:e månad. Det är också viktigt att se till att nit- och skruvförband sitter fast ordentligt!

- Se innan användning till att produkten är i ett användbart skick och sitter korrekt. - Olycksrisk!
- Fäst respektive limma inte skadade komponenter som band/hårem (i), kuggrem (b) eller dyna (a) väst (f) och sätt tillbaka dem - olycksrisk!
- Sitt inte på dynorna! Risk för tryckpunkter, speciellt från spärrhakarna (e)!
- Lyft inte rullstolen över Torso.Loc. Olycksrisk!
- Se till att händerna inte fastnar mellan hålbälte och ram- eller sittrör. Klämrisk!

Användningsrestriktioner / oönskade biverkningar

- Använd inte Torso.Loc om det finns tryckpunkter,
- sår eller andra oläkta skador i området kring dynan - skaderisk!
- Använd inte Torso.Loc vid benskörhet, osteogenesis imperfecta eller svåra cirkulationsproblem - skaderisk!
- Kontrollera efter rengöring att Torso.Loc fungerar korrekt!
 - En skadad Torso.Loc bör bytas ut omedelbart. – Olycksrisk!



Observera:

Der Torso.Loc är inte en del av fasthållningssystemet för rullstolen och/eller passagerare vid transport i ett handikapptransportfordon.

- Varken producenten eller distributören kan hållas ansvariga vad gäller produktansvar för skador eller risker som orsakats av oövervakade barn i samband med produkten!

Användning

1. För att använda Torso.Loc läggs dynorna (a) på låren



Observera:

Se till att inga föremål befinner sig under dynan! På så sätt undviker du smärtsamma tryckpunkter.

2. För sedan kuggremmen (b) genom respektive spärrhake. För att göra detta, tryck på motsvarande spärrhakespänne (e).
3. Spänn sedan kuggremmen (b) så långt att det fortfarande finns plats för en hand mellan lår och dyna.
4. Se till att snäppet griper in i kuggremmens tänder!
 - Gör ett dragprov!

För att öppna Torso.Loc tryck på snäppet (c) och dra ut kuggremmen.

- Se till att dynorna inte hamnar mellan ekrarna på drivhjulet!

Rengöring och desinfektion

- Lämplig för tvättmaskin upp till 40 grader.
- Kemotermisk desinfektion möjlig genom tillägg av ELTRA 40 i tvättcykeln
- Centrifugera ej
- Inte lämplig för torktummlaren

Underhåll

Torso.Loc ska regelbundet kontrolleras med avseende på skador och funktion.

Reparationer

Byt omedelbart ut defekt Torso.Loc.

Avfallshantering

- Enhetens förpackning kan återvinnas.
- Metalldelarna kan läggas i metallåtervinningen.
- Plastdelarna kan läggas i plaståtervinningen.
- Avfallshantering måste utföras i enlighet med respektive nationella lagstadgade bestämmelser.
- Fråga din kommun om lokala avfallshanteringsföretag.

Tekniska data TL-3DSR

Sitsbredd:	XS	16 till 24 cm
Dynstorlek:	XS	18 x 7 cm
Vikt:	XS	Ca 220 g
Brytpunkt:	XS	vid ca 60 kg

Sitsbredd:	S	20 till 32 cm
Dynstorlek:	S	21 x 8 cm
Vikt:	S	Ca 220 g
Brytpunkt:	S	vid ca 60 kg


Sitsbredd:	M	30 till 40 cm
Dynstorlek:	M	25,5 x 8 cm
Vikt:	M	Ca 280 g
Brytpunkt:	M	vid ca 80 kg

Sitsbredd:	L	36 till 46 cm
Dynstorlek:	L	26,5 x 8,5 cm
Vikt:	L	Ca 280 g
Brytpunkt:	L	vid ca 80 kg

Kuggrem strl: XS-S	1,9 x 0,2 x 40 cm
Kuggrem strl: M-L	2,4 x 0,2 x 40 cm

Tekniska data TL-W


Art.nr	A	B	C	D	E	F
TL-W-S	31	22	12	16	4	12
TL-W-M	38	29	16	19	5	13
TL-W-L	47	37	19	22	6	14
TL-W-XL	55	45	24	26	6,5	17

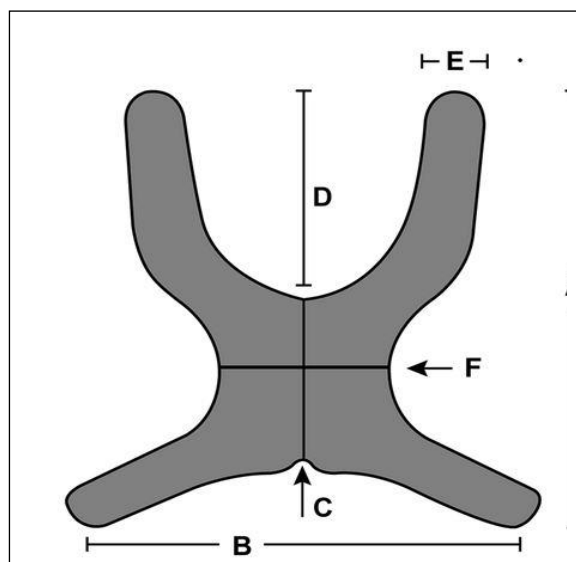

Produkten är latexfri



Förvarings- och transportvillkor

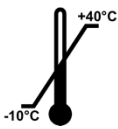	Temperaturintervall vid långtidsförvaring från -10 °C till +40 °C. Kortvariga temperaturtoppar, t.ex. under transport, från -20 °C till +60 °C tolereras väl av materialet och påverkar inte produktens säkerhet och prestanda.
	Skydda mot fukt under förvaring och transport

Garanti

Vi lämnar en garanti för denna produkt i enlighet med lagstadgade regler. Denna omfattar material- och tillverkningsfel. Undantagna är slitdelar och delar/komponenter som utsätts för normalt slitage samt skador som uppstår till följd av överbelastning, "ej avsedd användning", våldsamma skador eller otillåtna ändringar/reparationer. Vid garantianspråk, kontakta den återförsäljare som sålde produkten. Reparationer får endast utföras med originalreservdelar och av personal med lämplig utbildning och/eller erfarenhet.



Tillverkare:

A2J GmbH

Am Fuchsberg 13

D-87452 Altusried

Tfn: +49 (08373) 987269

Fax: +49 (8373) 987276

eMail: info@a2j-intl.com

Internet: www.a2j-intl.com



Denna produkt är kompatibel med de grundläggande kraven i EU-förordning 2017/745 om medicinsk utrustning - Förordningen om medicintekniska produkter (MDR)

Version 01.01.2025

Med reservation för tekniska ändringar