




PELVI.LOC® PL-2DS -XS, -S, -M, -L



Pro bezpečné použití tohoto výrobku si přečtěte a před prvním použitím prosím dbejte návodu k montáži a použití.

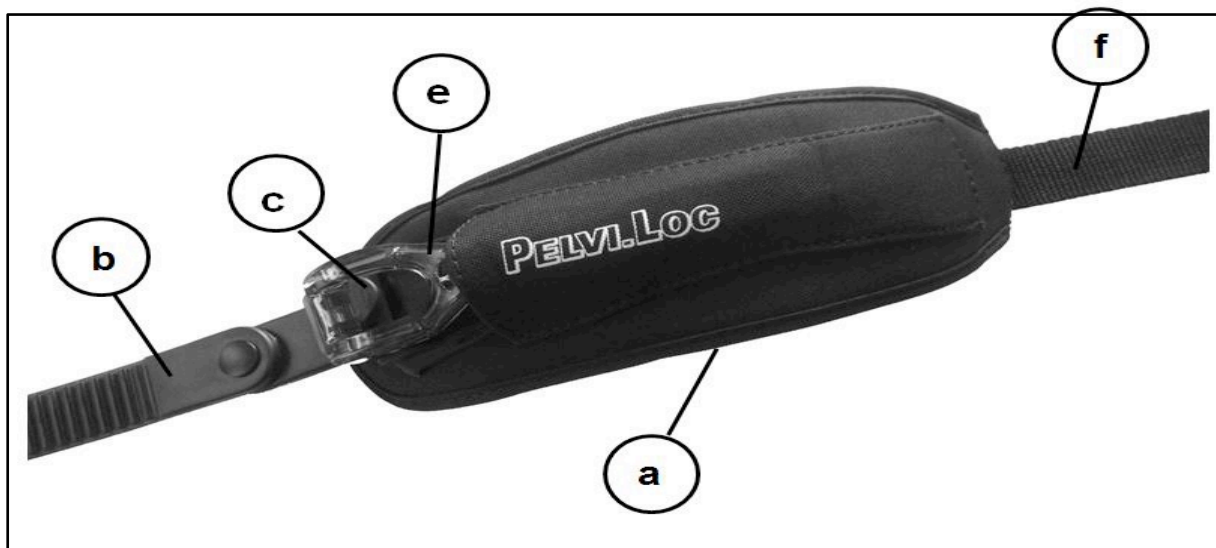

Oblast použití

PELVI.LOC® PL-2DS slouží osobám s omezenou mobilitou, zvláště pro polohování stehen v invalidním vozíku a aktivním invalidním vozíku a brání sklouznutí dopředu.

Určená skupina pacientů:

- děti, mládež a dospělé osoby
- pohlaví: ženské a mužské

Kontrola při převzetí

Výrobek kompletně rozbalte a zásilku zkontrolujte z hlediska úplnosti a poškození při přepravě. Pokud byste zjistili, že zásilka oproti očekávání vykazuje vadu, tak:

1. ji okamžitě reklamujte u dopravce
2. nechte škodu / vadu zaznamenat do protokolu
3. okamžitě informujte nás nebo vašeho specializovaného prodejce

Rozsah dodávky

- 1) 1 x **PELVI.LOC®** PL-2DS -XS, -S, -M, -L předmontováno
- 2) 1 x informace k online stažení návodu k montáži a použití

Kombinace zdravotnických výrobků

Vhodné pro pomůcky, které jsou určeny k použití pánevního retrakčního pásu

Montáž



Montáž by měla provést osoba s odbornými znalostmi.

1. Polstrování (a) přiložte ve stehenní oblasti. – Ozubený pás (b) přitom leží nahoře.
 - Logo na polstrování přitom musí být čitelné zepředu!
2. Vzdálenost polstrování nastavte pomocí ozubeného pásu (b) stisknutím spony ráčny (e).
 - Kloub ozubeného pásu by se pak měl nacházet uprostřed mezi polstrováním.
 - Ozubený pás musí být max. natolik vytažený, aby byly ještě dva zuby za každou západkou (c) volné.
 - K nastavení může být povolen suchý zip a polstrování roztaženo (dbejte jen u pásů se zakrytou sponou ráčny).
3. Následně umístíte pás popruhu (f) na trubce rámu invalidního vozíku.
(Dbejte pokynů k montáži)
4. Ozubený pás (b) na obou stranách napněte stejně a natolik, aby bylo mezi stehnem a polstrováním ještě místo na jednu plochu ruky.
5. V případě potřeby mohou být konce ozubeného pásu polokruhově zkráceny. Z konce zkráceného ozubeného pásu odstraňte případné otřepy. – nebezpečí poranění!
6. Zkontrolujte pevné umístění a aretaci na obou stranách ozubeného pásu!



Návod k použití



Bezpečnostní pokyny

I přes stabilní konstrukci podléhají konstrukční díly, jako jsou pásy popruhu, ozubené pásy a polstrování určitému opotřebení. Proto doporučujeme každé 3 měsíce **PELVI.LOC®** důkladně kontrolovat. Dbejte přitom také na dotažení nýtovaných a šroubovaných spojů!

- Před použitím se přesvědčte o stavu vhodném k použití a správné poloze výrobku - nebezpečí nehody!
- Poškozené konstrukční díly, jako např. pás popruhu (f), ozubený pás (b) nebo polstrování (a) neopravujte záplatami, resp. nelepte a opět nepoužívejte - nebezpečí nehody!
- Na polstrování si nesedejte - nebezpečí otlacených míst především vlivem ráčen (e)!
- Invalidní vozík nezvedejte za **PELVI.LOC®** - nebezpečí nehody!
- Dbejte přitom na to, abyste nedávali ruce mezi pás popruhu a trubku rámu nebo sedadla - nebezpečí přimáčknutí!

Omezení použití / nežádoucí vedlejší účinky

- **PELVI.LOC®** nepoužívejte, když se v oblasti polstrování vyskytují otlacená místa, trhliny nebo jiná poranění - nebezpečí poranění!
- **PELVI.LOC®** nepoužívejte v případě osteoporózy, řídnutí kostí nebo silného prokrvování - nebezpečí poranění!
- Po vyčištění zajistěte správnou funkci **PELVI.LOC®**!
- Poškozený **PELVI.LOC®** by měl být okamžitě vyměněn - nebezpečí nehody!

**Pozor:**

- **PELVI.LOC®** není součástí zadržného systému pro invalidní vozíky a/nebo cestující při přepravě ve vozidle pro přepravu postižených osob.
- Výrobce ani distributor nemohou být ve smyslu zodpovědnosti za výrobek zodpovědní za škody nebo rizika, která budou způsobena v souvislosti s výrobkem dětmi, které nejsou pod dohledem!

Použití

1. K použití **PELVI.LOC®** se polstrování (a) pokládá na stehna.



Pozor: Dbejte na to, aby se pod polstrováním nenacházely žádné předměty! Zabráníte tak bolestivým otlakům.

2. **Důležité:** Nepřikládejte na pánev nebo rozštěp!
 3. Poté ozubený pás (b) vedte skrz příslušnou ráčnu. Pro tento účel stiskněte příslušnou sponu ráčny (e).
 4. Následně ozubený pás (b) napněte natolik, aby bylo mezi stehnem a polstrováním ještě místo na jednu plochu ruky.
 5. Zajistěte, aby západky (e) zasahovaly do zubů ozubeného pásu!
- Provedte zkoušku tahu!

Pokud dojde během používání **PELVI.LOC®** k nechtěnému uvolnění polohovacího systému, pak to může být odstraněno opětovným napnutím.

K otevření **PELVI.LOC® PL-3DWP** stiskněte západku (c) a vytáhněte ozubený pás.

- Dbejte na to, aby se polstrování nedostalo mezi špiče hnacího kola!

Čištění a dezinfekce

- Vhodné k praní v pračce do 40 stupňů.
- Chemicko-tepelná dezinfekce je možná přidáním ELTRA 40 do prací operace.
- Neždímejte.
- Nevhodné do sušičky.

Údržba

PELVI.LOC® pravidelně kontrolujte z hlediska poškození a funkčnosti.

Opravy

Vadný **PELVI.LOC®** okamžitě vyměňte.



Výrobce:

A2J GmbH

Am Fuchsberg 13

D-87452 Altusried

Tel.: +49 (08373) 987269

Fax: +49 (08373) 987276

Email: info@a2j-intl.com

Internet: www.a2j-intl.com

Stav 20.05.2021



Tento výrobek splňuje Základní požadavky ES
Směrnice o zdravotních prostředcích (EU)
2017/745.

Technické změny vyhrazeny