

# PELVI.LOC® PL-2DA Aktiv

PELVI.LOC® PL-2D Oberschenkelgurt

HMV.Nr.: 18.99.99.0905



## Modell

**2D-Gurt für Rollstuhlfahrer – der Gurt für den höheren Anspruch.**

Die vergrößerten Oberschenkel-Pelotten sorgen auch bei hoher Zugkraft, z.B. durch sportliche Betätigung, für eine optimale Druckverteilung und Stabilität im Sitz. Die Lochriemen am Rahmen sind bis zu 6 cm in der Länge verstellbar und gewähren so situationsangepassten variablen Spielraum.

## Ausführung

Anwendungsbeispiel Rollstuhlbasketball:

- **PL-2DA-M** als Oberschenkel-Gurt



## Zusatzartikel

Rohrschellen zur Befestigung des Gurtes am Rollstuhlrahmen in folgenden Durchmessern lieferbar:

### Artikelnummern

- RS-20:** Rohrdurchmesser 20 mm
- RS-22:** Rohrdurchmesser 22 mm
- RS-25:** Rohrdurchmesser 25 mm
- RS-30:** Rohrdurchmesser 30 mm
- RS-32:** Rohrdurchmesser 32 mm



## Anwendungsbereich

- Sicheres Fahren mit der 2D-Becken-Positionierung im Rollstuhl.
- Als Thorax-Positionierung im Stehgerät einsetzbar.
- Becken-Positionierung mit Druckverteilung und Stabilität im Sport-Rollstuhl.

## Besondere Merkmale

Die im Polster verdeckten Ratschenschnallen verhindern das unbeabsichtigte Öffnen des Gurtes und bieten einen Schutz gegen Verletzungen, verursacht durch unkontrollierte Bewegungen.

### Artikelnummern

- PL-2DA-S** für SB 20-32 cm
- PL-2DA-M** für SB 30-40 cm
- PL-2DA-L** für SB 36-46 cm

## Technische Daten

	XXXS Bambino	XXS	XS	S	M	L	XL
Sitzbreite (cm)				20 - 32	30 - 40	36 - 46	
Polstergröße (cm)				19 x 11	23 x 12	28 x 14	
Gewicht (g)				220	280	280	
Sollbruchstelle (bei ca. kg)				60	80	80	

Zahnband Gr. XXXS - XXS		Produkt ist latexfrei 	
Zahnband Gr. XS - S	2,4 x 0,2 x 17,0 cm		
Zahnband Gr. M - L - XL	2,4 x 0,2 x 17,0 cm		
Ratschenschnalle Gr. XXXS			
Ratschenschnalle Gr. XXS			
Ratschenschnalle Gr. XS - S	B-24-FLAT-LO-BL		
Ratschenschnalle Gr. M - L - XL	B-24-ERGO-BL		
Lochriemen	LR-BL-320		

# PELVI.LOC® PL-2DAS Aktiv für Sitzschalen

PELVI.LOC® PL-2D Oberschenkelgurte

HMV.Nr.: 26.99.02.2000



## Modell

**2D-Gurt für Rollstuhlfahrer - der Gurt für den höheren Anspruch, zur Montage an Sitzschalen.**

Die vergrößerten Oberschenkel-Pelotten sorgen auch bei hoher Zugkraft, z.B. durch sportliche Betätigung, für eine optimale Druckverteilung und Stabilität im Sitz.

## Ausführung


Anwendungsbeispiel Rollstuhlbasketball:  
Nationalmannschaft, Bild von EM Frankfurt 2013



## Zusatzartikel

Befestigungs-Sets für Sitzschalen-Gurte zur Befestigung an der Sitz-Schale oder am Rollstuhl.

Artikelnummer  
PB-BL-53

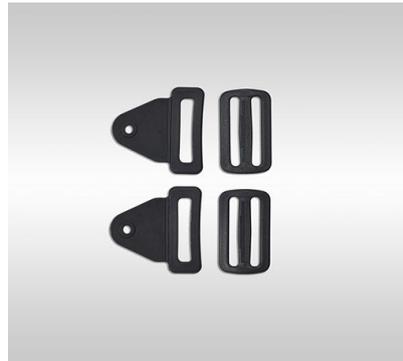

## Anwendungsbereich

- Sicherheit mit der 2D-Becken-Positionierung in der Sitzschale
- Als Thorax-Positionierung im Stehständer und Sportgerät einsetzbar.

## Besondere Merkmale

Die im Polster verdeckten Ratschenschnallen verhindern das unbeabsichtigte Öffnen des Gurtes und bieten einen Schutz gegen Verletzungen, verursacht durch unkontrollierte Bewegungen.

Ein Nylongurt dient der Befestigung und wird durch die Sitzschale geführt.

Die facettenartige Ausdünnung des Polstermaterials im Übergang von den Oberschenkel-Pelotten zum Befestigungsgurt verhindert seitliche Druckstellen am Oberschenkel.

Der Befestigungsgurt in 50mm Breite ist extrem belastbar. Auch in der Extremsituation für optimale Sicherheit.

## Artikelnummern

- PL-2DAS-S** für SB 20-32 cm
- PL-2DAS-M** für SB 30-40 cm
- PL-2DAS-L** für SB 36-46 cm

## Technische Daten

	XXXS Bambino	XXS	XS	S	M	L	XL
Sitzbreite (cm)				20 - 32	30 - 40	36 - 46	
Polstergröße (cm)				19 x 11	23 x 12	28 x 14	
Gewicht (g)				220	280	280	
Sollbruchstelle (bei ca. kg)				60	80	80	

Zahnband Gr. XXXS - XXS		Produkt ist latexfrei 	
Zahnband Gr. XS - S	2,4 x 0,2 x 17,0 cm		
Zahnband Gr. M - L - XL	2,4 x 0,2 x 17,0 cm		
Ratschenschnalle Gr. XXXS			
Ratschenschnalle Gr. XXS			
Ratschenschnalle Gr. XS - S	B-24-FLAT-LO-BL		
Ratschenschnalle Gr. M - L - XL	B-24-ERGO-BL		
Lochriemen	LR-BL-320		

# PELVI.LOC® PL-2DB

PELVI.LOC® PL-2D Oberschenkelgürte

HMV.Nr.: 18.99.99.0905



## Modell

### 2D-Gurt für Rollstuhlfahrer - leichtes Anlegen am Oberschenkel für große Sicherheit

Mit einfach zu bedienenden Ratschen-Schnallen wird der Gurt am Rahmen befestigt. Die Lochriemen am Rahmen sind bis zu 6cm in der Länge verstellbar und gewähren so situationsangepassten variablen Spielraum.

Zur Sicherung des Rollstuhlfahrers werden die Oberschenkel-Pelotten in der Mitte über einen Zahnriemen verbunden, der zur Sicherheit zusätzlich in einer Lasche geführt wird, um Verletzungen zu vermeiden.

## Ausführung

### Langlaufschlitten mit:

- **PL-3DSRR-M** 3D-Schale Reverso mit gedrehtem Zahnriemen und Lochriemen-Set
- **PL-2DB-XS** Oberschenkel-Gurt vorne




## Zusatzartikel

Rohrschellen zur Befestigung des Gurtes am Rollstuhlrahmen in folgenden Durchmessern lieferbar:

### Artikelnummern

- RS-20:** Rohrdurchmesser 20 mm
- RS-22:** Rohrdurchmesser 22 mm
- RS-25:** Rohrdurchmesser 25 mm
- RS-30:** Rohrdurchmesser 30 mm
- RS-32:** Rohrdurchmesser 32 mm

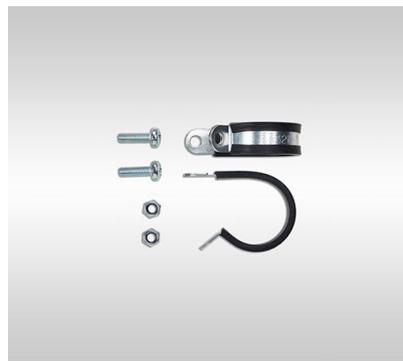

## Anwendungsbereich

- Sicheres Fahren mit der 2D-Becken-Positionierung im Rollstuhl und Aktiv-Rollstuhl.
- Auch als Thoraxpositionierung im Stehgerät einsetzbar.

### Artikelnummern

- PL-2DB-XXS** für SB 12-20 cm
- PL-2DB-XS** für SB 16-24 cm
- PL-2DB-S** für SB 20-32 cm
- PL-2DB-M** für SB 30-40 cm
- PL-2DB-L** für SB 36-46 cm
- PL-2DB-XL** für SB 44-52 cm



## Technische Daten

	XXXS Bambino	XXS	XS	S	M	L	XL
Sitzbreite (cm)		12 - 20	16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46	44 - 52
Polstergröße (cm)		12 x 7	17 x 7	20 x 7	22 x 8	25,5 x 8	28,5 x 9
Gewicht (g)		200	220	220	280	280	280
Sollbruchstelle (bei ca. kg)		40	60	60	80	80	8

Zahnband Gr. XXS	1,4 x 0,2 x 14,0 cm	Produkt ist latexfrei 	 LIZENZIERTER PARTNER REG. NR. DE5914274696739-V
Zahnband Gr. XS - S	1,9 x 0,2 x 17,0 cm		
Zahnband Gr. M - L - XL	2,4 x 0,2 x 17,0 cm		
Ratschenschnalle Gr. XXXS	B-14-STAR-BL		
Ratschenschnalle Gr. XXS	B-14-GO-BL		
Ratschenschnalle Gr. XS - S	B-19-ERGO-BL		
Ratschenschnalle Gr. M - L - XL	B-24-ERGO-BL		

# PELVI.LOC® PL-2DS Schale

PELVI.LOC® PL-2D Oberschenkelgurte

HMV.Nr.: 18.99.99.0905



## Model


**2D-Gurt für Rollstuhlfahrer - leichtes Anlegen am Oberschenkel für große Sicherheit.**

Mit einfach zu bedienenden Ratschen-Schnallen wird die Passform des Gurtes eingestellt. Zur Sicherung des Rollstuhlfahrers werden die Oberschenkel-Pelotten in der Mitte über einen Zahnriemen verbunden, der zur Sicherheit zusätzlich in einer Lasche geführt wird, um Verletzungen zu vermeiden. Ein Gurtband ist in den Größen XS, S, M und L erhältlich.

## Zusatzartikel

Befestigungs-Sets für Sitzschalen-Gurte zur Befestigung an der Sitz-Schale oder am Rollstuhl.

Artikelnummer  
**PB-BL-38**

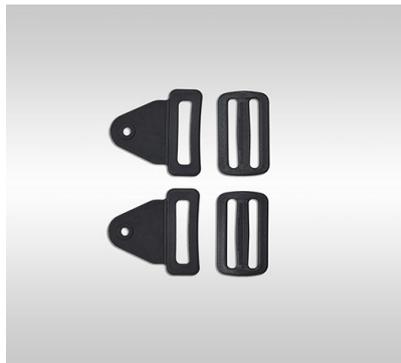

## Anwendungsbereich

- Sicheres Fahren mit der 2D-Becken-Positionierung im Rollstuhl und Aktiv-Rollstuhl.
- Auch als Thoraxpositionierung im Stehgerät einsetzbar.

### Artikelnummern

**PL-2DS-XS** für SB 16-24 cm  
**PL-2DS-S** für SB 20-32 cm  
**PL-2DS-M** für SB 30-40 cm  
**PL-2DS-L** für SB 36-46 cm

## Technische Daten

	XXXS Bambino	XXS	XS	S	M	L	XL
Sitzbreite (cm)			16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46	
Polstergröße (cm)			17 x 7	20 x 7	22 x 8	25,5 x 8	
Gewicht (g)			220	220	280	280	
Sollbruchstelle (bei ca. kg)			60	60	80	80	

Zahnband Gr. XXXS - XXS		Produkt ist latexfrei 	 LIZENZIERTER PARTNER REG. NR. DE 55142/74696739-V
Zahnband Gr. XS - S	1,9 x 0,2 x 17,0 cm		
Zahnband Gr. M - L - XL	2,4 x 0,2 x 17,0 cm		
Ratschenschnalle Gr. XXXS			
Ratschenschnalle Gr. XXS			
Ratschenschnalle Gr. XS - S	B-19-ERGO-BL		
Ratschenschnalle Gr. M - L - XL	B-24-ERGO-BL		

# PELVI.LOC® PL-3DA Aktiv

PELVI.LOC® PL-3D Beckengurte

HMV.Nr.: 26.99.02.2000



## Modell

### Becken-Retraktions-Gurt

3D-Gurt für Rollstuhlfahrer – der Gurt für den höheren Anspruch. Die großflächigen 3D-Pelotten in anatomischer Form sorgen auch bei hoher Zugkraft, z.B. durch sportliche Betätigung, für eine optimale Druckverteilung und Stabilität im Sitz.

## Zusatzartikel

Rohrschellen zur Befestigung des Gurtes am Rollstuhlrahmen in folgenden Durchmessern lieferbar:

### Artikelnummern

- RS-20:** Rohrdurchmesser 20 mm
- RS-22:** Rohrdurchmesser 22 mm
- RS-25:** Rohrdurchmesser 25 mm
- RS-30:** Rohrdurchmesser 30 mm
- RS-32:** Rohrdurchmesser 32 mm



## Anwendungsbereich

Zur Becken-Positionierung im Rollstuhl.

### Artikelnummern

- PL-3DA-XS** für SB 16-24 cm
- PL-3DA-S** für SB 20-32 cm
- PL-3DA-M** für SB 30-40 cm
- PL-3DA-L** für SB 36-46 cm

## Besondere Merkmale

Der Gurt für hohe Zugkräfte mit 1/3 mehr Pelotten-Fläche als 3D Basic. Mit einfach zu bedienenden Ratschen-Schnallen wird die Passform des Gurtes eingestellt. Die im Polster verdeckten Ratschenschnallen verhindern das unbeabsichtigte Öffnen des Gurtes und bieten einen Schutz gegen Verletzungen, verursacht durch unkontrollierte Bewegungen. Die Becken-Pelotten werden in der Mitte über einen Zahnriemen verbunden, der zur Sicherheit zusätzlich in einer Lasche geführt wird.

## Technische Daten

	XXXS Bambino	XXS	XS	S	M	L	XL
<b>Sitzbreite (cm)</b>			16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46	
<b>Polstergröße (cm)</b>			17,5 x 9	20 x 11	23 x 13	25,5 x 14	
<b>Gewicht (g)</b>			220	220	280	280	
<b>Sollbruchstelle (bei ca. kg)</b>			60	60	80	80	

<b>Zahnband Gr. XXXS - XXS</b>		Produkt ist latexfrei 	 LIZENZIERTER PARTNER REG. NR. DE5914214696739-V
<b>Zahnband Gr. XS - S</b>	1,9 x 0,2 x 17,0 cm		
<b>Zahnband Gr. M - L - XL</b>	2,4 x 0,2 x 17,0 cm		
<b>Ratschenschnalle Gr. XXXS</b>			
<b>Ratschenschnalle Gr. XXS</b>			
<b>Ratschenschnalle Gr. XS - S</b>	B-19-ERGO-BL		
<b>Ratschenschnalle Gr. M - L - XL</b>	B-24-ERGO-BL		
<b>Lochriemen</b>			



# PELVI.LOC® PL-3DASR Aktiv Schale Reverso

PELVI.LOC® PL-3D Beckengurte

HMV.Nr.: 26.99.02.2000



## Modell

### Becken-Retraktions-Gurt für Sitzschalen

Großflächiger 3D-Gurt für Rollstuhlfahrer - der Gurt für den höheren Anspruch, zur Montage an Sitzschalen. Die vergrößerten Oberschenkel-Pelotten sorgen auch bei hoher Zugkraft, z.B. durch sportliche Betätigung, für eine optimale Druckverteilung und Stabilität im Sitz.

## Zusatzartikel

Rohrschellen zur Befestigung des Gurtes am Rollstuhlrahmen in folgenden Durchmessern lieferbar.

### Artikelnummern

- RS-20:** Rohrdurchmesser 20 mm
- RS-22:** Rohrdurchmesser 22 mm
- RS-25:** Rohrdurchmesser 25 mm
- RS-30:** Rohrdurchmesser 30 mm
- RS-32:** Rohrdurchmesser 32 mm



## Anwendungsbereich

Für Sitzschalen zur besseren Becken-Positionierung im Rollstuhl.

## Besondere Merkmale

Der Gurt für hohe Zugkräfte mit 1/3 mehr Pelotten-Fläche als 3D Basic. Mit einfach zu bedienenden Ratschen-Schnallen wird die Passform des Gurtes eingestellt. Die im Polster verdeckten Ratschenschnallen verhindern das unbeabsichtigte Öffnen des Gurtes und bieten einen Schutz gegen Verletzungen, verursacht durch unkontrollierte Bewegungen. Die Becken-Pelotten werden in der Mitte über einen Lochriemen verbunden, der zur Sicherheit zusätzlich in einer Lasche geführt wird.

Die Zahnriemen bleiben seitlich an der Sitzschale befestigt, zum Umsetzen werden nur die Pelotten abgenommen. Die facettenartige Ausdünnung des Polstermaterials im Übergang von der Pelotte zum Zahnriemen verhindert seitliche Druckstellen am Becken.

### Artikelnummern

- PL-3DASR-XS** für SB 16-24 cm
- PL-3DASR-S** für SB 20-32 cm
- PL-3DASR-M** für SB 30-40 cm
- PL-3DASR-L** für SB 36-46 cm

## Technische Daten

	XXXS Bambino	XXS	XS	S	M	L	XL
Sitzbreite (cm)			16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46	
Polstergröße (cm)			17,5 x 9	20 x 11	23 x 13	25,5 x 14	
Gewicht (g)			220	220	280	280	
Sollbruchstelle (bei ca. kg)			60	60	80	80	

Zahnband Gr. XXXS - XXS		Produkt ist latexfrei		
Zahnband Gr. XS - S	1,9 x 0,2 x 40,0 cm			
Zahnband Gr. M - L - XL	2,4 x 0,2 x 40,0 cm			
Ratschenschnalle Gr. XXXS				
Ratschenschnalle Gr. XXS				
Ratschenschnalle Gr. XS - S	B-19-ERGO-BL			
Ratschenschnalle Gr. M - L - XL	B-24-ERGO-BL			
Lochriemen				

# PELVI.LOC® PL-3DB Basic

PELVI.LOC® PL-3D Beckengurte

HMV.Nr.: 26.99.02.2000



## Modell

### Becken-Retraktions-Gurt


Die Becken-Pelotten sind 3-dimensional geformt zur optimalen Fixierung des Beckens ohne Druck auf die Spina anterior superior. Mit einfach zu bedienenden Ratschen-Schnallen wird die Passform des Gurtes eingestellt. Die Lochriemen am Rahmen sind bis zu 6 cm in der Länge verstellbar und gewähren so situationsangepassten variablen Spielraum. Zur Sicherung des Rollstuhlfahrers werden die Becken-Pelotten in der Mitte über einen Zahnriemen verbunden.

## Zusatzartikel

Rohrschellen zur Befestigung des Gurtes am Rollstuhlrahmen in folgenden Durchmessern lieferbar.

### Artikelnummern

- RS-20:** Rohrdurchmesser 20 mm
- RS-22:** Rohrdurchmesser 22 mm
- RS-25:** Rohrdurchmesser 25 mm
- RS-30:** Rohrdurchmesser 30 mm
- RS-32:** Rohrdurchmesser 32 mm

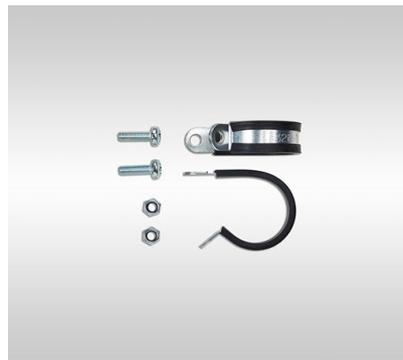

## Anwendungsbereich

Für die Becken-Positionierung im Aktiv-Rollstuhl, Reha-Buggy, Sitzschalen.

### Artikelnummern

- PL-3DB-XS** für SB 16-24 cm
- PL-3DB-S** für SB 20-32 cm
- PL-3DB-M** für SB 30-40 cm
- PL-3DB-L** für SB 36-46 cm
- PL-3DB-XL** für SB 40-48 cm

## Besondere Merkmale

Facettenartige Ausdünnung des Polstermaterials im Übergang von der Pelotte zum Befestigungsgurt. Verhindert seitliche Druckstellen am Becken.

## Technische Daten

	XXXS Bambino	XXS	XS	S	M	L	XL
<b>Sitzbreite (cm)</b>			16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46	44 - 52
<b>Polstergröße (cm)</b>			18 x 7	21 x 8	25,5 x 8	26,5 x 8,5	28,5 x 9
<b>Gewicht (g)</b>			220	220	280	280	280
<b>Sollbruchstelle (bei ca. kg)</b>			60	60	80	80	80

<b>Zahnband Gr. XXXS - XXS</b>		Produkt ist latexfrei 	
<b>Zahnband Gr. XS - S</b>	1,9 x 0,2 x 17,0 cm		
<b>Zahnband Gr. M - L - XL</b>	2,4 x 0,2 x 17,0 cm		
<b>Ratschenschnalle Gr. XXXS</b>			
<b>Ratschenschnalle Gr. XXS</b>	B-14-GO-BL		
<b>Ratschenschnalle Gr. XS - S</b>	B-19-ERGO-BL		
<b>Ratschenschnalle Gr. M - L - XL</b>	B-24-ERGO-BL		
<b>Lochriemen</b>			

# PELVI.LOC® PL-3DS Schale

PELVI.LOC® PL-3D Beckengurte

HMV.Nr.: 26.99.02.2000



## Modell

Die Becken-Pelotten sind 3-dimensional geformt zur optimalen Fixierung des Beckens ohne Druck auf die Spina anterior superior. Mit einfach zu bedienenden Ratschen-Schnallen wird die Passform des Gurtes eingestellt. Zur Sicherung des Rollstuhlfahrers werden die Becken-Pelotten in der Mitte über einen Zahnriemen verbunden, der zur Sicherheit zusätzlich in einer Lasche geführt wird, um Verletzungen zu vermeiden. Ein Gurtband ist in den Größen XXXS, XXS, XS, S, M, L und XL erhältlich.

**PL-3DS-XXXS Bambino** mit **B-14-STAR** Druckschnalle zum Öffnen und Schließen.

## Ausführung

Anwendungsbeispiel:


- Sitzschale mit **PL-3DS-S** Beckenretraktions-Gurt



## Zusatzartikel

Zur Befestigung an der Sitz-Schale oder am Rollstuhl.

Artikelnummer: **PB-BL**

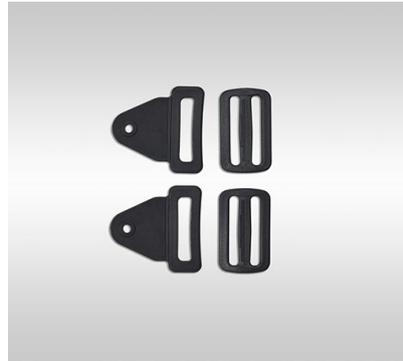

## Anwendungsbereich

Für die Becken- Positionierung in der Sitzschale.

## Besondere Merkmale

Ein Nylongurt dient der Befestigung und wird durch die Sitzschale geführt. Die facettenartige Ausdünnung des Polstermaterials im Übergang von der Pelotte zum Befestigungsgurt verhindert seitliche Druckstellen am Oberschenkel.

### Artikelnummern

**PL-3DS-XXXS** für SB 8-16 cm Bambino  
**PL-3DS-XXS** für SB 12-20 cm  
**PL-3DS-XS** für SB 16-24 cm  
**PL-3DS-S** für SB 20-32 cm  
**PL-3DS-M** für SB 30-40 cm  
**PL-3DS-L** für SB 36-46 cm  
**PL-3DS-XL** für SB 44-52 cm

## Technische Daten

	XXXS Bambino	XXS	XS	S	M	L	XL
<b>Sitzbreite (cm)</b>	8 - 16	12 - 20	16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46	44 - 52
<b>Polstergröße (cm)</b>	11 x 6	14 x 6	18 x 7	21 x 8	25,5 x 8	26,5 x 8,5	28,5 x 9
<b>Gewicht (g)</b>	220	220	220	220	280	280	280
<b>Sollbruchstelle (bei ca. kg)</b>	40	40	60	60	80	80	80

<b>Zahnband Gr. XXXS - XXS</b>	1,4 x 0,2 x 14,0 cm	Produkt ist latexfrei 	
<b>Zahnband Gr. XS - S</b>	1,9 x 0,2 x 17,0 cm		
<b>Zahnband Gr. M - L - XL</b>	2,4 x 0,2 x 17,0 cm		
<b>Ratschenschnalle Gr. XXXS</b>	B-14-STAR-BL		
<b>Ratschenschnalle Gr. XXS</b>	B-14-GO-BL		
<b>Ratschenschnalle Gr. XS - S</b>	B-19-ERGO-BL		
<b>Ratschenschnalle Gr. M - L - XL</b>	B-24-ERGO-BL		
<b>Lochriemen</b>			

# PELVI.LOC® PL-3DSR Reverso

PELVI.LOC® PL-3D Beckengurte

HMV.Nr.: 26.99.02.2000



## Modell

Die Becken-Pelotten sind 3-dimensional geformt zur optimalen Fixierung des Beckens ohne Druck auf die Spina anterior superior. Mit einfach zu bedienenden Ratschen-Schnallen wird die Passform des Gurtes eingestellt. Die Lochriemen am Rahmen sind bis zu 6cm in der Länge verstellbar und gewähren so situationsangepassten variablen Spielraum. Zur Sicherung des Rollstuhlfahrers werden die Becken-Pelotten in der Mitte über einen Zahnriemen verbunden, der zur Sicherheit zusätzlich in einer Lasche geführt wird, um Verletzungen zu vermeiden.

## Ausführung

Anwendungsbeispiel:

- Sitzschale mit **PL-3DSR** Beckenretraktions-Gurt

## Anwendungsbereich

Für die Becken- Positionierung in der Sitzschale.

## Besondere Merkmale

Die Zahnriemen bleiben seitlich an der Sitzschale befestigt. Zum Umsetzen werden nur die Pelotten abgenommen. Die Fein-Justierung der Pelotten zueinander wird über den Lochriemen eingestellt.

Die facettenartige Ausdünnung des Polstermaterials im Übergang von der Pelotte zum Zahnriemen verhindert seitliche Druckstellen am Oberschenkel.

## Artikelnummern

**PL-3DSR-XXS** für SB 12-20 cm  
**PL-3DSR-XS** für SB 16-24 cm  
**PL-3DSR-S** für SB 20-32 cm  
**PL-3DSR-M** für SB 30-40 cm  
**PL-3DSR-L** für SB 36-46 cm  
**PL-3DSR-XL** für SB 44-52 cm

## Technische Daten

	XXXS Bambino	XXS	XS	S	M	L	XL
Sitzbreite (cm)		12 - 20	16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46	44 - 52
Polstergröße (cm)		15 x 7	18 x 7	21 x 8	25,5 x 8	26,5 x 8,5	28,5 x 9
Gewicht (g)		220	220	220	280	280	280
Sollbruchstelle (bei ca. kg)		60	60	60	80	80	80

Zahnband Gr. XXXS - XXS	1,9 x 0,2 x 40,0 cm	<p>Produkt ist latexfrei</p>  
Zahnband Gr. XS - S	1,9 x 0,2 x 40,0 cm	
Zahnband Gr. M - L - XL	2,4 x 0,2 x 40,0 cm	
Ratschenschnalle Gr. XXXS		
Ratschenschnalle Gr. XXS	B-19-ERGO-BL	
Ratschenschnalle Gr. XS - S	B-19-ERGO-BL	
Ratschenschnalle Gr. M - L - XL	B-24-ERGO-BL	
Lochriemen Gr. XXS - XS - S	V-LR-19-BL-110 und V-LR-19-BL-140	
Lochriemen Gr. M - L - XL	V-LR-24-BL-110 und V-LR-24-BL-140	

# PELVI.LOC® PL-3DSRR Reverso mit Zahnriemen

PELVI.LOC® PL-3D Beckengurte

HMV.Nr.: 26.99.02.2000



## Modell

### Becken-Retraktions-Gurt für Sitzschalen

Die Becken-Pelotten sind 3-dimensional geformt zur optimalen Fixierung des Beckens ohne Druck auf die Spina anterior superior.

Die 3D-Pelotten werden fest mit dem Zahnriemen und Lochriemen verschraubt.

In der Lieferung enthalten sind Zahnriemen **R-19/24-BL-ERGO-400** und Druckschnalle **B-19/24-Star**.

## Zusatzartikel

Lochriemen Set, Paarweise lieferbar

- Breite: 19/24 mm
- Länge: 115 mm

Lochriemen mit Schnalle und Rohrschelle zur Befestigung am Rahmen, auch in anderen Zusammenstellungen möglich.

Beispiel:

- Lochriemen 24 mm breit x 115 mm lang und **B-24-ERGO**

### Artikelnummern

**LR-R-19-BL/B-19-ERGO-TR**  
**LR-R-24-BL/B-24-ERGO-TR**



## Anwendungsbereich

Für die Becken- Positionierung in der Sitzschale oder im Reha-Buggy.

## Besondere Merkmale

Die Ratschen-Schnallen werden seitlich an der Sitzschale oder Reha-Buggy befestigt. Der Beckenretraktionsgurt wird mit den Zahnriemen seitlich in die Schnallen geschoben.

Die Fein-Justierung der Pelotten zueinander kann über den Lochriemen eingestellt werden.

Die facettenartige Ausdünnung des Polstermaterials im Übergang von der Pelotte zum Zahnriemen verhindert seitliche Druckstellen am Oberschenkel.

### Artikelnummern

**PL-3DSRR-XS** für SB 16-24 cm  
**PL-3DSRR-S** für SB 20-32 cm  
**PL-3DSRR-M** für SB 30-40 cm  
**PL-3DSRR-L** für SB 36-46 cm

## Technische Daten

	XXXS Bambino	XXS	XS	S	M	L	XL
Sitzbreite (cm)			16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46	
Polstergröße (cm)			18 x 7	21 x 8	25,5 x 8	26,5 x 8,5	
Gewicht (g)			220	220	280	280	
Sollbruchstelle (bei ca. kg)			60	60	80	80	

Zahnband Gr. XXXS - XXS		Produkt ist latexfrei 	 LIZENZIIERTER PARTNER REG. NR. DE5914274896739-V
Zahnband Gr. XS - S	1,9 x 0,2 x 40,0 cm		
Zahnband Gr. M - L - XL	2,4 x 0,2 x 40,0 cm		
Ratschenschnalle Gr. XXXS			
Ratschenschnalle Gr. XXS			
Ratschenschnalle Gr. XS - S	B-19-STAR-BL		
Ratschenschnalle Gr. M - L - XL	B-24-STAR-BL		
Lochriemen			



# PELVI.LOC® PL-ASY Asymmetrischer Gurt

PELVI.LOC® Sitzsysteme (Sitzhosen)

HMV.Nr.: 18.99.99.0905



## Modell

### Der Gurt für Anspruchsvolle!

Bei verschiedenen sportlichen Betätigungen entsteht ein Schub-Druck des Beckens nach vorne. Durch die spezielle Konstruktion des asymmetrischen Gurts und seiner 3D-Contour Oberschenkel-Pelotten wird der Druck aufgefangen, die einzelne Positionierung der beiden Schenkelteile ermöglicht variablen Druckausgleich.

Die Oberschenkel-Pelotten sind einzeln einstellbar über seitlich angebrachte Nylonbänder. Auch asymmetrische Sitzpositionen können mithilfe der 3D-Contour-Pelotten ausgeglichen und angepasst positioniert werden.

## Besondere Merkmale

Mit dem PL-ASY wird ein Nach-vorne-Rutschen des Beckens verhindert, besonders bei verstellbaren Rückenlehnen und Kantelung.

Die 3D-Contour der Oberschenkel-Pelotten ermöglicht eine deutliche Druckreduktion im Schritt, auch bei außergewöhnlicher Belastung.

Über die am Rahmen zu befestigende Druckschnalle **B-24-Star** und den einzuhängenden Zahnriemen **R-24-BL-ERGO-400** ist eine einfache Handhabung gesichert.

Zahnriemen und Schnalle werden von einem Polster verdeckt, um Verletzungen zu verhindern.

### Artikelnummern

**PL-ASY-S** für SB 26-35 cm

**PL-ASY-M** für SB 36-39 cm

**PL-ASY-L** für SB 40-46 cm

## Anwendungsbereich

Für seitenunabhängig variable Beckenpositionierung beim Sport, in der Freizeit, oder auch im Alltag, bei asymmetrischer Sitzposition. Zur Anwendung empfohlen in der Sitzschale, im Rollstuhl oder im Multifunktions-Rollstuhl.

## Technische Daten

	XXXS Bambino	XXS	XS	S	M	L	XL
Sitzbreite (cm)				26 - 35	36 - 39	40 - 46	
Polstergröße (cm)				19 x 7,5	29 x 11	36 x 13,5	
Gewicht (g)				220	300	400	
Sollbruchstelle (bei ca. kg)				60	80	80	

Zahnband Gr. XXS		Produkt ist latexfrei 	
Zahnband Gr. XS - S	2,4 x 0,2 x 40,0 cm		
Zahnband Gr. M - L - XL	2,4 x 0,2 x 40,0 cm		
Ratschenschnalle Gr. XXXS			
Ratschenschnalle Gr. XS - S	B-24-STAR-BL		
Ratschenschnalle Gr. M - L - XL	B-24-STAR-BL		

# PELVI.LOC® PL-CSS Pelvi Contour Sitzsystem

PELVI.LOC® Sitzsysteme (Sitzhosen)

HMV.Nr.: 26.99.02.2000



## Modell

Das Pelvi-Contour-Sitzsystem hat eine zusätzlich gepolsterte Sitzfläche, um Druck zu verhindern.

Bei verschiedenen sportlichen Betätigungen entsteht ein Schub-Druck des Beckens nach vorne. Durch die spezielle Konstruktion des Sitzsystems und seiner 3D-Contour Oberschenkel-Pelotten wird der Druck aufgefangen.

## Zusatzartikel

Einfaches und schnelles Anbauen des Zahnriemens und Gurtbandes am Rahmen mittels Kabelbinder, Gurtschlaufe oder Rohrschelle.



## Anwendungsbereich

Zur Anwendung empfohlen in der Sitzschale, im Rollstuhl oder im Multifunktions-Rollstuhl.

## Besondere Merkmale

Mit dem Pelvi-Contour-Sitzsystem wird ein Nach-vorne-Rutschen des Beckens verhindert, besonders bei verstellbaren Rückenlehnen und Kantelung.

Die 3D-Contour der Oberschenkel-Pelotten ermöglicht eine deutliche Druckreduktion im Schritt, auch bei außergewöhnlicher Belastung.

Über die am Rahmen zu befestigende Druckschnalle **B-24-Star** und den einzuhängenden Zahnriemen **R-24-BL-ERGO-400** ist eine einfache Handhabung gesichert. Zahnriemen und Schnalle werden von einem Polster verdeckt, um Verletzungen zu verhindern.

## Artikelnummern

**PL-CSS-S** für SB 26-35 cm

**PL-CSS-M** für SB 36-39 cm

**PL-CSS-L** für SB 40-46 cm

## Technische Daten

	XXXS Bambino	XXS	XS	S	M	L	XL
Sitzbreite (cm)				26 - 35	36 - 39	40 - 46	
Polstergröße (cm)				19 x 7,5	29 x 11	36 x 13,5	
Gewicht (g)				260	300	400	
Sollbruchstelle (bei ca. kg)				60	80	80	

Zahnband Gr. XXS		Produkt ist latexfrei 	 LIZENZIERTER PARTNER REG. NR. DE5914274696739-V
Zahnband Gr. XS - S	2,4 x 0,2 x 40,0 cm		
Zahnband Gr. M - L - XL	2,4 x 0,2 x 40,0 cm		
Ratschenschnalle Gr. XXXS			
Ratschenschnalle Gr. XS - S	B-24-STAR-BL		
Ratschenschnalle Gr. M - L - XL	B-24-STAR-BL		

# PELVI.LOC® PL-GF Genuframe

PELVI.LOC® Unterschenkelgurte

HMV.Nr.: 18.99.99.0905



## Modell

Die zwei-dimensional geformten Unterschenkel-Pelotten werden über einen Lochriemen vorne miteinander verbunden und eingestellt. Zur seitlichen Fixierung am Rahmen gewährleisten die Zahnriemen **R24-BL-ERGO-400** und die Druck-Schnallen **B24-ERGO-BL** hohe Belastbarkeit; auch mit anderen Schnallen und Zahnriemen lieferbar.

Der Unterschenkel-Gurt wird mittels der Ratschenschnalle individuell an die Sitzposition angepasst und kann millimetergenau eingestellt werden. Ebenso kann der Gurt auch schnell über die Druckschnalle geöffnet werden.

## Zusatzartikel

Rohrschellen zur Befestigung des Gurtes am Rollstuhlrahmen in folgenden Durchmessern lieferbar:

### Artikelnummern

- RS-20:** Rohrdurchmesser 20 mm
- RS-22:** Rohrdurchmesser 22 mm
- RS-25:** Rohrdurchmesser 25 mm
- RS-30:** Rohrdurchmesser 30 mm
- RS-32:** Rohrdurchmesser 32 mm



## Anwendungsbereich

Der Pelvi.Loc Unterschenkel-Gurt verhindert das nach-vorne-Rutschen im Rollstuhl.

## Besondere Merkmale

Der Lochriemen wird von einem Polster verdeckt, um Verletzungen zu verhindern. Über die am Rahmen zu befestigende Ratschenschnalle und den einzuhängenden Lochriemen ist eine einfache Handhabung gesichert. Auch mit anderen Schnallen z.B. B24-Star lieferbar.

### Artikelnummern

- PL-UG-XXS** für SB 12-20 cm
- PL-UG-XS** für SB 16-24 cm
- PL-UG-S** für SB 20-32 cm
- PL-UG-M** für SB 30-40 cm
- PL-UG-L** für SB 36-46 cm
- PL-UG-XL** für SB 44-52 cm

## Technische Daten

	XXXS Bambino	XXS	XS	S	M	L	XL
<b>Sitzbreite (cm)</b>		12 - 20	16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46	44 - 52
<b>Polstergröße (cm)</b>		12 x 7	18 x 7	21 x 8	25,5 x 8	26,5 x 8,5	28,5 x 9
<b>Gewicht (g)</b>		200	220	220	280	280	300
<b>Sollbruchstelle (bei ca. kg)</b>		60	60	60	80	80	80

<b>Zahnband Gr. XXXS - XXS</b>	1,9 x 0,2 x 40,0 cm
<b>Zahnband Gr. XS - S</b>	1,9 x 0,2 x 40,0 cm
<b>Zahnband Gr. M - L - XL</b>	2,4 x 0,2 x 40,0 cm
<b>Ratschenschnalle Gr. XXXS</b>	
<b>Ratschenschnalle Gr. XXS</b>	B-19-ERGO-BL
<b>Ratschenschnalle Gr. XS - S</b>	B-19-ERGO-BL
<b>Ratschenschnalle Gr. M - L - XL</b>	B-24-ERGO-BL
<b>Lochriemen</b>	

Produkt ist latexfrei



# PELVI.LOC® PL-UG Unterschenkelgurt

PELVI.LOC® Unterschenkelgurte

HMV.Nr.: 18.99.99.0905



## Modell

Die zwei-dimensional geformten Unterschenkel-Pelotten werden über einen Lochriemen vorne miteinander verbunden und eingestellt. Zur seitlichen Fixierung am Rahmen gewährleisten die Zahnriemen **R24-BL-ERGO-400** und die Druck-Schnallen **B24-ERGO-BL** hohe Belastbarkeit; auch mit anderen Schnallen und Zahnriemen lieferbar.

Der Unterschenkel-Gurt wird mittels der Ratschenschnalle individuell an die Sitzposition angepasst und kann millimetergenau eingestellt werden. Ebenso kann der Gurt auch schnell über die Druckschnalle geöffnet werden.

## Zusatzartikel

Rohrschellen zur Befestigung des Gurtes am Rollstuhlrahmen in folgenden Durchmessern lieferbar:

### Artikelnummern

- RS-20:** Rohrdurchmesser 20 mm
- RS-22:** Rohrdurchmesser 22 mm
- RS-25:** Rohrdurchmesser 25 mm
- RS-30:** Rohrdurchmesser 30 mm
- RS-32:** Rohrdurchmesser 32 mm



## Anwendungsbereich

Der Pelvi.Loc Unterschenkel-Gurt verhindert das nach-vorne-Rutschen im Rollstuhl.

## Besondere Merkmale

Der Lochriemen wird von einem Polster verdeckt, um Verletzungen zu verhindern. Über die am Rahmen zu befestigende Ratschenschnalle und den einzuhängenden Lochriemen ist eine einfache Handhabung gesichert. Auch mit anderen Schnallen z.B. B24-Star lieferbar.

### Artikelnummern

- PL-UG-XXXS** für SB 8-16 cm
- PL-UG-XXS** für SB 12-20 cm
- PL-UG-XS** für SB 16-24 cm
- PL-UG-S** für SB 20-32 cm
- PL-UG-M** für SB 30-40 cm
- PL-UG-L** für SB 36-46 cm
- PL-UG-XL** für SB 44-52 cm

## Technische Daten

	<b>XXXS Bambino</b>	<b>XXS</b>	<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>
<b>Sitzbreite (cm)</b>	8 - 16	12 - 20	16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46	44 - 52
<b>Polstergröße (cm)</b>	11 x 6	14 x 6	18 x 7	21 x 8	25,5 x 8	26,5 x 8,5	28,5 x 9
<b>Gewicht (g)</b>	220	220	220	220	280	280	280
<b>Sollbruchstelle (bei ca. kg)</b>	40	40	60	60	80	80	80

<b>Zahnband Gr. XXXS - XXS</b>	1,4 x 0,2 x 14,0 cm
<b>Zahnband Gr. XS - S</b>	1,9 x 0,2 x 17,0 cm
<b>Zahnband Gr. M - L - XL</b>	2,4 x 0,2 x 17,0 cm
<b>Ratschenschnalle Gr. XXXS</b>	B-14-STAR-BL
<b>Ratschenschnalle Gr. XXS</b>	B-14-GO-BL
<b>Ratschenschnalle Gr. XS - S</b>	B-19-ERGO-BL
<b>Ratschenschnalle Gr. M - L - XL</b>	B-24-ERGO-BL
<b>Lochriemen</b>	

Produkt ist latexfrei



# PELVI.LOC® PL-UGR Unterschenkelgurt reversed

PELVI.LOC® Unterschenkelgurte

HMV.Nr.: 18.99.99.0905



## Modell

Die zwei-dimensional geformten Unterschenkel-Pelotten werden über einen Lochriemen vorne miteinander verbunden und eingestellt. Zur seitlichen Fixierung am Rahmen gewährleisten die Zahnriemen **R24-BL-ERGO-400** und die Druck-Schnallen **B24-STAR** hohe Belastbarkeit; auch mit anderen Schnallen und Zahnriemen lieferbar.

Der Unterschenkel-Gurt wird mittels der Ratschenschnalle individuell an die Sitzposition angepasst und kann millimetergenau eingestellt werden. Ebenso kann der Gurt auch schnell über die Druckschnalle geöffnet werden.

## Zusatzartikel

Rohrschellen zur Befestigung des Gurtes am Rollstuhlrahmen in folgenden Durchmessern lieferbar:

### Artikelnummern

- RS-20:** Rohrdurchmesser 20 mm
- RS-22:** Rohrdurchmesser 22 mm
- RS-25:** Rohrdurchmesser 25 mm
- RS-30:** Rohrdurchmesser 30 mm
- RS-32:** Rohrdurchmesser 32 mm



## Anwendungsbereich

Der Pelvi.Loc Unterschenkel-Gurt verhindert das nach-vorne-Rutschen im Rollstuhl.

## Besondere Merkmale

Der Lochriemen wird von einem Polster verdeckt, um Verletzungen zu verhindern. Über die am Rahmen zu befestigende Druckschnalle und den einzuhängenden Lochriemen ist eine einfache Handhabung gesichert. Auch mit anderen Schnallen z.B. B24 Star lieferbar.

### Artikelnummern

- PL-UGR-XXS** für SB 12-20 cm
- PL-UGR-XS** für SB 16-24 cm
- PL-UGR-S** für SB 20-32 cm
- PL-UGR-M** für SB 30-40 cm
- PL-UGR-L** für SB 36-46 cm
- PL-UGR-XL** für SB 44-52 cm

## Technische Daten

	XXXS Bambino	XXS	XS	S	M	L	XL
<b>Sitzbreite (cm)</b>		12 - 20	16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46	44 - 52
<b>Polstergröße (cm)</b>		14 x 6	18 x 7	21 x 8	25,5 x 8	26,5 x 8,5	28,5 x 9
<b>Gewicht (g)</b>		220	220	220	280	280	280
<b>Sollbruchstelle (bei ca. kg)</b>		40	60	60	80	80	80

<b>Zahnband Gr. XXXS - XXS</b>	1,9 x 0,2 x 40,0 cm
<b>Zahnband Gr. XS - S</b>	1,9 x 0,2 x 40,0 cm
<b>Zahnband Gr. M - L - XL</b>	2,4 x 0,2 x 40,0 cm
<b>Ratschenschnalle Gr. XXXS</b>	
<b>Ratschenschnalle Gr. XXS</b>	B-19-STAR-BL
<b>Ratschenschnalle Gr. XS - S</b>	B-19-STAR-BL
<b>Ratschenschnalle Gr. M - L - XL</b>	B-24-STAR-BL
<b>Lochriemen</b>	

Produkt ist latexfrei



# PELVI.LOC® PL-KG-GO Knöchelgamasche

PELVI.LOC® Fußpositionierung



HMV.Nr.: 18.99.99.0305

## Modell


### Fußriemen

Mit Zahnriemen **R-19-BL-VI-210 / 275 / 300** und Schnalle **B-19-GO-BL** inkl. Fußbrettbefestigungs-Set.  
Mit Zahnriemenabdeckung nach der Schnalle.

## Im Lieferumfang enthalten

Fußbrettbefestigungs-Set, **WS-Set**:

- Blech-Biegeteile in Farbe schwarz mit M5 x 20 mm Schloßschrauben und Gurtschlaufen zur Montage fertig.

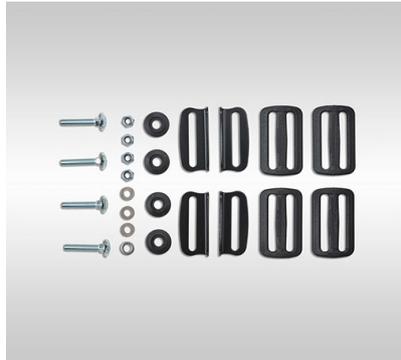

## Anwendung

Einfache Handhabung durch Zahnriemen und Ratschenschnalle. Geringe Bauhöhe des Befestigungssets.

## Besondere Merkmale

Der Zahnriemen wird zur Sicherheit zusätzlich in einer Lasche geführt, um Verletzungen zu vermeiden.

Lieferung nur paarweise.

### Artikelnummern

**PL-KG-GO-S** Umfang 17-23 cm

**PL-KG-GO-M** Umfang 20-26 cm

**PL-KG-GO-L** Umfang 24-30 cm

**PL-KG-GO-XL** Umfang 26-34 cm



## Technische Daten

	S	M	L	XL	Produkt ist latexfrei 	 LIZENZIERTER PARTNER REG. NR. DE3914274696739-V
<b>Umfang (cm)</b>	17 - 23	20 - 26	24 - 30	26-34		
<b>Zahnband</b>	R-19-VI-BL-210	R-19-VI-BL-275	R-19-VI-BL-300	R-19-VI-BL-300		

# PELVI.LOC® PL-RR Ristriemen

PELVI.LOC® Fußpositionierung

HMV.Nr.: 18.99.99.0305

## Ristriemen

Die gepolsterten Rist-Riemen dienen zur Befestigung der Füße an Fußschalen oder Fußstützen, die Polsterung ist ausgerichtet auf die Vermeidung von Druckstellen.



### Besondere Merkmale

Einfaches Öffnen und Schließen mit einer Hand.  
In vielen Schnallen- und Zahnriemen-Varianten möglich!  
Lieferung nur paarweise!


### Artikelnummern

- **PL-RR-XS**: Länge min.19 cm **B14-GO-BL** und **R14-GO-110**, Länge max. 27 cm
- **PL-RR-S**: Länge min. 20 cm **B24-LU-JU** und **R24-BL-170**, Länge max. 27 cm
- **PL-RR-M**: Länge min. 24 cm **B24-LU-JU** und **R24-BL-195**, Länge max. 31 cm
- **PL-RR-L**: Länge min. 24 cm **B24-LU-JU** und **R24-BL-225**, Länge max. 36 cm
- **PL-RR-XL**: Länge min. 29 cm **B24-LU-JU** und **R24-BL-225**, Länge max. 51 cm
- **PL-RR-GO-S**: Länge min.20 cm **B19-GO-BL** und **R19-GO-BL-350**, Länge max. 27 cm
- **PL-RR-GO-M**: Länge min. 24 cm **B19-GO-BL** und **R19-GO-BL-350**, Länge max.31 cm

### Im Lieferumfang enthalten

Befestigungswinkel-Set, **BS-BL-25-SET** mit Schrauben und Muttern.

Alle Teile nur paarweise lieferbar!

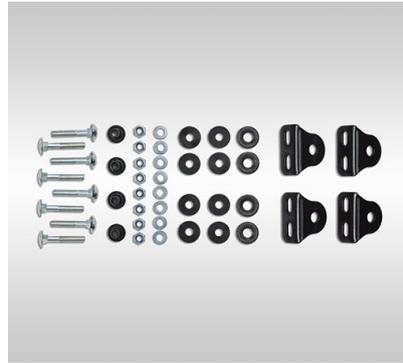

### Anwendungsbereich

Die gepolsterten Rist-Riemen dienen zur Befestigung der Füße an Fußschalen oder Fußstützen, die Polsterung ist ausgerichtet auf die Vermeidung von Druckstellen. Mithilfe von Ratschenschnallen und Zahnbindern wird der Fuß sicher fixiert.



### Modell PL-RR

Polstergröße über alles bei:

- **Gr.: XS-S** 17,5 cm x 5,0 cm, Gesamtlänge 21,0 cm
- **Gr.: M** 17,5 cm x 5,0 cm, Gesamtlänge 23,5 cm
- **Gr.: L** 17,5 cm x 5,0 cm, Gesamtlänge 23,5 cm, gleiche Polstergröße wie Gr. M



### Modell PL-RR

Polstergröße über alles bei:

- **Gr.: XL** 24,0 cm x 7,0 cm, Gesamtlänge 35,0 cm



### Modell PL-RR-GO

Polstergröße über alles bei:

- **Gr.: S** 20,0 cm, Gesamtlänge 27,0 cm
- **Gr.: M** 24,0 cm, Gesamtlänge 31,0 cm

### Technische Daten

PL-RR	XS	S	M	L	XL
Polstergröße (cm)	17,5 x 5	17,5 x 5	25,5 x 8	25,5 x 8	24 x 7
Gesamtlänge (cm) minimal	19	20	24	24	29
Gesamtlänge (cm) maximal	27	27	31	36	51
Zahnriemen	R-14-GO-110	R-24-BL-170	R-24-BL-195	R-24-BL-225	R-24-BL-225

Produkt ist latexfrei





Technik die verbindet  
Technology that connects

Schnalle	B-14-GO-BL	B-24-LU-JU	B-24-LU-JU	B-24-LU-JU	B-24-LU-JU
----------	------------	------------	------------	------------	------------

PL-RR-GO	XS	S	M	L	XL	Produkt ist latexfrei 	 LIZENZIIERTER PARTNER <small>REG. NR. DE5934274696739-V</small>
Polstergröße (cm)		17,5 x 5	25,5 x 8				
Gesamtlänge (cm) minimal		20	24				
Gesamtlänge (cm) maximal		27	31				
Zahnriemen		R-19-GO-BL-350	R-19-GO-BL-350				
Schnalle		B-19-GO-BL	B-19-GO-BL				

# PELVI.LOC® / Torso.Loc Zwei in Eins TL-3DSR & TL-W

PELVI.LOC® / Torso.Loc Oberkörperpositionierung

HMV.Nr.: 18.99.99.0906



## Modell

Der Torso.Loc bietet eine exklusive Kombination aus Oberkörper-Positionierung und Becken-Retraktions-Gurt. Die Neopren-Weste hat eine hohe Rückstellkraft und ist individuell anpassbar im Schulterbereich und Sternum für eine sichere Positionierung des Oberkörpers. Weste und Gurt sind über einen weichen und zugfesten Lochriemen im Oberbauch-Bereich verbunden. Der 3D-Becken-Retraktions-Gurt bietet optimale Fixierung des Beckens ohne Druck auf die Spina anterior superior. Mit dem Torso.Loc wird eine optimale Positionierung des Oberkörpers und des Beckens im Rollstuhl gewährleistet.



## Besondere Merkmale

**Zwei in Eins:** Das Torso.Loc-System zeichnet sich aus durch einfaches und schnell anwendbares Handling: die Verbindung der Oberkörper-Weste aus Neopren mit dem Becken-Retraktions-Gurt TL-3DSR reduziert mehrere Arbeitsschritte auf einen Schritt zur optimalen Positionierung.

Artikelnummer: TL-3DSR-XS / TL-W-S

## Anwendungsbereich

Zur Oberkörper- und Beckenpositionierung im Rollstuhl, der Sitzschale oder Reha-Buggy. Bei der Anwendung des Torso.Loc Systems, bei liegender PEG Magensonde muss auf eine mögliche Druckbelastung der Punktionsstelle und der PEG Sonde geachtet werden.

## Bestehend aus Becken-Retraktions-Gurt




### Artikelnummern

TL-3DSR-XS für SB 16-24 cm  
TL-3DSR-S für SB 20-32 cm  
TL-3DSR-M für SB 30-40 cm  
TL-3DSR-L für SB 36-46 cm

## Bestehend aus Neopren-Weste



## Piktogramm Neopren-Weste

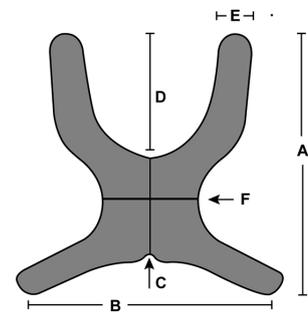

Artikelnummer	A	B	C	D	E	F
TL-W-S	31	22	12	16	4	12
TL-W-M	38	29	16	19	5	13
TL-W-L	47	37	19	22	6	14
TL-W-XL	55	45	24	26	6,5	17

## Technische Daten TL-3DSR

	XS	S	M	L	
Sitzbreite (cm)	16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46	Produkt ist latexfrei  
Polstergröße (cm)	18 x 7	20 x 11	23 x 13	25,5 x 14	
Gewicht (g)	220	220	280	280	
Sollbruchstelle (bei ca. kg)	60	60	80	80	
Zahnband	1,9 x 0,2 x 40,0 cm	1,9 x 0,2 x 40,0 cm	2,4 x 0,2 x 40,0 cm	2,4 x 0,2 x 40,0 cm	

## PELVI.LOC® PL-OPS-Maß

PELVI.LOC® / Torso.Loc Oberkörperpositionierung



HMV.Nr.: 18.99.99.0906

### Modell

Unser Oberkörper-Positionierungs-System ist individuell anpassbar. Nach Ihren Maßangaben fertigen wir das System für ein sicheres Sitzen mit Oberkörperstabilisierung. Für den Autotransport von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen bietet das System ein einfaches und schnell anwendbares Handling, die Oberkörperpositionierung ist in wenigen Handgriffen montiert.

### Oberkörperpositionierung

in wenigen Handgriffen montiert!

### Zusatzartikel

Verschiedene Sicherheitsschnallen für die unterschiedlichen Anforderungen. Zur Erschwerung des ungewollten Öffnens des Bauchgurtes.



### Artikelnummer: SF-2

Segufix Magnetverschluss mit 2 Magnet-Verschlüssen incl. 2 Sicherheitsschlüssel zum Öffnen des Systems. Nur nach Anfrage und Absprache möglich!

### Artikelnummern

**KSS-S-50** 3 Finger Schnalle

**KSS-50** 2 Finger Schnalle

**SKS-50-SF** Steckschloß mit Sicherheitsfunktion (Stiftöffnung)

### Anwendungsbereich

Zur Oberkörper-Positionierung, Stabilisierung im Rollstuhl, Pflegerollstuhl, Auto-Sitz, uvm..

### Besondere Merkmale

PL-OPS bestehend aus:

- Schultergurte gepolstert
- Leibteil mit seitlicher Stabilisierung
- Sitzhose
- Befestigungsgurt für die Rückenlehne
- Je nach Alter des Kindes Sitzkeil erforderlich
- Immer zusätzlich mit dem 3-Punkt-Gurt im PKW sichern !!!

Artikelnummern: **PL-OPS-Maß**



### Artikelnummer: KSS-S-50

Kunststoff Sicherheits Steckschloß, mit drei Fingern zu öffnen in schwarz aus Acetal



### Artikelnummer: KSS-50

Kunststoff-Steckschloß, mit zwei Fingern zu öffnen in schwarz aus Nylon. Fixations-Verschluß verhindert das Öffnen des Bauchgurtes.



### Artikelnummer: SKS-50-SF

Steckschloß aus Metall 50mm breit mit Sicherheitsfunktion (Stiftöffnung).

## PELVI.LOC® PL-W

PELVI.LOC® / Torso.Loc Oberkörperpositionierung

HMV.Nr.: 18.99.99.0906



### Modell


#### Neopren-Weste Classic ohne Reißverschluss

Unsere Neopren-Westen sind individuell anpassbar. Für eine sichere Positionierung des Oberkörpers im Rollstuhl.

### Anwendungsbereich

Zur Oberkörper-Positionierung, Stabilisierung im Rollstuhl, Pflegerollstuhl.

### Piktogramm PL-W

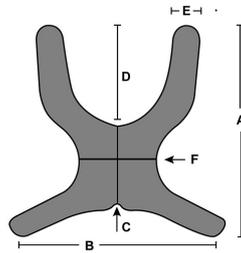

Artikelnummer	A	B	C	D	E	F
PL-W-S	31	22	12	16	4	12
PL-W-M	38	29	16	19	5	13
PL-W-L	47	37	19	22	6	14
PL-W-XL	55	45	24	26	6,5	17

### Besondere Merkmale

**Material:** Neopren 7 mm kaschiert, sorgt für eine hohe Rückstellkraft im Schulterbereich.

## PELVI.LOC® PL-WR

PELVI.LOC® / Torso.Loc Oberkörperpositionierung

HMV.Nr.: 18.99.99.0906



### Modell


#### Neopren-Weste Classic mit Reißverschluss

Unsere Neopren-Westen sind individuell anpassbar. Für eine sichere Positionierung des Oberkörpers im Rollstuhl.

### Anwendungsbereich

Zur Oberkörper-Positionierung, Stabilisierung im Rollstuhl, Pflegerollstuhl.

### Piktogramm PL-WR

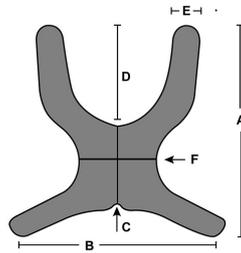

Artikelnummer	A	B	C	D	E	F
PL-WR-S	31	22	12	16	4	12
PL-WR-M	38	29	16	19	5	13
PL-WR-L	47	37	19	22	6	14
PL-WR-XL	55	45	24	26	6,5	17

### Besondere Merkmale

**Material:** Neopren 7 mm kaschiert, sorgt für eine hohe Rückstellkraft im Schulterbereich. Einfaches Anlegen der Weste durch den Reißverschluss.