

Montage-Anleitung Pelvi-Loc 2DS / 3DS / 2DAS / 3DAS

Bild 1: Das Gurtband um das Rohr führen

Bild 2: Mit einem Stichel oder Lötcolben das Gurtband mittig durchbohren
Wichtig: Loch Rand mit Feuerzeug verschmelzen

Bild 3: Schraube M6 mit Scheibe durch das Gurtband Schrauben und Scheibe und Mutter zudrehen

Bild 4: Beilagscheibe mit Mutter auf der Hinterseite des Gurtes festziehen

Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Das Gurtband kann auch mehrfach gelocht werden mindestens 2cm von Loch zu Loch Abstand halten.