

## Montage-Anleitung Pelvi-Loc 2DS / 3DS / 2DAS / 3DAS

**Bild 1:** Das Gurtband um das Rohr führen

**Bild 2:** Mit einem Stichel oder Lötcolben das Gurtband mittig durchbohren  
Wichtig: Loch Rand mit Feuerzeug verschmelzen

**Bild 3:** Schraube M6 mit Scheibe durch das Gurtband Schrauben und Scheibe und Mutter zudrehen

**Bild 4:** Beilagscheibe mit Mutter auf der Hinterseite des Gurtes festziehen

**Bild 1**



**Bild 2**



**Bild 3**



**Bild 4**



Das Gurtband kann auch mehrfach gelocht werden mindestens 2cm von Loch zu Loch Abstand halten.