




PELVI.LOC®

Genuframe

PL-GF - XXS, - XS, - S, - M, - L, - XL

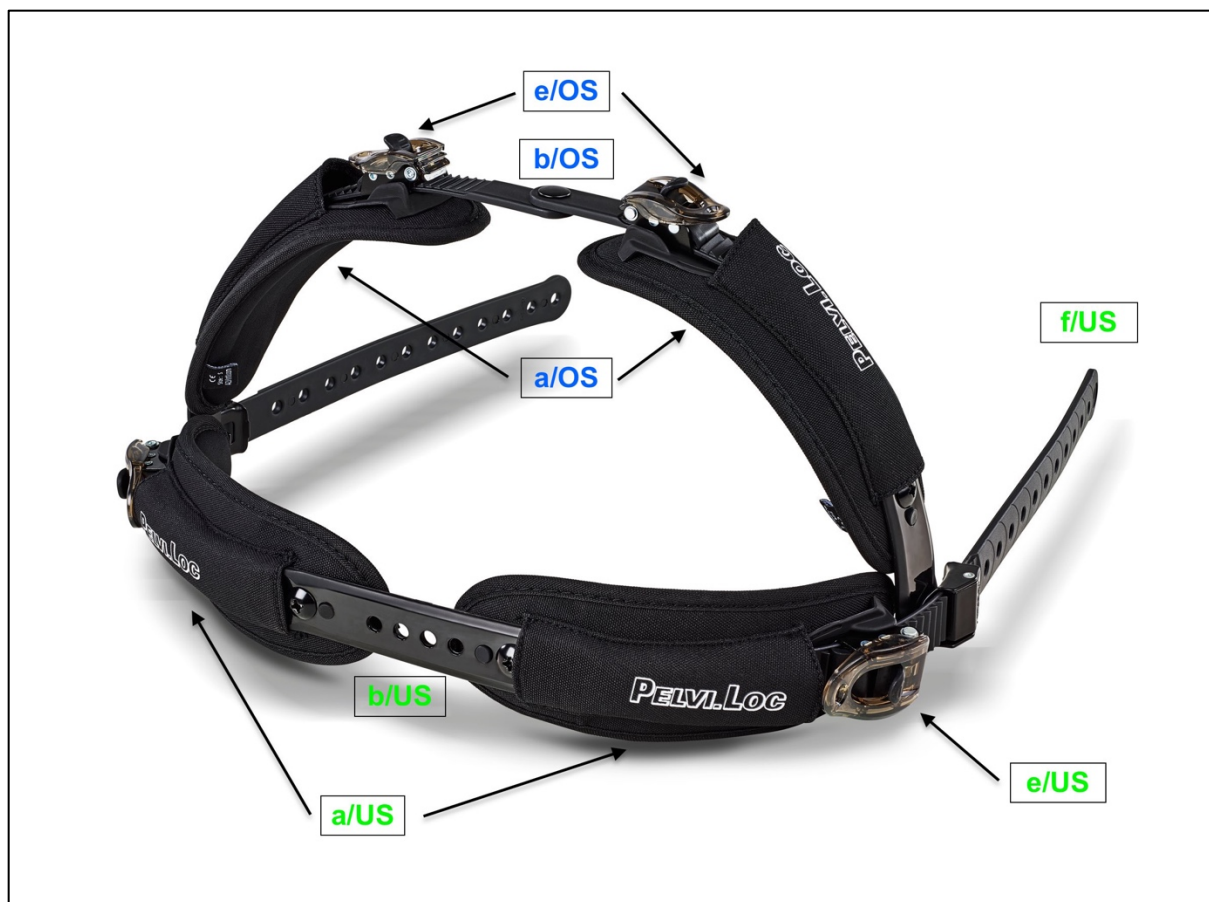

Lea y siga estas instrucciones de montaje y uso antes del primer uso para una aplicación segura de este producto.



Ámbito de aplicación

El **PELVI.LOC®** Genuframe - PL-GF sirve para las personas con movilidad reducida, especialmente para el posicionamiento de la cadera y los muslos en la silla de ruedas y la silla de ruedas activa, evitando que se deslice hacia adelante.

Grupo de pacientes previsto:

- Niños, adolescentes y adultos
- Sexo: femenino y masculino

Control de recepción

Desembale este producto por completo y compruebe que el envío esté íntegro y no presente daños de transporte. Si detecta que el envío, en contra de lo esperado, presenta un fallo, proceda de la siguiente manera:

1. Presente una reclamación al transportista de inmediato.
2. Encárguese de que se registre el daño / fallo.
3. Infórmenos a nosotros o a su vendedor especializado de inmediato.

Volumen de suministro

- 1) 1 x correa para los muslos **PELVI.LOC**[®] Genuframe -XXS, -XS, -S, -M, -L, -XL premontada
- 2) 1 x correa para las piernas **PELVI.LOC**[®] Genuframe -XXS, -XS, -S, -M, -L, -XL premontada
- 3) 1 x información para descargar las instrucciones de montaje y uso en línea

Combinación de productos médicos

Apto para medios auxiliares previstos para el uso de una correa de retracción pélvica

Montaje del cinturón para las piernas



El montaje debe ser realizado por una persona con conocimientos técnicos.

El montaje de la correa para las piernas **PELVI.LOC**[®] Genuframe es similar al del PL-UG.

1. Coloque los acolchados (**a/US**) junto a las piernas (por debajo de la tibia o el cabezal de la fíbula). La banda perforada/dentada (**f/US**) estará por fuera.
 - ¡Después, el logo **PELVI.LOC**[®] del acolchado de las piernas podrá leerse desde delante!
2. Ajuste la distancia de los acolchados de las piernas a través de la correa perforada (**b/US**).
3. Fije la banda perforada/dentada (**f/US**) al tubo del bastidor de la silla de ruedas.
4. Tense la banda perforada/dentada (**f/US**) por los dos lados de manera homogénea hasta que quede solo hueco para una mano abierta entre el muslo y el acolchado
5. En caso necesario, pueden acortarse los extremos de la banda dentada de forma semicircular. En caso necesario, desbarbe los extremos de la banda dentada cortada. –¡Peligro de lesiones!
6. ¡Revise el asiento fijo y la retención a ambos lados la banda perforada/dentada (**f/US**)!

Montaje de la correa para los muslos

El montaje de la correa para los muslos **PELVI.LOC**[®] Genuframe es similar al del PL-2DB.

7. Los acolchados (**a/OS**) deben estar junto a la zona de los muslos. – La banda dentada (**b/OS**) estará encima.
 - ¡Después, el logo **PELVI.LOC**[®] del acolchado para el muslo podrá leerse desde arriba!
8. Ajuste la distancia de los acolchados a través de la banda dentada (**b/OS**) accionando las hebillas de trinquete de la correa del muslo (**e/OS**).
 - La articulación de la banda dentada (**b/OS**) deberá situarse entonces en el centro entre los acolchados.
 - Se debe tirar de la banda dentada como máximo hasta que queden libres dos dientes detrás de cada hebilla de trinquete (**e/OS**).



Instrucciones de uso



Indicaciones de seguridad

A pesar de las construcciones estables, componentes como las correas perforadas, las tiras de las correas, las bandas dentadas y los acolchados están sujetos a un cierto desgaste. Por ello, se recomienda controlar a fondo el **PELVI.LOC**[®] cada 3 meses. ¡Aquí se debe prestar atención también al asiento fijo de las uniones de remaches y atornilladas!

- Convéncese de que el estado del producto permite su uso y de que está asentado correctamente – ¡Peligro de lesiones!
- No remiende, pegue ni vuelva a utilizar componentes dañados, como correas perforadas/tiras de correas (f), la banda dentada (b) o los acolchados (a) – ¡Peligro de accidente!
- No se sienta sobre los acolchados – ¡Peligro de puntos de presión, especialmente por las hebillas de trinquete (e)!
- No eleve la silla de ruedas por encima del **PELVI.LOC**[®] - ¡Peligro de accidente!
- Preste atención a no poner las manos entre la correa perforada y los tubos del bastidor o del asiento - ¡Peligro de aplastamiento!

Limitaciones del uso / efectos secundarios no deseados

- No utilice el **PELVI.LOC**[®] si hay puntos de presión, heridas u otras lesiones no curadas en la zona de los acolchados – ¡Peligro de lesiones!
- No utilice el **PELVI.LOC**[®] en caso de osteoporosis, huesos de cristal o trastornos graves de la circulación – ¡Peligro de lesiones!
- ¡Asegure el correcto funcionamiento del **PELVI.LOC**[®] después de limpiarlo!
- Un **PELVI.LOC**[®] dañado debe cambiarse a la mayor brevedad posible – ¡Peligro de accidente!



Atención:

- El **PELVI.LOC**[®] no forma parte del sistema de retención para la silla de ruedas o los pasajeros en el transporte en un sistema de transporte de minusválidos.
 - En el sentido de la responsabilidad por productos, ni el productor ni el distribuidor pueden asumir responsabilidad por los daños o riesgos que se produzcan en relación con el producto por dejar a niños sin supervisión.
1. Para utilizar el **PELVI.LOC**[®] se colocan los acolchados (a) pegados a las piernas

Modo de empleo

1. Para utilizar el **PELVI.LOC**[®] se colocan los acolchados (a) pegados a los muslos y las piernas



Atención: ¡Preste atención a que no haya ningún objeto bajo el acolchado! De este modo evitará dolorosos puntos de presión.

2. Después, pase la banda dentada (**f/ US**) por el trinquete correspondiente. Para ello, accione la hebilla de trinquete (**e/US**) correspondiente.
 3. A continuación, tense la banda dentada (**f/US**) hasta que quede solo hueco para una mano abierta entre el muslo y el acolchado.
 4. ¡Asegúrese de que las hebillas de trinquete (**e/US**) agarren los dientes de la banda dentada!
- ¡Haga una prueba de tracción!

Para abrir el PELVI.LOC®, accione la hebilla de trinquete (**e/US**) y saque la banda dentada.

- ¡Preste atención a que los acolchados no queden atrapados entre los radios de la rueda de accionamiento!

Limpieza y desinfección

- Apto para la lavadora hasta a 40 grados.
- Es posible la desinfección quimicotérmica añadiendo ELTRA 40 en cada lavado.
- No centrifugar
- No apto para la secadora

Mantenimiento

Deben comprobarse periódicamente los daños y el funcionamiento del **PELVI.LOC®**.

Reparaciones

Cambie los **PELVI.LOC®** defectuosos de inmediato.

Desechamiento


- El embalaje del dispositivo puede llevarse a un punto de reciclaje de materiales reutilizables.
- Las piezas de metal pueden llevarse a un punto de reciclaje de metales usados.
- Las piezas de plástico pueden llevarse a un punto de reciclaje de plásticos.
- El desecharlo debe efectuarse en conformidad con las correspondientes disposiciones legales nacionales.
- Pregunte por empresas de desecharlo locales a su administración municipal.



Datos técnicos

	XXS	XS	S	M	L	XL
Ancho de la rodilla (cm)	12 – 20	16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46	44 - 52
Tamaño del acolchado (cm)	12 x 7	18 x 7	21 x 8	25,5 x 8	26,5 x 8,5	28,5 x 9
Peso (g)	200	220	220	280	280	300
Punto de rotura (a aprox. kg)	60	60	60	80	80	80

Banda dentada tam. XXS, XS, S	1,9 x 0,2 x 17,0 cm
Banda dentada tam. M, L, XL	2,4 x 0,2 x 17,0 cm

Producto 
libre de
látex

Indicación importante: ¡Ancho de las rodillas, no ancho del asiento!

Garantía

Asumimos responsabilidad por este producto en conformidad con las disposiciones legales. Esta se extiende a fallos en los materiales y en el procesamiento. De aquí quedan excluidas las piezas de desgaste y las piezas/módulos sujetos a un desgaste conforme a lo previsto, así como los daños derivados de esfuerzos excesivos, «usos no conformes a lo previsto», daños por aplicar demasiada fuerza o modificaciones/repares no permitidas. Si se produce un caso de garantía, diríjase a su vendedor especializado al que haya comprado este producto. Por motivos de responsabilidad por productos, los trabajos de reparación, revisión y mantenimiento solo pueden ser llevados a cabo por vendedores especializados autorizados, utilizando recambios originales.



Fabricante:

A2J GmbH
Am Fuchsberg 13
D-87452 Altusried
Tel.: +49 (08373) 987269
Fax: +49 (08373) 987276
Correo electrónico: info@a2j-intl.com
Internet: www.a2j-intl.com



Este producto se halla conforme con los requisitos básicos de la Directiva CE 93/42/CEE sobre productos médicos.