



PELVI.LOC® PL-RR - XS - S - M - L - XL



Para un uso seguro de este producto, lea y siga estas instrucciones de montaje y utilización antes de utilizarlo por primera vez



Ámbito de aplicación

La correa de empeine **PELVI.LOC®** PL-RR sirve a personas con movilidad limitada, especialmente para el posicionamiento de los pies en reposapiés y estribos, evitando que se deslicen hacia adelante.

Grupo de pacientes previsto:

- niños, adolescentes y adultos
- neutral en cuanto al género

Control de recepción

Desembale completamente el producto y compruebe que el envío esté completo y que no haya sufrido daños durante el transporte. Si, en contra de lo esperado, comprueba que el envío presenta un defecto, proceda de la siguiente forma:

1. Reclame de inmediato al transportista
2. Haga que se registre el daño / fallo
3. Infórmenos a nosotros o a su distribuidor de inmediato

Volumen de suministro

- 1) 1 x correa de empeine **PELVI.LOC®** PL-RR -XS, -S, -M, -L, -XL premontada (par)
- 2) 1 x kit de montaje para reposapiés
- 3) 1 x información para descargar en línea las instrucciones de montaje y utilización

Combinación de productos médicos

Adecuado para medios auxiliares que están previstos para el uso de correas de empeine

Montaje



El montaje debe ser realizado por una persona con conocimientos especializados

1. Coloque las almohadillas (a) respectivamente en la zona del empeine del pie. La cinta dentada (b) se sujeta al reposapiés con el kit de montaje
2. Ajuste la separación de las almohadillas con el kit de montaje (d).
3. La correa de empeine se aprieta accionando las hebillas de trinquete (e).
4. Al pulsar el botón (f) se afloja la correa de empeine.
5. Tense la cinta dentada (b) de modo que el pie quede presionado sobre el reposapiés
6. En caso necesario, los extremos de la cinta dentada pueden cortarse de forma semicircular. Dado el caso, quite la rebaba de los extremos de la cinta dentada cortada. ¡Peligro de lesiones!
7. ¡Compruebe el apriete firme y el bloqueo en ambos lados de la cinta dentada!
8. ¡Compruebe el apriete firme y el bloqueo en ambos lados de la cinta dentada!



Instrucciones de utilización



Indicaciones de seguridad

A pesar de su diseño robusto, los componentes como el kit de montaje, las cintas dentadas y las almohadillas están sujetos a un cierto desgaste. Por ese motivo, se recomienda revisar minuciosamente el **PELVI.LOC®** cada 3 meses. ¡Al hacer esto, preste atención también al apriete firme de las uniones remachadas y atornilladas!

- Antes de utilizarlo, cerciórese de que el producto esté en perfecto estado y apretado correctamente. ¡Peligro de accidente!
- No remiende ni pegue los componentes dañados como correas, cintas dentadas (b) o almohadillas (a) para volver a colocarlos. ¡Peligro de accidente!
- No levante la silla de ruedas por el **PELVI.LOC®**. ¡Peligro de accidente!

Restricciones de utilización / efectos secundarios no deseados

- No utilice el **PELVI.LOC®** si hubiera escaras por presión, heridas u otras lesiones no cicatrizadas en la zona de las almohadillas. ¡Peligro de lesiones!
- No utilice el **PELVI.LOC®** en caso de pérdida de masa ósea, enfermedad de los huesos de cristal o problemas circulatorios graves. ¡Peligro de lesiones!
- ¡Después de la limpieza, asegúrese de que el **PELVI.LOC®** funcione correctamente!
- Un **PELVI.LOC®** dañado debe ser reemplazado de inmediato. ¡Peligro de accidente!



Atención:

- El **PELVI.LOC®** no forma parte del sistema de retención de la silla de ruedas y/o de los ocupantes durante el transporte en un vehículo para personas con discapacidad.
- ¡Ni el fabricante ni el distribuidor pueden ser considerados responsables en términos de responsabilidad del producto por daños o riesgos ocasionados por niños no supervisados en relación con el producto!

Utilización

1. Para el uso del **PELVI.LOC®** se colocan las almohadillas (a) sobre el empeine



Atención: ¡Preste atención a que no haya objetos debajo de las almohadillas! Así evitará dolorosas escaras por presión.

2. A continuación, pase la cinta dentada (b) a través del trinquete respectivo. Para ello, accione la hebilla de trinquete correspondiente (e).
3. Acto seguido, tense la cinta dentada (b) hasta que el pie quede presionado sobre el reposapiés (ligero contacto)

Si durante la utilización del **PELVI.LOC®** se produjera un aflojamiento no deseado del sistema de posicionamiento, esto puede corregirse tensándolo de nuevo.

Para la apertura del PELVI.LOC® accione la trabilla (f) y extraiga la cinta dentada.

- ¡Asegúrese de que las almohadillas no queden entre los rayos de la rueda de accionamiento!

Limpieza y desinfección

- Apto para lavadora hasta 40 grados.
- Es posible la desinfección quimiotérmica añadiendo ELTRA 40 al ciclo de lavado
- No centrifugar
- No apto para secadora

Mantenimiento

El **PELVI.LOC®** debe comprobarse periódicamente en cuanto a ausencia de daños y funcionamiento.

Reparaciones



Reemplace de inmediato un **PELVI.LOC®** defectuoso.

Eliminación

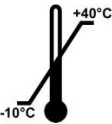

- El embalaje del dispositivo puede enviarse al reciclaje de materiales.
- Las piezas metálicas pueden enviarse al reciclaje de metales usados.
- Las piezas de plástico pueden enviarse al reciclaje de plástico.
- La eliminación debe realizarse de conformidad con las disposiciones legales nacionales correspondientes.
- Infórmese en la administración municipal/local sobre las empresas locales de eliminación de residuos.

Datos técnicos

PL-RR	XS	S	M	L	XL
Tamaño de almohadilla (cm)	17,5 x 5	17,5 x 5	25,5 x 8	25,5 x 8	24 x 7
Longitud total (cm) mínima	19	20	24	24	29
Longitud total (cm) máxima	27	27	31	36	51
Correa dentada	R-14-GO-110	R-24-BL-170	R-24-BL-195	R-24-BL-225	R-24-BL-225
Hebilla	B-14-GO-BL	B-24-LU-JU	B-24-LU-JU	B-24-LU-JU	B-24-LU-JU

PL-RR-GO	S	M	<p>El producto no contiene látex </p> 		
Tamaño de almohadilla (cm)	17,5 x 5	25,5 x 8			
Longitud total (cm) mínima	20	24			
Longitud total (cm) máxima	27	31			
Correa dentada	R-19-GO-BL-350	R-19-GO-BL-350			
Hebilla	B-19-GO-BL	B-19-GO-BL			

Condiciones de almacenamiento y transporte

	<p>Rango de temperatura para almacenamiento a largo plazo de -10°C a +40°C. Los picos de temperatura a corto plazo, por ej. durante el transporte, de -20°C a +60°C, son bien tolerados por el material y no afectan a la seguridad ni al rendimiento del producto.</p>
	<p>Proteger de la humedad durante el almacenamiento y el transporte</p>

Garantía

Para este producto, ofrecemos una garantía de conformidad con las disposiciones legales. Esto se extiende a los defectos de material y mano de obra. Quedan excluidas las piezas de desgaste y las piezas/los conjuntos que se encuentran sometidos a un desgaste normal, así como los daños derivados de una solicitud excesiva, un "uso no conforme a lo previsto", daños violentos o modificaciones/repares no autorizadas. En caso de reclamación de garantía, póngase en contacto con su distribuidor especializado al que compró este producto. Por razones de responsabilidad sobre el producto, los trabajos de reparación, mantenimiento y revisión sólo deben ser realizados por distribuidores especializados autorizados utilizando piezas de repuesto originales.



Fabricante:

A2J GmbH

Am Fuchsberg 13

D-87452 Altusried

Tel.: +49 (08373) 987269

Fax: +49 (08373) 987276

Correo electrónico: info@a2j-intl.com

Internet: www.a2j-intl.com

Actualizado 01.01.2025



Este producto cumple con los requisitos básicos del Reglamento de la UE 2017/745 sobre productos médicos – Medical Device Regulation (MDR)

Sujeto a modificaciones técnicas