


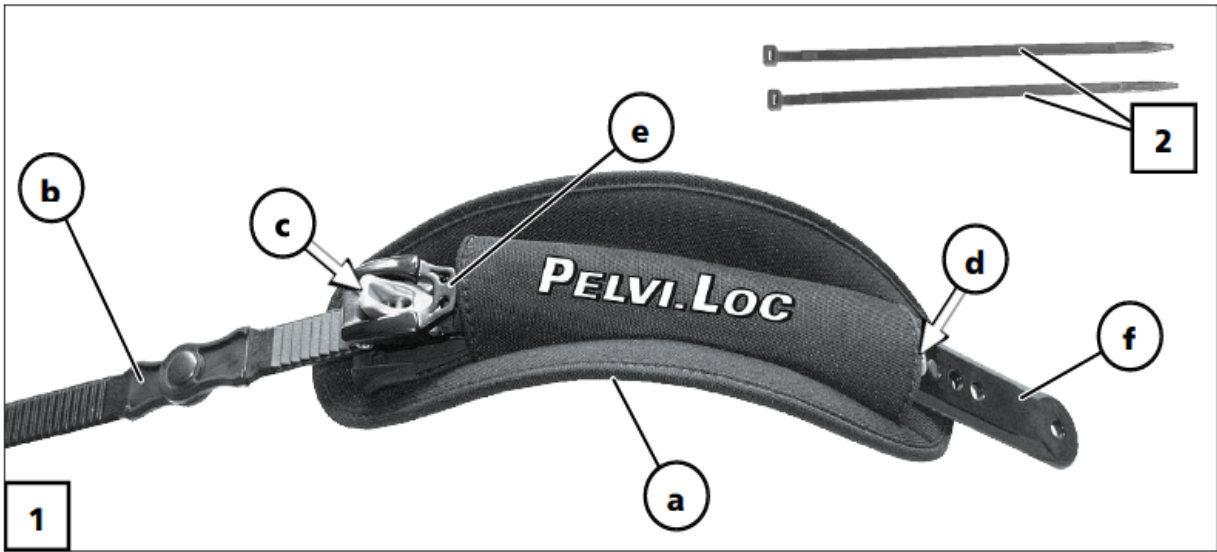

PELVI.LOC® PL-2DB -XXS, -XS, -S, -M, -L, -XL



Lue tämän tuotteen kokoonpano- ja käyttöohjeet ennen ensimmäistä käyttökertaa varmistuaksesi käytön turvallisuudesta.



Soveltamisala

PELVI.LOC® PL-2DB palvelee liikuntarajoitteisia ihmisiä etenkin heidän reisiensä sijoittamiseksi pyörätuoleihin ja aktiivisiin pyörätuoleihin, estäen heitä liukumasta eteenpäin.

Potilasryhmä, jolle tuote on tarkoitettu:

- Lapset, nuoret ja aikuiset
- Sukupuoli: naiset ja miehet

Vastaanottotarkastus

Poista tuote pakkauksesta kokonaan ja tarkista, että lähetys ei ole puutteellinen ja että siinä ei ole kuljetusvaurioita. Jos huomaat, että lähetyksessä on odottamattomia puutteita, niin:

1. Tee heti valitus kuljettajalle
2. Kirjaa vahinko/virhe ylös
3. Ilmoita meille tai kauppiaille heti

Toimituksen sisältö

- 1) 1 x **PELVI.LOC® PL-2DB** – XXS, -XS, -S, -M, -L, -XL esiasennettu
- 2) 2 x nippuside 7,8 mm
- 3) 1 x tietoa kokoonpano- ja käyttöohjeiden lataamisesta verkosta

Lääketieteellisten laitteiden yhdistelmä

Sopii apuvälineille, jotka on tarkoitettu lantion vetovyön käyttämiseen

Asennus



Asennus täytyy suorittaa asiantuntevan henkilön toimesta

1. Aseta pehmusteet (a) reiden alueelle. - Hammashihna (b) on päällä.
 - Pehmusteen logo näkyy sitten etupuolella!
2. Säädä pehmusteiden etäisyys hammashihnan (b) avulla kiristimellä (e).
 - Hammashihnan nivelen tulisi olla keskellä pehmusteiden välissä.
 - Vedä hammashihnaa ulos vain sen verran, että kunkin soljen (c) takana on vielä kaksi hammasta.
 - Tarranauha voidaan irrottaa ja pehmuste avata säätöä varten (huomioitava vain vyöllä, jossa on peitetty kiristin)
3. Kiinnitä sitten rei'itetyt hihnat (f) pyörätuolin kehysputkeen
4. Kiristä hammashihna (b) tasaisesti molemmilta puolilta ja niin pitkälle, että reiden ja pehmusteen välissä on vielä tilaa kämmenelle.
5. Hammashihnan päät voidaan tarvittaessa leikata puoliympyrän muotoon. Tasoita hammashihnan päät tarvittaessa. - Loukkaantumisvaara!
6. Tarkista, että hammashihna on kiinnitetty ja lukittu tiukasti!



Käyttöohjeet



Turvallisuusohjeet

Vakaasta rakenteesta huolimatta komponentit, kuten rei'itetyt hihnat, hammashihna ja pehmuste kuluvat jonkin verran. Siksi **PELVI.LOC**[®] on suositeltavaa tarkistaa perusteellisesti kolmen kuukauden välein. Varmista, että niitit ja ruuviliitännät ovat kiinni kunnolla!

- Varmistu ennen käyttöä siitä, että tuote on käyttökelpoinen ja että istuvuus on hyvä - onnettomuusvaara!
- Älä korjaa tai liimaa vaurioituneita osia, kuten rei'itettyjä hihnoja (f), hammashihnaa (b) tai liivin (f) pehmusteita (a) ja aseta niitä takaisin paikalleen - onnettomuusvaara!
- Älä istu pehmusteiden päälle - kiristimien (c) takia voi syntyä painepisteitä!
- Älä nosta pyörätuolia **PELVI.LOC**[®]:n yläpuolelle - onnettomuusvaara!
- Varmista, etteivät kädet pääse rei'itetyn vyön ja rungon tai istuinputken väliin - murtumisriski!

Käyttörajoitukset / ei-toivotut sivuvaikutukset

- Älä käytä **PELVI.LOC:ia**[®] jos pehmusteen alueella on painepisteitä, haavoja tai muita ei-parantuneita vammoja - loukkaantumisvaara!
- Älä käytä **PELVI.LOC:ia**[®] luukadon, synnynnäisen sidekudossairauden tai vakavien verenkiertohäiriöiden yhteydessä - loukkaantumisriski!
- Varmista puhdistuksen jälkeen, että **PELVI.LOC**[®] toimii oikein!
- Vaurioitunut **PELVI.LOC**[®] tulisi vaihtaa välittömästi - onnettomuusriski!



Huomio:

- **PELVI.LOC**[®] ei ole osa pyörätuolin ja/tai matkustajien passiivista turvajärjestelmää, kun sitä kuljetetaan vammaisille tarkoitetussa kuljetusvälineessä.
- Valmistajaa tai jakelijaa ei voida laittaa tuotevastuun merkityksessä vastuuseen vahingoista tai riskeistä, jotka aiheutuvat lasten jättämisestä vaille valvontaa tuotteen läheisyydessä!

Käyttö

1. **PELVI.LOC:ia**[®] käytettäessä pehmusteet (a) asetetaan reiteen



Huomio: Varmista, että pehmusteen alla ei ole esineitä! Tällä tavoin vältetään tuskallisilta painepisteiltä.

2. **Tärkeää:** älä laita lantion tai selkärangan kohdalle!
 3. Ohjaa sitten hammashihna (b) vastaavan soljen läpi. Käytä tätä varten vastaavaa kiristintä (e).
 4. Kiristä sen jälkeen hammashihna (b) tasaisesti molemmilta puolilta ja niin pitkälle, että reiden ja pehmusteen välissä on vielä tilaa kämmenelle.
 5. Varmista, että kiristimien soljet (c) lukittuvat kiinni hammashihnaan!
- Suorita vetokoe!

Jos kohdistusjärjestelmä löystyy ei-toivotusti **PELVI.LOC:in**[®] käytön aikana, tämä voidaan korjata kiristämällä se uudelleen.

Käytä **PELVI.LOC:in**[®] avaamiseen solki (c) ja vedä hammashihna ulos.

- Varmista, että pehmusteet eivät pääse vetopyörän pintojen väliin!

Puhdistus ja desinfiointi

- Sopii pesukoneeseen 40 asteen lämpötilaan saakka.
- Kemoterminen desinfiointi on mahdollista kun pesusykliin lisätään ELTRA 40:tä
- Älä linkoa
- Ei sovellu kuivausrumpuun

Huolto

PELVI.LOC[®] on tarkastettava säännöllisesti vaurioiden varalta ja moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.

Korjaukset

Vaihda viallinen **PELVI.LOC**[®] välittömästi.

Hävittäminen

- Laitepakkaukset voidaan kierrättää.
- Metalliosat voidaan kierrättää.
- Muoviosat voidaan kierrättää muovinkierrätyksessä.
- Hävittäminen on suoritettava kunkin valtion kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
- Kysy kunnalta/kaupungilta, missä on lähin jätteidenkäsittely-yritys.



Tekniset tiedot

	XXS	XS	S	M	L	XL
Istuimen leveys (cm)	12 - 20	16 - 24	20 - 32	30 - 40	36 - 46	44 - 52
Pehmusteen koko (cm)	12 x 7	17 x 7	20 x 7	22 x 8	25,5 x 8	28,5 x 9
Paino (g)	200	220	220	280	280	300
Oletusmurtopiste (noin kg kohdalla)	40	60	60	80	80	80

Hammashihna koko XXS - S	1,9 x 0,2 x 17,0 cm
Hammashihnan koko M - XL	2,4 x 0,2 x 17,0 cm

Tuote on
lateksiton



Takuu

Myönnämme tälle tuotteelle takuun lakisääteisten määräysten mukaisesti. Tämä koskee materiaali- ja käsittelyvirheitä. Tähän eivät sisälly kuluvat osat tai osat/moduulit, jotka ovat normaalin kulumisen alaisia eivätkä liiallisesta käytöstä, "epäasianmukaisesta käytöstä" tai liiallisesta voiman käytöstä aiheutuneet vauriot tai luvattomista muutoksista/korjauksista aiheutuneet vauriot. Takuuvaatimustapauksissa ota yhteyttä erikoisliikkeeseen, jolta ostit tämän tuotteen. Tuotevastuun vuoksi korjaus-, huolto- ja korjaustöitä saavat suorittaa vain valtuutetut erikoisliikkeet, joiden täytyy käyttää alkuperäisiä varaosia



Valmistaja:

A2J GmbH
Am Fuchsberg 13
D-87452 Altusried
Puhelin: +49 (08373) 987269
Faksi: +49 (08373) 987276
Sähköposti: info@a2j-intl.com
Internet: www.a2j-intl.com



Tämä tuote täyttää lääkinnällisiä laitteita koskevan EY:n direktiivin 93/42/ETY:n perusvaatimukset

Tilanne 01.03.2019

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään