




## **PELVI.LOC® PL-ASY - S, -M, -L**

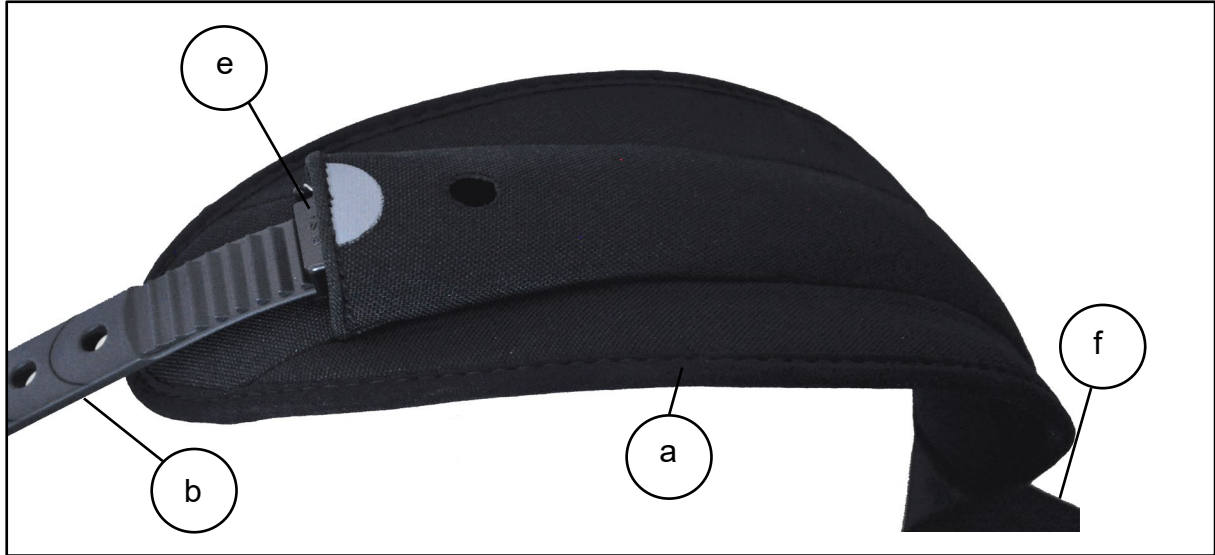

Lue tämän tuotteen kokoonpano- ja käyttöohjeet ennen ensimmäistä käyttökertaa varmistaaksesi käytön turvallisuudesta.



### **Soveltamisala**

**PELVI.LOC®** PL-ASY palvelee liikuntarajoitteisia ihmisiä etenkin heidän epäsymmetrisen lantionsa sijoittamiseksi pyörätuoleihin ja aktiivisiin pyörätuoleihin ja heidän eteenpäin liukumisensa estämiseksi.

### **Potilasryhmä, jolle tuote on tarkoitettu:**

- Lapset, nuoret ja aikuiset
- Sukupuoli: naiset ja miehet

### **Vastaanottotarkastus**

Poista tuote pakkauksesta kokonaan ja tarkista, että lähetys ei ole puutteellinen ja että siinä ei ole kuljetusvaurioita. Jos huomaat, että lähetyksessä on odottamattomia puutteita, niin:

1. Tee heti valitus kuljettajalle
2. Kirjaa vahinko/virhe ylös
3. Ilmoita meille tai kauppiaille heti

### **Toimituksen sisältö**

- 1) 1 x **PELVI.LOC®** PL-ASY -S, -M, -L esiasennettu
- 2) 2 x nippuside 7,8 mm
- 3) 2 x vyöhihnan silmukat
- 4) 2 x hammashihna 400 mm pitkä
- 5) 1 x tietoa kokoonpano- ja käyttöohjeiden lataamisesta verkosta

## Lääketieteellisten laitteiden yhdistelmä

Sopii apuvälineille, jotka on tarkoitettu lantion vetovyön käyttämiseen

### Asennus



Asennus täytyy suorittaa asiantuntevan henkilön toimesta

1. Aseta pehmusteet (a) lantion alueella/lantion ihon taittokohdassa.
2. Kiinnitä hammashihna (b) pyörätuolin istuinputkeen (noudata asennusohjeita! )
  - Vyönhihna (f) on kiinnitetty pyörätuolin istuimeen erikseen
3. Aseta pehmusteiden välinen etäisyys hammashihnalla (b). 3 D vyö kiristetään aktivoimalla soljet (e).
4. Kiristä hammashihna (b) tasaisesti molemmilta puolilta ja niin pitkälle, että reiden ja pehmusteen välissä on vielä tilaa kämmenelle.
5. Hammashihnan päät voidaan tarvittaessa leikata puolipyörän muotoon. Tasoita hammashihnan päät tarvittaessa. - Loukkaantumisvaara!
6. Tarkista, että hammashihna on kiinnitetty ja lukittu tiukasti molemmilta puolilta!



### Käyttöohjeet



### Turvallisuusohjeet

Vakaasta rakenteesta huolimatta komponentit, kuten rei'itetyt hihnat, turvavyöt, hammashihnat ja pehmuste kuluvat jonkin verran. Siksi **PELVI.LOC**<sup>®</sup> on suositeltavaa tarkistaa perusteellisesti kolmen kuukauden välein. Varmista, että niitit ja ruuviliitännät ovat kiinni kunnolla!

- Varmistu ennen käyttöä siitä, että tuote on käyttökelpoinen ja että istuvuus on hyvä - onnettomuusvaara!
- Älä korjaa tai liimaa vaurioituneita osia, kuten rei'itettyjä hihnoja/vyöhihnoja (f), hammashihnaa (b) tai liivin (f) pehmusteita (a) ja aseta niitä takaisin paikalleen - onnettomuusvaara!
- Älä istu pehmusteiden päälle - erityisesti neppareiden (e) takia voi syntyä painepisteitä!
- Älä nosta pyörätuolia **PELVI.LOC:in**<sup>®</sup> yläpuolelle - onnettomuusvaara!
- Varmista, etteivät kädet pääse rei'itetyn vyön ja rungon tai istuinputken väliin - murtumisriski!

### Käyttörajoitukset / ei-toivotut sivuvaikutukset

- Älä käytä **PELVI.LOC:ia**<sup>®</sup> jos pehmusteen alueella on painepisteitä, haavoja tai muita ei-parantuneita vammoja - loukkaantumisvaara!
- Älä käytä **PELVI.LOC:ia**<sup>®</sup> luukadon, synnyynnäisen sidekudossairauden tai vakavien verenkiertohäiriöiden yhteydessä - loukkaantumisriski!
- Varmista puhdistuksen jälkeen, että **PELVI.LOC**<sup>®</sup> toimii oikein!
- Vaurioitunut **PELVI.LOC**<sup>®</sup> tulisi vaihtaa välittömästi - onnettomuusriski!



### Huomio:

- **PELVI.LOC**<sup>®</sup> ei ole osa pyörätuolin ja/tai matkustajien passiivista turvajärjestelmää, kun sitä kuljetetaan vammaisille tarkoitetussa kuljetusvälineessä.
- Valmistajaa tai jakelijaa ei voida laittaa tuotevastuun merkityksessä vastuuseen vahingoista tai riskeistä, jotka aiheutuvat lasten jättämisestä vaille valvontaa tuotteen läheisyydessä!

### Käyttö

1. **PELVI.LOC:ia**<sup>®</sup> käytettäessä pehmusteet (a) asetetaan lantion alueella/lantion ihon taittokohdassa.



**Huomio:** Varmista, että pehmusteen alla ei ole esineitä! Tällä tavoin vältetään tuskallisilta painepisteiltä.

2. Ohjaa sitten hammashihna (b) vastaavan soljen läpi. Käytä tätä varten vastaavaa kiristintä (e).
  3. Kiristä sen jälkeen hammashihna (b) niin pitkälle, että reiden ja pehmusteen välissä on vielä tilaa kämmenelle.
  4. Varmista, että nepparit (e) lukittuvat kiinni hammashihnaan!
- Suorita vetokoe!

Jos kohdistusjärjestelmä löystyy ei-toivotusti **PELVI.LOC:in**<sup>®</sup> käytön aikana, tämä voidaan korjata kiristämällä se uudelleen.

Käytä **PELVI.LOC:in**<sup>®</sup> avaamiseen nepparia (e) ja vedä hammashihna ulos.

- Varmista, että pehmusteet eivät pääse vetopyörän pintojen väliin!

### Puhdistus ja desinfiointi

- Sopii pesukoneeseen 40 asteen lämpötilaan saakka.
- Kemoterminen desinfiointi on mahdollista kun pesusykliin lisätään ELTRA 40:tä
- Älä linkoa
- Ei sovellu kuivausrumpuun

### Huolto

**PELVI.LOC**<sup>®</sup> on tarkastettava säännöllisesti vaurioiden varalta ja moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.

### Korjaukset

Vaihda viallinen **PELVI.LOC**<sup>®</sup> välittömästi.

## Hävittäminen

- Laitepakkaukset voidaan kierrättää.
- Metalliosat voidaan kierrättää.
- Muoviosat voidaan kierrättää muovinkierrätyksessä.
- Hävittäminen on suoritettava kunkin valtion kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
- Kysy kunnalta/kaupungilta, missä on lähin jätteidenkäsittely-yritys.



## Tekniset tiedot

	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>
<b>Istuimen leveys (cm)</b>	26 - 35	36 - 39	40 - 46
<b>Pehmusteen koko (cm)</b>	19 x 7,5	29 x 11	36 x 13,5
<b>Paino (g)</b>	260	300	400
<b>Oletusmurtopiste (noin kg kohdalla)</b>	60	80	80

<b>Hammashihnan koko S - M - L</b>	2,4 x 0,2 x 40 cm
------------------------------------	-------------------

Tuote on  
lateksiton



## Takuu

Myönämme tälle tuotteelle takuun lakisääteisten määräysten mukaisesti. Tämä koskee materiaali- ja käsittelyvirheitä. Tähän eivät sisälly kuluvat osat tai osat/moduulit, jotka ovat normaalin kulumisen alaisia eivätkä liiallisesta käytöstä, "epäasianmukaisesta käytöstä" tai liiallisesta voiman käytöstä aiheutuneet vauriot tai luvattomista muutoksista/korjauksista aiheutuneet vauriot. Takuuvaatimustapauksissa ota yhteyttä erikoisliikkeeseen, jolta ostit tämän tuotteen. Tuotevastuun vuoksi korjaus-, huolto- ja kunnossapitotöitä saavat suorittaa vain valtuutetut erikoisliikkeet, joiden täytyy käyttää alkuperäisiä varaosia



### Valmistaja:

A2J GmbH  
Am Fuchsberg 13  
D-87452 Altusried  
Puhelin: +49 (08373) 987269  
Faksi: +49 (08373) 987276  
Sähköposti: [info@a2j-intl.com](mailto:info@a2j-intl.com)  
Internet: [www.a2j-intl.com](http://www.a2j-intl.com)



Tämä tuote täyttää lääkinnällisiä laitteita koskevan EY:n direktiivin 93/42/ETY:n perusvaatimukset

Tilanne 01.05.2019

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään