



PELVI.LOC® PL - OPS - Positionnement du haut du corps sur mesure



Pour utiliser ce produit en toute sécurité, veuillez lire la présente notice de montage et d'utilisation avant la première utilisation et la respecter



Champ d'application - Finalité

Le **PELVI.LOC®** OPS sur mesure est conçu pour les personnes à mobilité réduite, notamment pour le positionnement du haut du corps et du bassin dans un fauteuil roulant et/ou un siège auto pour enfants, empêchant le glissement vers l'avant du bassin.

Groupe de patients ciblé :

- Enfants, adolescents et adultes
- Unisexe

Contrôle à réception

Déballer complètement le produit et vérifier que l'envoi est complet et n'a pas été endommagé lors du transport. Si vous constatez, contre toute attente, que l'envoi présente un défaut :

1. Formuler une réclamation immédiatement auprès du transporteur
2. Consigner le dommage / défaut par écrit
3. Nous informer immédiatement ou votre revendeur

Contenu de la livraison

- 1) 1 x **PELVI.LOC**® PL - OPS sur mesure préassemblé
- 2) 1 x fiche d'informations sur le téléchargement en ligne de la notice de montage et d'utilisation

Combinaison de dispositifs médicaux

Convient pour les accessoires prévus pour l'utilisation d'une ceinture de rétraction pelvienne avec positionnement du haut du corps.

Montage



Le montage doit être réalisé par une personne possédant des compétences techniques.

1. Passer la sangle dorsale (couleur grise) à travers l'assise et l'interstice dorsal, la fermer à l'aide de la boucle située derrière l'appui-tête et tendre la sangle.



Notice d'utilisation



Consignes de sécurité

Malgré leur construction robuste, les composants tels que les sangles, le velcro, le harnais et la sangle d'épaule sont soumis à une certaine usure. Par conséquent, il est recommandé de contrôler minutieusement le **PELVI.LOC**® OPS sur mesure tous les 3 mois. Dans ce contexte, il convient également de s'assurer que les coutures sont bien fixées !

- Avant l'utilisation, s'assurer que le produit est dans un état adapté et qu'il est fermement installé - risque d'accident !

- Ne pas réparer ou coller et réutiliser des composants endommagés tels que les boucles/sangles, le velcro ou le coussinet - risque d'accident !
- Ne pas s'asseoir sur les coussinets - risque de points de pression, en particulier à cause des boucles (d) !
- Ne pas soulever le fauteuil roulant par le **PELVI.LOC**® OPS sur mesure - risque d'accident !

Limites d'utilisation / effets secondaires indésirables

- Ne pas utiliser le **PELVI.LOC**® OPS sur mesure en présence de points de pression, de plaies ou d'autres blessures non cicatrisées dans la zone des coussinets - risque de blessures !
- Ne pas utiliser le **PELVI.LOC**® OPS sur mesure en cas d'ostéoporose, d'ostéogénèse imparfaite ou de troubles circulatoires sévères - risque de blessures !
- Après le nettoyage, s'assurer que le **PELVI.LOC**® OPS sur mesure fonctionne correctement !
- Un **PELVI.LOC**® OPS sur mesure endommagé doit être remplacé immédiatement - risque d'accident !



Attention :

- Le **PELVI.LOC**® OPS sur mesure ne fait pas partie du système de retenue du « fauteuil roulant » et/ou de son occupant lors du transport dans un véhicule de transport de personnes à mobilité réduite.
- Dans le cadre de la responsabilité du fait des produits, ni le fabricant, ni le distributeur ne peuvent être tenus pour responsables des dommages ou des risques liés au produit ayant été occasionnés par des enfants non surveillés !

Application

1. Placer le pantalon d'assise (a) au niveau de l'entrejambe jusqu'à environ la hauteur du nombril. - Serrer fermement les sangles d'épaule (b) sur le pantalon.



Attention : Veiller à ce qu'aucun objet ne se trouve sous le coussinet ! Vous éviterez ainsi des points de pression douloureux.

1. Serrer fermement la sangle abdominale (c) en tirant doucement.
2. Concernant la fermeture de boucle (d) (fermer si disponible en option), s'assurer qu'il y ait encore de la place pour une main à plat entre le ventre et le coussinet.
3. S'assurer que la fermeture (d) s'enclenche !

- Effectuer un essai de tension !

Si un relâchement non souhaité du système de positionnement survient durant l'utilisation du **PELVI.LOC®** OPS sur mesure, il peut ainsi être corrigé par une nouvelle tension.

Pour ouvrir le **PELVI.LOC® OPS sur mesure**, actionner la boucle (d), le cas échéant, et ouvrir la sangle abdominale.

- S'assurer que les coussinets des sangles d'épaule ne se trouvent pas entre les rayons de la roue d'entraînement !

Nettoyage et désinfection

- Lavable en machine jusqu'à 40 degrés.
- Désinfection thermochimique possible en ajoutant de l'ELTRA 40 au cycle de lavage
- Ne pas essorer
- Ne pas sécher au sèche-linge

Entretien

Vérifier régulièrement l'état et le fonctionnement du **PELVI.LOC®** OPS sur mesure.

Réparations


Remplacer immédiatement le **PELVI.LOC®** OPS sur mesure en cas de défaut.

Élimination

- L'emballage du dispositif est recyclable.
- Les pièces métalliques peuvent être déposées dans des points de recyclage de métaux.
- Les pièces en plastique peuvent être déposées dans des points de recyclage de matières plastiques.
- L'élimination doit être effectuée conformément aux dispositions légales nationales concernées.
- Veuillez-vous renseigner auprès de votre municipalité / communauté de communes pour connaître les points de collecte locaux.



Fiche de mesures OPS

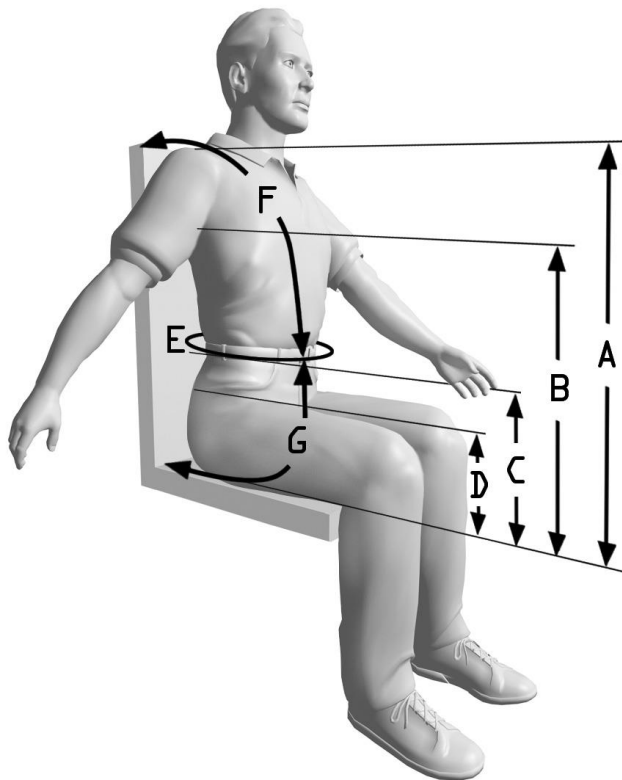

A	Assise – Épaule	cm
B	Assise – Hauteur sous les aisselles	cm
C	Assise – Taille	cm
D	Assise – Hauteur des cuisses	cm
E	Taille – Tour de taille	cm
F	Épaule – Taille	cm
G	Dimensions du siège (dossier – taille)	cm

Veuillez prendre les mesures sans rajouter de vêtements

Hauteur du dossier	cm	
Largeur du dossier	cm	
Épaisseur entre les tubes d'appui-tête	cm	
Possibilité de mise en œuvre	Oui	Non
Siège – Dossier		
Type de fauteuil roulant		

Fermeture souhaitée – Types

Fermeture à pression à ouvrir avec 2 doigts art.nr. :KSS-50	☐
Fermeture à pression à ouvrir avec 3 doigts art.nr. :KSS-50	☐
Fermeture à pression à ouvrir avec 3 doigts tournée vers l'intérieur art.nr. : KSS-S-50 180°	☐
Serrure mobile art.nr. :SKS-30-SF avec fonction de sécurité (ouverture de broche)	☐

Sans latex



Attention : seule une fiche de mesure soigneusement remplie garantit un bon positionnement du haut du corps !



Attention : si le PELVI.LOC® OPS sur mesure est installé dans une voiture courante, toujours attacher la personne en plus avec la ceinture à 3 points !

Conditions de transport et de stockage

	Plage de températures pour un stockage de longue durée : -10 °C à +40 °C. Les pics de température de courte durée, par ex. dans le cadre du transport, de -20 °C à +60 °C sont bien tolérés par les matériaux et n'impactent pas la sécurité et les performances du produit.
	Protéger de l'humidité pour le transport et le stockage

Garantie

Nous accordons une garantie sur ce produit conformément aux dispositions légales. Elle couvre les vices matériels et les vices de fabrication. En sont exclus : les pièces d'usure et les pièces / modules soumis à une usure normale, ainsi que les dommages résultant d'une sollicitation excessive, d'une « utilisation non-conforme », d'un exercice de la force ou d'une modification / d'un entretien non autorisé(e). Dans un cas relevant de la garantie, veuillez-vous adresser au revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit. Pour des raisons de responsabilité du fait des produits, les réparations, ainsi que les travaux de maintenance et d'entretien, doivent exclusivement être réalisés par des revendeurs agréés utilisant des pièces de rechange d'origine



Fabricant :

A2J GmbH
Am Fuchsberg 13
D-87452 Altusried
Téléphone : +49 (08373) 987269
Fax : +49 (08373) 987276
E-mail : info@a2j-intl.com
Internet : www.a2j-intl.com



Ce produit est conforme aux exigences essentielles du règlement européen 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux (Medical Device Regulation, MDR).

Version du 01.01.2025

Sous réserve de modifications techniques